

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following Ambu White Sensor electrodes:
WS, WS-RT, WSF25, WSF26, D215M, D315M, 0415M, 0715M, 2742T, 2742RT, 2837T, 33452D/RTT*, 3351T, RTT*, 3552T*, 3552/RTT*, 3552DUAL/RTT*, 4200, 4200, 4242, 4440, 4500M, 4500M-H, 4530, 4535M, 4540, 4560M, 4570M, 4831/2, 4841P, 5050, 5060, 6060, 7041P, CMM1.

Ambu, Blue Sensor electrodes: BS-TAB-2300.

Instructions for use

Инструкции за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Instruções de utilização

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по применению

Návod na použití

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明

Brugervejledning

EKG-elektroder

1.0 Tilsløjet anvendelse

Elektroden lægges på kroppens overflade med henblik på at undersøge det elektriske signal ved kroppens overflade til en optageles- og monitoringsanordning, der danner et elektrokardiogram eller vektorkardiogram.

1.2 Advarsler og forsigtighedsregler

Advarsel

- Overfladeelektroder må kun sættes på intakt, ren hud ide må tåle, dog direkte årene via, leverens infarkt eller betændelse området.
- Kun til engangsbrug. Brug af produktet kan forårsage kontaminering, hvilket kan medføre infektioner.

Advarsel

- Under kirurgiske indgreb skal elektroderne anbringes så langt som muligt fra det elektrokirurgiske område for at minimere uønsket RF-stråling, der kan medføre forvarmning af huden.
- Elektroderne må kun anvendes af eller i samråd med sundhedsprofessionelle, der er bekendt med korrekt placering og anvendelse af dem.
- Elektroderne må ikke lægges i væske, skylles eller steriliseres, da det kan efterlade skadelige rester eller forlænge funktionslivet i elektroderne.

- Når elektroderne er fjernet fra dækpapiert, skal dækpapiert bortskaffes (den der er indemålt afslutningspunkt).
- Undgåen berøring af MII-aktive elektroder. Fjern elektroden fra patienten, når der udføres MRI-scanning, da det kan forårsage forvarmning af patientens hud.

- Ved udførelse af elektroder kan hudirritation minimeres ved at finde et nyt hudområde at sætte de nye på.
- Elektroderne kan beskadige huden, hvis de ikke fjernes forsigtigt.
- Efter amerikansk lov må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter lægeordination.
- Elektroder uden ledning må kun anvendes med ledninger, der opfylder IEC 60601-1.
- Benyttes MII-aktive elektroder. Under MRI-scanning skal elektroderne anvendes med MII-kompatible ledninger.

1.3 Generelle bemærkninger

Potentielle utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af overfladeelektroder er hudirritationer såsom hudforbrændinger, hududslæt, hudlæk og små vabler.

2.0 Symbolforklaring

Symboler for Ambu White-Sensor elektroder	Indikation	Symboler for Ambu White-Sensor elektroder	Indikation	Symboler for Ambu White-Sensor elektroder	Indikation
	Medicinsk udstyr		Våd gel		Tekstmateriale
	Røntgentransparent		Polymerskapsmateriale		Skummateriale
	Fast gel		Elektrisk sikkerhed, type III, patientled		
	Bemærk: Eget til magnetisk resonans. Kun et statisk magnetfelt på 1,5 Tesla og 3 Tesla. Et maksimalt rumligt gradientfelt på 25.000 gauss/cm eller 250 Tesla/m. En maksimal gennemsnitlig, specifik absorptionsrate for hele kroppen (SAR) på < 1 W/kg ved 15 minutters scanning. * Det maksimale rumlige gradientfelt på 12.900 gauss/cm eller 120 Tesla/m.				

3.0 Brugervejledning

- Vask eventuelt påføringsområdet med mild sæbe og vand, og tør grundigt.
- Kun til voksne. Kraftigt behårede områder klippes eventuelt. Adhuk kun forsigtigt. Hvis huden påføres en forsegling.
- Den korrekte placering af elektroder afgøres typisk af hospitalslægen og/eller lokale produktionsprocedurer.
- Dækpapiert fjernes kun ved skarpe, og der skal udvises forsigtighed, når elektroderne fjernes fra patient. Tørk elektroden af dækpapiert, og sæt den på huden. Bortskaf dækpapiert umiddelbart efter at elektroden er fjernet.
- Hvis der bruges elektroder med korrektioner, skal korrektionen vendes, så ledningerne forbliver i samme retning mod udstyret.
- Lang elektroden på huden ved at trykke forsigtigt rundt langs den klæbende kant med en jævn og fast cirkelbevægelse.
- Tilslut ledningen fra EKG-apparatet til elektroden.
- Sådan fjernes elektroden: Løft forsigtigt fjern eller kanten af elektroden, hold profilen lav, og tag langsomt elektroden af huden, mens du holder den klæbende hud med en hånd som elektroden fjernes. Hold elektroden tæt på hudoverfladen, mens du trækker den bagud af. Undgå at fjerne elektroden i en vinkel på 45 grader for at mindske risikoen for mekanisk trauma.
- Selvklæbende elektroder skal udfiktes, hvis de ikke længere sidder godt fast på huden.
- Gelstene kan fjernes med papirervetter eller vand.
- Elektroder i en åbent pose kan tæppe på, og posen må derfor ikke åbnes, før det er nødvendigt.
- Elektroderne er til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale hospitalprocedurer.

4.0 Anvendelsens varighed (tid i timer)

Varenummer	Geltype	Klæbetype	Sensormateriale	Patientindikation	Målemuligheder anvendelsesområde	Anvendelsestid (time)
BS-TAB-2300	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Hjerte	1/2
U15	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Kortvarig	24
WS-RT	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Kortvarig	24
WSF25	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Pædiatrik	Hjerte/langvarig	48
WSF26	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne/pædiatrik	Hjerte/langvarig	48
D215M	Fast gel	Fast gel	Ag/AgCl	Pædiatrik	Hjerte	1/2
D315M	Fast gel	Fast gel	Ag/AgCl	Voksne	Hjerte	1/2
0415M	Fast gel	Fast gel	Ag/AgCl	Voksne	Hjerte	1/2
0715M	Fast gel	Fast gel	Ag/AgCl	Voksne	Hjerte	1/2
2742	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne/pædiatrik	Hjerte	24
2742/RT	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Langvarig**	48
2837	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Hjerte	1/2
33452D/RT	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Hjerte/langvarig	48
3351/RT	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Stress/Hjerte/Overvågning	48
3552	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Hjerte	24
3552/RT				Langvarig**	48	
3552DUAL/RT				Hjerte/langvarig	48	
4200	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Kortvarig	24
4240	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Kortvarig	24
4242	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Stress/Langvarig	48
4440	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Langvarig	48
4500M	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Kortvarig	24
4500M-H	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Kortvarig	24
4530	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Hjerte	24
4535M	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Kortvarig	24
4540	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Hjerte	24
4560M	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Stress/24	24
4570M	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Pædiatrik	Kortvarig	24
4831/2	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne/pædiatrik	Kortvarig	24
4841P	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Kortvarig	24
5050	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Stress/Langvarig	48
6060	Våd gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Stress/Langvarig	48
7041P	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Kortvarig	24
CMM1	Fast gel	Acryl	Ag/AgCl	Voksne	Langvarig	48

DA

Made in India
1040 Brussels, Belgium
Bvd. Saint-Michel 65/6,
Medico Electrodes Ltd.
Noida, Uttar Pradesh - 201305, India
Plot 142A/1, 1, 2, 7, 28 & 29, Noida Special Economic Zone,
www.medicoelectrodes.com
[AN ISO 13485 COMPANY]

MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL LTD.



ambu.com
Tél. +45 72 25 20 00
Denmark
DK-2750 Ballerup
Ballerupvej 13
Bamb & S
EU Importer: