

NÄIDUSTUSED

Tondause kirurgiline nahamarker on mõeldud inimese nahale märgistamiseks tavakirurgia, enterokirurgia, ortopeedia, neurohormoonkirurgia, südame-veresoonkonna kirurgia ja kiiritusravi korral.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada kahjustatud limaskestade või naha ega haavade korral.

ETTEVAATUST, HOIATUS

- 1). Tuleb arvestada allergiliste reaktsioonide tekkega patsientidel gentianvioleti / võlupunase AC / indigo / titaandioksiidi suhtes (vastavalt eri värvidele). Kui patsiendil ilmneb kasutamise ajal halb enesetunne, lõpetage kasutamine kohe.
- 2). Toodet võib ühel patsiendil kasutada ainult ühe korra, et vältida ristinfektsiooni.
- 3). Toodet tuleks kasutada kuivale nahale. Kui patsiendi nahk on märg või hiline, kuivatage see. Kuivatage ja värskendage nahk, seejärel järgige eespool toodud juhiseid.
- 4). Kasutades pöörake tähelepanu pliiatsi otsa kaitsele. Kui te pliiatsit ei kasuta, pange kork peale, et vältida tindi kuivamist.
- 5). Toode tuleb ära kasutada kohe pärast avamist. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või määrdunud. Pärast toote kasutamist tuleb see hävitada meditsiinijäätmetena.
- 6). Ärge leotage toodet ega pühkige orgaanilise



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

lahustiga. Orgaanilised lahustid võivad toodet kahjustada.

7). Toodet võivad kasutada koolitatud meditsiinitöötajad.

8). Pärast kasutamist kõrvaldada meditsiinijäätmetena.

JUHISED KASUTAMISEKS

1). Enne kasutamist kontrollige, kas sisepakend on terve. Ärge kasutage, kui sisepakend on katki.

2). Kõigepealt desinfitseerige ja kuivatage nahk (märkus: kasutage toodet kindlasti kuival nahal).

3). Kasutage naha märgistamiseks nahamarkerit.

4). Märgistuse eemaldamiseks kasutage 75% alkoholi.

SÄILITAMISE JA TRANSPORTIMISE TINGIMUSED

1). Toodet tuleb hoida jahedas, ventileeritavas ja kuivas kohas, vältides kokkupuudet veega, otsest päikesevalgust, äärmuslike temperatuuride või niiskusega kohti ning välistades kokkupuute söövitavate gaasidega. Temperatuur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, niiskus: $\leq 90\%$, et vältida pakendi kahjustamist, pöörake tähelepanu roti- ja kahjuritõrjele.

2). Ühekordseid meditsiinilisi nahamarkereid võib transportida tavapärares transportivahendites, kuid transpordi ajal peab vältima tugevaid põrutusi, vibratsiooni ning vihma ja lund.

GIMA GARANTII TINGIMUSED

Kehtib Gima 12-kuuline standardne B2B garantii.

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - مصنع
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskuupäev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصلاحية
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - كود المنتج



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
Community, Houjie Town,
Dogguan, Guangdong, China.
Made in China



TR03

TD01



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
Via Marconi, 1- 20060 Gessate (MI) - Italy
export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123