

# surgifix®

## SINGLEFIX

رباط طبي واقى معقم للإصبع جاهز للاستعمال.

Стерилна предпазна превръзка за пръст,  
готова за използване

Sterilní ochranná zdravotnická pomůcka na prst  
připravena pro použití

Steril fingerbandage parat til brug

Sörme kaitsev sterilne kasutusvalmis haavaside

Suojaava, steriili, valmiskäyttöinen sidos sormelle

Pansement stérile protecteur pour doigt prêt à  
l'usage

指の殺菌・保護、すぐにご使用できます。

Άσηπτη θεραπευτική αγωγή για το δάχτυλο

έτοιμη προς χρήση

Sterile ready-to-use finger medication

Medicazione sterile protettiva per dito pronta per l'uso

Aizsargājošs ārstnieciskais līdzeklis pirkstam

gatavs lietošanai

Sterilus parengtas naudoti apsauginis tvarstis pirštui

Steriele, beschermende vingermedicatie, klaar  
voor gebruik

Steril forbinding for finger, klar til bruk

Sterylny środek ochronny na palec, gotowy do użycia

Medicação estéril protectora para os dedos

pronta para uso

Pansament steril pentru protecția degetului gata  
de utilizare

Стерильная защитная перевязка для пальца,  
готовая к использованию

Sterilný ochranný liečebný prostriedok na prst  
pripravený na použitie

Zaščitno sterilno zdravljenje prsta, pripravljeno  
za uporabo

Medicación estéril para dedo lista para usar

Steril skyddsomläggning för fingret. Klar för  
användning





Gebrauchsfertiges steriles Verbandmaterial für  
Finger

Kullanıma hazır, steril koruyucu sargı bezi

Használatra kész védő, steril ujjkötés



Via delle Poste, 16  
14010 Dusino San Michele (AT) - Italy  
[www.fraproduction.it](http://www.fraproduction.it)

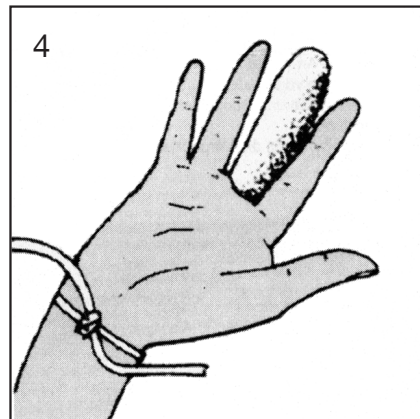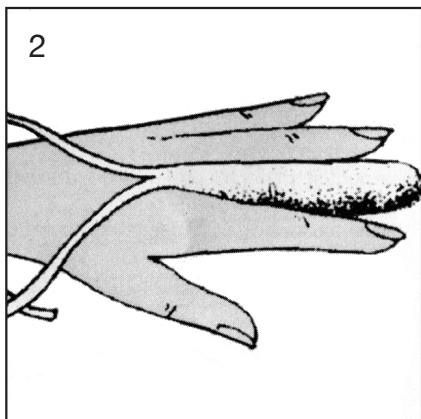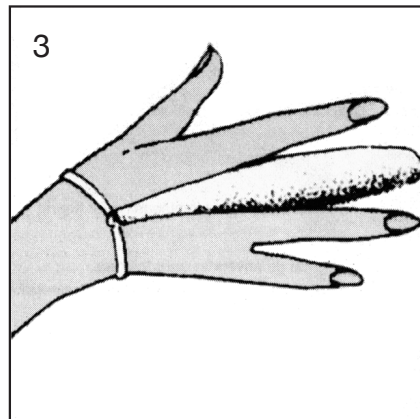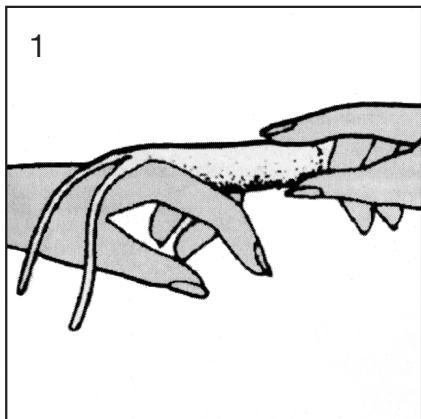

PAP 22  
Carta  
Raccolta differenziata  
Verifica le disposizioni del tuo Comune

MD



CE 0373



STERILER

#### ET

**Kasutusotstarve:** sõrme kaitsev steriilne haavaside

#### Hoiatused!

- Haava tuleb enne sideme kasutamist arstitega ravida.
- Kui haav on veritsev, on soovitatav kasutada steriilset marlit.
- Vältida ebaõiget kasutamist.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge pingutage nõõre liiga tugevalt ümber randme.
- Mitte alla neelata.
- Mitte kasutada, kui pakend ei ole terve.