

TSENTRIFUUGITAVAD KATSEKLAASID

CE-MÄRGISEGA *IN VITRO* DIAGNOSTIKASEADE
Professionaalseks ja hügieeninõudeid järgivaks kasutamiseks

Proovi liik: vere-, vereseerumi- või uriiniproov

KASUTUSJUHE

- 1) Kontrollige tooteteavet ja pakendi terviklikkust.
- 2) Kirjutage vajalik teave sildile (patsiendi nimi, analüüs, proov jne).
- 3) Avage tsentrifuugitav katseklaas.
- 4) Tilgutage proov sobiva töövahendiga katseklaasi, eesmärgiga proovi lahjendada, hoiustada, tsentrifuugida, söötmele baktereid kasvatada või muul eesmärgil.
- 5) Sulgege tsentrifuugitava katseklaasi kork tihedalt, et katseklaas tsentrifuugimisel ei lekiks.

HOIATUSED KASUTAMISEL

- Seade on mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötajatele.
- Kasutage kaitsekindaid.
- Ärge asetage seadet leegi lähedusse.
- Ärge kasutage toodet, kui see on aegunud, kahjustatud või selle pakend on avatud.
- Ärge muutke sihtotstarvet; mistahes muid kasutusviise loetakse sobimatuks.
- Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutage seadet ainult koos sobivate tarvikutega.
- Hoiustage kuivas kohas, soojusallikatest ja otsesest päikesevalgusest eemal.
- Kõrvaldage toode vastavalt kohalikele nõuetele bioloogiliselt ohtlike jäätmete konteinerisse.
- Seade on ühekordselt kasutatav. Seadme korduskasutamine põhjustab kõigi toimivusnäitajate ja omaduste halvenemise.
- Kõikidest seadmega seotud ohujuhtumitest tuleb teatada tootjale ja patsiendi elukohariigi pädevale asutusele.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

