

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIK JUHISED LÄBI. ENNE KASUTAMIST PIDAGE NÕU ARSTIGA.

VASTUNÄIDUSTUSED Ei ole mõeldud üle 242 lbs (110 kg) kaaluvatele inimestele. Ei ole mõeldud kasutamiseks jäistes või libedates oludes. Ei ole mõeldud lateksiallergiaga inimestele.

KASUTUSJUHE Kepi lahti tegemiseks hoidke käepidemest kinni, nii et kokku käivad varreosad saaksid end pöranda suunas lahti voltida. Kukkumise vältimiseks tuleb alati kontrollida, kas kõik varre segmendid (joonis 1) on kindlalt oma kohale lukustatud.

HOIATUS: ärge võtke kepi korpusi lahti. Kepi sees on elastne nõör. Elastse nõõri kontrollimatu vabastamine varre sees võib põhjustada kaitsmata kehaosadele tõsiseid vigastusi, eriti silmadele. Kui elastiknõör läheb katki, hakkab narmendama või kahjustub muul moel, lõpetage toote kasutamine.

KEELATUD on venitada nõõri rohkem, kui osade lahtivõtmiseks või kokkupanekuks vaja.

KEPI PIKKUSE REGULEERIMINE Keerake lukustusnupp lahti, keerates seda mitu pööret päripäeva. Pikendamiseks vajutage lukustusnuppu ja tõmmake käepidet üles, lühendamiseks suruge käepidet alla. Pärast kepi soovitud pikkuse saavutamist ärge unustage lukustusnuppu uuesti kinni keerata.

HOIATUS. Kukkumise vältimiseks veenduge alati, et kõik varre segmendid on kindlalt oma kohale lukustatud ja lukustusnupp on täielikult rakendunud. Kukkumise vältimiseks veenduge alati, et kepi pöörlev jalg oleks kindlalt kepi külge kruvitud.

KEPI KOKKU PANEMINE Reisimisel saab kepi hõlpsalt kompaktselt kokku voltida, eraldades neli varreosa üksteisest. Hoidke varre osade liigendi lähedalt kinni ja tõmmake need lahti. Varre osad saab korralikult kokku voltida.

KEPI TULEDE KASUTAMINE Kepi käepideme ülaosal asuv nupp aktiveerib tuled. Üks kord nupule vajutades süttib kepi ees olev tuli, uuesti vajutades süttib ka käepideme alusel asuv punane tuli ja kolmandal vajutusel lülituvad need välja. Eesmist tuld saab pöörata, et suunata valgus sinna, kuhu vaja.



HÄDAABISIGNAAL SOS-signaali aktiveerimiseks vajutage käepideme küljel asuvat nuppu, alusel olev tuli vilgub ja kepp toob kuuldavale alarmi.

PATAREIDE VAHETUS Avage käepideme tagaküljel asuv patareipesa. Eemaldage tühjad patareid ja utiliseerige need nõuetekohaselt.

Kasutage kahte AAA patareid ja sisestage need õiget pidi pessa (positiivne poolus väljapoole, kus asub vedru). Sulgege patareipesa kate. Kontrollige regulaarselt kepi kulumisastet, sh elastiknõõri või kummist jalgade seisukorda. Kui märkate kulumisjalgi, lõpetage kohe kasutamine.

HOIATUS. Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. Ärge kasutage korraga leelis-, standardseid (süsinik-tsink) ja laetavaid (nikkel-

GIMA GARANTII TINGIMUSED Kehtib Gima 12-kuuline standardne B2B garantii.

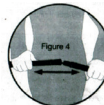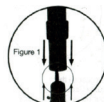

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Довезено от/Dovezeno od/Importat de/
af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/importēja/importavo/
Importert av/Geïmporteerde door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

