



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

# BATA ESTÁNDAR DESECHABLE SMMS

## ESPAÑOL

**Nombre del producto** Bata estándar desechable SMMS

**Código del producto** FGNS-SG-SM40-M, FGNS-SG-SM40-L, FGNS-SG-SM40-XL, FGNS-SG-SM40-XXL

**Tamaño del producto** Unidad: cm

Código GIMA	21040	21041	21042	21043
Código FULL GUARD	FGNS-SG-SM40-M	FGNS-SG-SM40-L	FGNS-SG-SM40-XL	FGNS-SG-SM40-XXL
Tamaños	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Longitud (Del hombro a la orilla)	120	120	130	140
Anchura (monocapa)	140	150	150	160
Longitud del cinturón	65	65	65	69
Longitud de la manga	58	59	59	61
Desviación	±2	±2	±2	±2

**Tipo de bata.** M/L/XL/XXL

**Estructura y composición** El producto utiliza tela no tejida SMMS de 40 g. Está integrada por una parte delantera, una trasera, las mangas, el lazo y los puños. El proceso tecnológico consiste en el corte, la soldadura por ultrasonidos, los lazos, el velcro, el puño, el plegado y el sellado.

**Uso previsto** El producto se utiliza principalmente para el aislamiento general en clínicas ambulatorias, pabellones, salas de inspección, salas de limpieza, laboratorios, etc. Está destinado a ser utilizado por los profesionales sanitarios en hospitales y clínicas a fin de mantener un buen nivel de higiene y contribuir al control de las infecciones.

**Contraindicaciones** El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está dañado, el producto está húmedo o enmohecido. No lo utilice.

**Cómo usar el producto** Abra el envase y saque el producto, agite suavemente la bata, levante los lados del cuello, introduzca las manos en las mangas, extienda los brazos hacia adelante y ate los cinturones.

**Almacenamiento** Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

### ⚠ Advertencia

- Este producto es un producto desechable, no lo reutilice.
- Este producto es de uso único, no lo comparta con otra persona.
- Está prohibido utilizarlo si el envase del producto aparece dañado.

**Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.**

**Validez** 3 años.

**Fecha de producción** Consulte la fecha en el paquete


**Fecha de caducidad** Consulte la fecha en el paquete


### CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA


Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

 REF	Código producto		Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
 LOT	Número de lote		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Fabricante		Fecha de fabricación		Producto sanitario
	No estéril		Fecha de caducidad		No usar si el paquete está dañado
	Límite de humedad		Consultar las instrucciones de uso		Dispositivo monouso, no reutilizable
	Límite de temperatura		Representante autorizado en la Comunidad Europea		Frágil, manipular con cuidado
	Este lado hacia arriba		Identificador de dispositivo único		

GIMA 21040  
GIMA 21041  
GIMA 21042  
GIMA 21043

 Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd  
Yongan East Road Wenquan Economic  
Development Zone, Xianning City, Hubei  
Province, China  
Made in China

 REF FGNS-SG-SM40-M  
FGNS-SG-SM40-L  
FGNS-SG-SM40-XL  
FGNS-SG-SM40-XXL

 EC REP Humiss Beratung  
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,  
Düsseldorf, Deutschland

Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

