



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BATA ESTÁNDAR DESECHABLE SMMS

ESPAÑOL

Nombre del producto Bata estándar desechable SMMS

Código del producto FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

Tamaño del producto Unidad: cm

Código GIMA	21046	21047	21048	21049
Código FULL GUARD	FGS-SG-SM50-M	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Tamaños	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Longitud (Del hombro a la orilla)	120	120	130	140
Anchura (monocapa)	140	150	150	160
Longitud del cinturón	65	65	65	69
Longitud de la manga	58	59	59	61
Desviación	±2	±2	±2	±2

Modelo de producto Tipo de bata M/L/XL/XXL

Estructura y composición El producto utiliza tela no tejida SMMS de 50g. Está integrada por una parte delantera, una trasera, las mangas, el lazo y los puños. El proceso tecnológico consiste en el corte, la soldadura por ultrasonidos, los lazos, el velcro, el puño, el plegado y el sellado.

Uso previsto Estos artículos se esterilizan mediante el método EO y se utilizan como barrera contra la penetración de líquidos y microbios entre el paciente y el quirófano, otros dispositivos quirúrgicos y el personal del quirófano.

Contraindicaciones El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está dañado, el producto está húmedo o emmohecido. No lo utilice.

Cómo usar el producto Abra el envase y saque el producto, agite suavemente la bata, levante los lados del cuello, introduzca las manos en las mangas, extienda los brazos hacia adelante y ate los cinturones.

Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

⚠ Advertencia

- Este producto es un producto desechable, no lo reutilice.
- Este producto es de uso único, no lo comparta con otra persona.
- Está prohibido utilizarlo si el envase del producto aparece dañado.

Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.

Validez 3 años.

Fecha de producción Consulte la fecha en el paquete

Fecha de caducidad Consulte la fecha en el paquete

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF	Código producto		Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
LOT	Número de lote		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Fabricante		Fecha de fabricación	MD	Producto sanitario
STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno		Fecha de caducidad		No usar si el paquete está dañado
	Límite de humedad		Consultar las instrucciones de uso		Dispositivo monouso, no reutilizable
	Límite de temperatura	EC REF	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Frágil, manipular con cuidado
	Este lado hacia arriba	UDI	Identificador de dispositivo único		

GIMA 21046
GIMA 21047
GIMA 21048
GIMA 21049

 Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
 Yongnan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
 Made in China

REF **FGS-SG-SM50-M**
FGS-SG-SM50-L
FGS-SG-SM50-XL
FGS-SG-SM50-XXL

EC REF **ZOUSTECH S.L.**
 Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
 28046 - Madrid, Spain

Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

