



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PAD ESERCITAZIONE SUTURA - SUTURE TRAINING PAD COUSSIN D'ENTRAÎNEMENT AUX SUTURES ALMOHADILLA DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA ALMOFADA PARA TREINO DE SUTURA

Material: Silicone

Material: Silicone

Matériau: Silicone

Material: Silicona

Material: Silicone

Size: 17,2x12x1,2cm

Dimensioni: 17,2x12x1,2 cm

Dimensions: 17,2x12x1,2 cm

Dimensiones: 17,2x12x1,2 cm

Dimensões: 17,2x12x1,2 cm

Weight: 240g

Peso: 240 g

Poids: 240 g

Peso: 240 g


Peso: 240 g




Técnicas de sutura

La almohadilla de entrenamiento de sutura contiene diferentes tipos de heridas. Se pueden practicar las siguientes técnicas de sutura:


- 1. Sutura discontinua simple:** simple y aplicada en la mayoría de los casos; cada punto está cerrado con un nudo individual; se utiliza en la piel, en el tejido subcutáneo, en los músculos, en la aponeurosis, especialmente para las heridas que presentan infecciones.

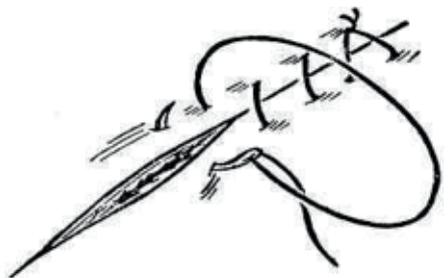


- 2. Sutura continua:** después del primer punto, el hilo no se corta, sino se utiliza para formar una serie continua de bucles sucesivos hasta el extremo opuesto de la herida, donde el hilo se corta con un nudo final espeso.

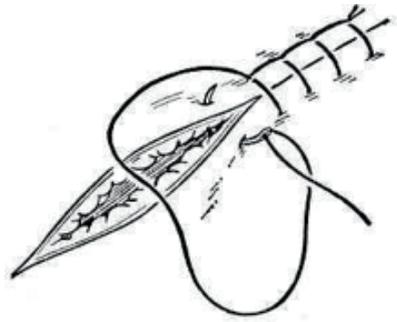

- 3. Sutura continua a puntos entrelazados:** este método, que permite de ahorrar tiempo y que ofrece un buen efecto hemostático, consiste en entrelazar el hilo al buelo precedente durante el proceso de sutura; se utiliza principalmente para cerrar el tracto gastrointestinal y para la sutura durante los trasplantes cutáneos.

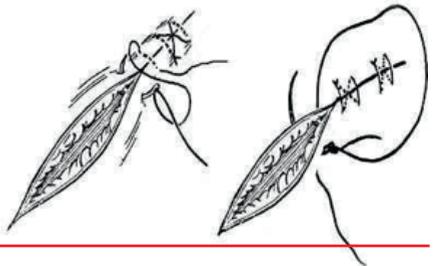

- 4. Sutura en ocho:** consiste en dos suturas intermitentes, seguras y rápidas, como las suturas de la fascia.

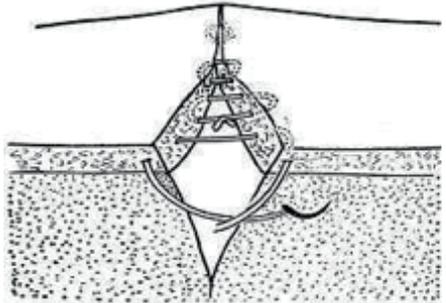

- 5. Sutura subcuticular:** la aguja se introduce desde un extremo de la incisión y entonces cruza alternadamente el borde interior de la incisión a ambos lados hasta el extremo opuesto de la incisión; por fin el hilo es cerrado con un nudo. Se utiliza comúnmente para suturar las incisiones cutáneas expuestas, por ejemplo en caso de tiroidectomía cervical.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliqué est la B2B standard Gima de 12 mois.

Fabbricante/Manufacturer/Fabrcant/Fabricante/Fabricante
Hangzhou Haizhu MIM products Co., Ltd.
No.868 shixin north Road, Hangzhou, 311215
Made in China

REF B3361

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

Importato da / Imported by / Importé de
Importado de / importado por:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com - Made in China



Gima 23020