

iHealth®

Wireless Body Analysis Scale

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| FR | Balance d'Analyse Corporelle Connectée | IT | Bilancia pesapersona con analisi corporea wireless |
| ES | Báscula inalámbrica de análisis corporal | DE | Drahtlose Körperanalysewaage |
| PT | Balança de Análise Corporal sem Fios | NL | Draadloze weegschaal voor lichaamsanalyse |
| GR | Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης | | |



OWNER'S MANUAL

- | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| FR | MANUEL DE L'UTILISATEUR | IT | MANUALE DI ISTRUZIONI |
| ES | MANUAL DE USUARIO | DE | BEDIENUNGSANLEITUNG |
| PT | MANUAL DO PROPRIETÁRIO | NL | GEBRUIKERSHANDLEIDING |
| GR | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ | | |

ÍNDICE DE CONTENIDO

USO ESPECÍFICO	1
NOTA IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS	1
CONTRAINDICACIONES	1
MEMORIA SIN CONEXIÓN	2
ESPECIFICACIONES	2
SEGURIDAD Y PRECAUCIONES GENERALES	3
EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	3

USO ESPECÍFICO

La báscula inalámbrica de análisis corporal iHealth es un instrumento electrónico de precisión de uso previsto para adultos. La báscula utiliza una metodología totalmente electrónica y sensores de presión que miden, de forma no invasiva, los niveles de los componentes corporales automáticamente. Las mediciones se muestran y se guardan en dispositivos iPod touch, iPhone o iPad con fecha y hora.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS

Las mujeres embarazadas deben consultar a su médico antes de utilizar la báscula. Ciertas condiciones físicas podrían afectar a los niveles de hidratación, lo que podría generar resultados imprecisos. Consulte a su médico para obtener más información. Guarde siempre la báscula inalámbrica de análisis corporal iHealth en un lugar seco. A fin de obtener resultados precisos, mantenga la báscula alejada de campos magnéticos ya que estos pueden afectar negativamente a los resultados o dañar la báscula.

CONTRAINDICACIONES

Nunca utilice este producto en combinación con dispositivos médicos electrónicos como:

- ⚠ (1) Implantes médicos electrónicos, como marcapasos.
- ⚠ (2) Sistemas electrónicos de apoyo vital, como corazón/pulmones artificiales.
- ⚠ (3) Dispositivos médicos electrónicos portátiles, como electrocardiógrafos.

Este producto puede provocar un funcionamiento inadecuado de estos dispositivos, lo que plantearía un riesgo considerable para la

salud de los usuarios de dichos dispositivos.



MEMORIA SIN CONEXIÓN

La báscula puede guardar hasta 200 resultados de peso para cada usuario. Cuando la memoria de cada usuario esté llena, las nuevas mediciones sobrescribirán las antiguas.

ESPECIFICACIONES

1. Nombre del producto: Báscula inalámbrica de análisis corporal iHealth
2. Modelo: HS6
3. Clasificación: alimentación interna, tipo BF en las partes aplicadas (cuatro electrodos)
4. Alimentación: 4 pilas de 1,5 V --- AAA
Duración de las pilas: aprox. 3 meses, con uso diario
5. Rango de medición:
Peso corporal: 11 lb - 400 lb / 5 kg - 180 kg
Grasa corporal: 5,0% - 65,0%
Temperatura: 5 $^{\circ}\text{C}$ - 40 $^{\circ}\text{C}$ (41 $^{\circ}\text{F}$ -104 $^{\circ}\text{F}$)
Humedad: 20 - 85 %RH
Resolución de la báscula: 0,2 lb / 0,1 kg
6. Precisión:
Peso corporal: $\pm 1,1$ lb / 0,5 kg (11-110 lb / 5 kg - 50 kg);
 $\pm 1\%$ (110-400 lb / 50 kg -180 kg)
Grasa corporal: $\pm 1\%$
7. Temperatura de funcionamiento: 41 $^{\circ}\text{F}$ - 104 $^{\circ}\text{F}$ (5 $^{\circ}\text{C}$ - 40 $^{\circ}\text{C}$)
8. Nivel de humedad de funcionamiento: 20 - 85 % RH
9. Temperatura de almacenamiento y transporte: -4 $^{\circ}\text{F}$ - 131 $^{\circ}\text{F}$ (-20

°C - 55 °C)

10. Humedad de almacenamiento y transporte: ≤90% RH

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES GENERALES

1. No utilice la báscula sobre un suelo irregular, una superficie blanda o una alfombra, ya que al hacerlo puede obtener datos poco fiables.
2. Esta báscula inalámbrica de análisis corporal está diseñada para adultos. Los bebés, niños u otras personas que no se puedan mantener de pie sin ayuda, no deben utilizarla.
3. Evite usar la báscula cerca de campos magnéticos potentes, como hornos microondas, etc.
4. La báscula mantendrá sus características de seguridad y rendimiento durante al menos 10.000 mediciones o dos años de uso.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

La báscula inalámbrica de análisis corporal iHealth está garantizada como libre de defectos en materiales y mano de obra que aparezcan en el plazo de 1 año a partir la fecha de compra, siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Las garantías anteriores se aplicarán exclusivamente al comprador inicial. Podremos reparar o sustituir, a nuestra elección, sin cargo adicional cualquier producto cubierto por las garantías anteriores. La reparación o sustitución constituyen nuestra única responsabilidad y la única solución para usted de acuerdo con las garantías anteriores.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Símbolo de "DEBE LEER EL MANUAL DE USUARIO"



Símbolo de "PRECAUCIÓN"



Símbolo de "PARTES APLICADAS DE TIPO BF"



Símbolo de "PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL – Los productos eléctricos desechados no deben eliminarse con los residuos domésticos, recíclelos si existen instalaciones para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para solicitar consejo acerca del reciclaje.



Símbolo de "FABRICANTE"



Símbolo de "MANTENER SECO"



Símbolo de "Año de fabricación"

Por la presente, [iHealth Lab Inc.] declara que su [HS6 CORE] cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad de la Directiva 1999/5/CE pueden descargarse en el siguiente enlace:

<http://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>



ANDON HEALTH CO., LTD.



No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District,
Tianjin 300190, China. Tel: 86-22-60526161

iHealth es una marca registrada de iHealth Lab Inc.

Otras marcas registradas y denominaciones comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.