

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Straight)

ES INSTRUCCIONES DE USO

CE
0086

Manufacturer:

Smiths Medical International Ltd.
St. Crispin Way, Haslingden,
Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Tel: +44 (0)1706 233800

Distributed by:

Smiths Medical ASD, Inc.
201 West Queen St,
Southington, CT 06489, USA.
Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:

Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.
61 Brand Street, Eight Mile Plains,
Brisbane, QLD 4113, Australia.
Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com

smiths medical

CCN.004/008/015 REV.001 06/12



Sterilized using ethylene oxide



ES Español

Aviso

No reutilizar

No reesterilizar

Número de catálogo

Código de lote

Fecha de fabricación

Fecha de caducidad

Fabricante

No contiene látex de caucho natural

Cantidad

Método de esterilización utilizando óxido de etileno

Los componentes de los conductos del fluido son apirógenos

Límite de temperatura

Este lado hacia arriba

Frágil, manipúlese con prudencia

No utilizar si el envase está dañado

Manténgase en lugar seco

Manténgase lejos de la luz solar

Español

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (recto)

INSTRUCCIONES DE USO

Estas instrucciones son válidas para el uso de los siguientes productos Jelco®:

7130 a 7138 y 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14G a 24G
7260 a 7269 y 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14G a 24G

Estas instrucciones contienen información importante para usar el producto de forma segura. Lea integralmente estas instrucciones de uso, incluidas las advertencias y precauciones, antes de utilizar este producto. Si no se siguen correctamente las advertencias, precauciones e instrucciones, se pueden provocar lesiones graves, o incluso la muerte, al paciente y/o al médico.

NOTA: DISTRIBUYA ESTE PROSPECTO EN TODOS LOS LUGARES EN LOS QUE SE ALMACENE EL PRODUCTO.

1. DESCRIPCIÓN

Cada Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consta de una aguja introductora y un protector integral de la punta. Las piezas principales son las siguientes: (1) bisel de la aguja, (2) aguja, (3) catéter, (4) conector del catéter, (5) protector de la punta, (6) cámara de reflujo («flash»), (7) tapón de reflujo («flash»), (8) vaina, (9) estuche del conector de la aguja.

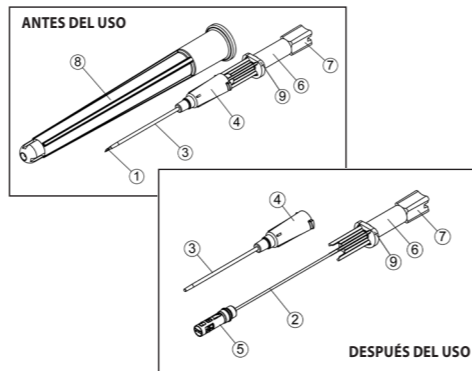


TABLA DE CALIBRES Y REFERENCIAS DEL CATÉTER

Calibre	14G	16G	18G	20G	22G	24G
Color	Naranja	Gris	Verde	Rosa	Azul	Amarillo

Este dispositivo es para un solo uso y se entrega estéril y apirógeno. Los materiales usados para fabricar este catéter intravenoso radiopaco no contienen látex, PVC ni DEHP.

ES

2. INDICACIONES

2.1 Un Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ colocado correctamente proporciona acceso a una vena o una arteria para extraer muestras de sangre, controlar la tensión arterial o administrar líquidos.

2.2 El protector de la punta, que bloquea de la aguja a medida que esta se retira, ayuda a reducir el riesgo de pinchazos accidentales con la aguja.

2.3 Estos catéteres pueden utilizarse en cualquier población de pacientes, teniendo en cuenta las dimensiones del paciente, la idoneidad de la solución perfundida y la duración del tratamiento.

2.4 Los catéteres de calibre 14 a 24 pueden utilizarse con inyectores de motor de hasta 300 psi (20,68 bar).

3. CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

4. AVISOS

4.1 Para un uso correcto, SE DEBE CAPACITAR A LOS MÉDICOS EN LA PRÁCTICA DE LA PUNCIÓN VENOSA y se deben seguir las instrucciones de uso. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden provocar la muerte o lesiones graves al paciente o al médico.

4.2 Para evitar la posibilidad de formación de un émbolo:

• **NO CORTE EL CATÉTER ni use instrumentos cortantes o punzantes cerca del mismo.**

• **No vuelva a introducir nunca la aguja introductora dentro del catéter, ya que puede cortarlo.**

4.3 Para evitar un pinchazo accidental:

• **NO DOBLE LA AGUJA al introducir, canalizar o extraer el conjunto del catéter.**

• **Si la punción venosa no es satisfactoria, encaje el mecanismo de seguridad y deseche la aguja y el catéter.**

• **En el caso improbable de que el dispositivo no se bloquee, deseche inmediatamente la unidad punzante en un recipiente adecuado para estos objetos.**

4.4 La aguja no debe utilizarse con una guía; su uso impedirá la activación del protector de seguridad de la punta.

4.5 No manipule el conjunto del protector de la punta antes ni después del uso del catéter.

5. ADVERTENCIAS

5.1 El producto es estéril, atóxico y apirógeno, a menos que el envase esté abierto, mojado o dañado, en cuyo caso se debe desechar el producto.

5.2 Antes del uso con inyectores de motor, debe comprobarse la permeabilidad. El uso con una presión superior a 300 psi (20,68 bar) del inyector de motor puede causar fugas del producto o dañarlo. No acode ni obstruya el catéter mientras usa un inyector de motor. Asegúrese de que el inyector esté correctamente calibrado y de que se detenga automáticamente a una presión superior a 300 psi (20,68 bar).

6. PRECAUCIONES

6.1 Este dispositivo está ideado para ayudar a reducir el riesgo de pinchazos accidentales. Además de estas instrucciones, se recomienda al profesional médico que siga las recomendaciones establecidas por el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos, o las normas locales equivalentes, acerca de los patógenos de transmisión sanguínea, al comenzar, mantener o desechar cualquier catéter intravenoso, a fin de evitar el riesgo de exposición a la sangre.

6.2 Siga las normas y los procedimientos actuales del centro para la introducción, el mantenimiento y la extracción de catéteres.

6.3 El catéter es más corto que la aguja introductora; por lo tanto, puede

producirse un flujo retrógrado de la sangre antes de que la punta del catéter esté completamente introducida en el vaso sanguíneo. Si es necesario, haga avanzar ligeramente el catéter y la aguja juntos, a fin de garantizar la entrada completa del catéter en la luz del vaso sanguíneo. Para evitar pinchazos accidentales de la pared posterior del vaso, baje la aguja hasta que quede paralela a la piel.

6.4 Asegúrese de que la conexión para administración de líquidos/del conector esté bien firme a fin de evitar fugas.

6.5 Asegúrese de que el catéter quede bien estabilizado en el paciente. Una estabilización incorrecta puede causar la pérdida del acceso vascular.

7. INSTRUCCIONES DE USO

A causa del riesgo de exposición a los patógenos de transmisión sanguínea, siga las precauciones habituales durante la colocación, el uso y la extracción de un catéter intravenoso.

7.1 Seleccione y prepare el lugar de colocación según las normas del centro. Aplique un torniquete.

7.2 Retire la vaina con un movimiento recto hacia fuera e inspeccione el dispositivo. Asegúrese de que el conector del catéter, con código de color, esté completamente encajado y compruebe que el bisel de la aguja esté en posición hacia arriba.

7.3 Sostenga el dispositivo por la cámara de reflujo (flash), con forma de tambor transparente. Compruebe que la sección plana del estuche del conector de la aguja y el bisel de la aguja estén orientados en posición hacia «arriba».

7.4 Fije el vaso sanguíneo aplicando una tracción suave en la piel e introduzca la aguja en la piel y el vaso sanguíneo, formando un ángulo adecuado.

7.5 El flujo retrógrado de sangre hacia la cámara de flash confirma la entrada en el vaso sanguíneo.

7.6 Disminuya el ángulo e introduzca ligeramente el dispositivo, a fin de garantizar la entrada del catéter en el vaso sanguíneo.

7.7 Retire el torniquete.

7.8 Antes de extraer la aguja, aplique presión digital sobre el vaso sanguíneo, en posición distal con respecto a la punta del catéter, y sujete firmemente el conector del catéter; extraiga la aguja, tirando de ella en sentido recto. El protector de la aguja se encajará automáticamente sobre la punta de la aguja.

Nota: Se producirá una ligera resistencia mientras se retira la aguja protegida del conector del catéter.

7.9 Nota: No vuelva a introducir el protector de la punta en el conector después de haberlo extraído.

7.10 Conecte la vía de administración intravenosa y coloque un apósito en la zona según las normas del centro.

7.11 Deseche inmediatamente la unidad en un recipiente para objetos punzantes y cortantes desechables, que sea resistente a las perforaciones y a prueba de fugas.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, la marca de diseño Jelco y la marca de diseño Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo © indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. y en ciertos otros países. Todos los demás nombres y marcas mencionados son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios. No existe conexión entre Smiths Medical e Intuitive Surgical. © 2012 Smiths Medical. Reservados todos los derechos.

ES

De un sólo uso.

No reutilizar: El material de los dispositivos médicos debe reunir características específicas para funcionar como es debido. Dichas características únicamente se han verificado para un solo uso. Cualquier intento de reprocesar el dispositivo para su ulterior reutilización puede afectar negativamente a la integridad del mismo o dar lugar a fallos en su funcionamiento.

Estéril a menos que el envase unitario esté abierto o dañado.

Destruir después de un sólo uso.

No volver a esterilizar.