



**ES ⚠ Atención!**  
**Instrucciones de seguridad para la conservación y manipulación de microcubetas de hemoglobina**

Las microcubetas de hemoglobina están diseñadas exclusivamente para la determinación de hemoglobina en sangre capilar y venosa, y para la utilización con los siguientes equipos: Hemo\_Control, Hemo\_Control Manager, Hemo\_Vet, Hemo\_Vet Manager. Deben ser usadas solamente por profesionales calificados.

Para más información, ver las instrucciones de manejo del equipo correspondiente.

Las cubetas deben conservarse exclusivamente en su envase original, de 15°C a 30°C. Los frascos con el cierre original se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad impresa. Tras abrir el frasco, y con una manipulación correcta, las cubetas se mantienen estables hasta 3 meses, en las condiciones mencionadas.

Saque cada vez sólo una cubeta del frasco. Cierre el frasco con cuidado inmediatamente tras extraer la cubeta (ver Fig. 1.). Asegúrese de que la tapa del frasco de cubetas esté siempre completamente cerrada en todo su entorno (ver Fig. 2.).

Si la tapa no está completamente cerrada (ver Fig. 3.) puede penetrar humedad en el frasco y estropear los reactivos de la cubeta. La utilización de estas cubetas puede llevar a la obtención de resultados erróneos. ¡No utilice nunca cubetas que procedan de un frasco que no estuviera convenientemente cerrado!