



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

***DISPOSITIVO ASPIRA VELENO***  
***POISON EXTRACTION TOOL***  
***POMPE À VENIN***  
***DISPOSITIVO PARA ASPIRACIÓN DE VENENO***

---

Unstinger™ es una bomba de vacío de funcionamiento manual de segunda generación, utilizable después de mordeduras y picaduras de insectos comunes (abejas, mosquitos, avispas).

### **CÓMO USAR Unstinger™**

Tan pronto como sea posible después de la mordedura, coloque el Unstinger™ sobre la zona afectada y aplique una ligera presión para asegurar una óptima adherencia a la piel. Utilice únicamente el adaptador rojo dependiendo del tipo de mordedura o la zona de interés.

Empiece a aspirar, tirando hacia atrás las aletas del pistón rojo y manteniendo un vacío constante: la sustancia inyectada en el cuerpo por la mordedura (veneno, saliva, etc.) pronto será extraída. Una vez que el pistón ha alcanzado su límite, la acción puede repetirse varias veces.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

- Unstinger™ no es un juguete y sus componentes pequeños pueden fácilmente ser ingeridos por los niños pequeños: por lo tanto, recomendamos no dejar su dispositivo Unstinger™ desatendido en ningún momento con niños pequeños alrededor.
- El uso de Unstinger™ no excluye la necesidad de consultar a su médico en caso de alergia o de sensibilidad particular a las picaduras de ciertos insectos/animales

### **CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

---

**REF** Unstinger™ (Gima 24395)

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in Denmark

---