



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

GONIOMETRO DA 360 GRADI 14" **14" 360 DEGREE GONIOMETER** **GONIOMÈTRE 360 DEGRÉS 14"** **GONIÓMETRO 360 GRADOS - 14"**

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso



Tipo di acciaio - Steel Type
Type d'acier - Tipo de acero:
AISI 430

Incrementi di 1°
1° increments
Incréments de 1 degré
Intervalos de 1°

Le misure si intendono indicative
The measures are intended as indicative
Les mesures sont destinées à être indicatives
Las medidas tienen carácter indicativo

GIMA 24903

Fabbricante, Manufacturer, Fabricante, Fabricante:
JIMCO INDUSTRIES
4-KM Aimen Abad Road Near Akbar Abad Chowk Bhadal,
Sialkot-51310-Punjab - Pakistan - info@jimcoind.com
Made in Pakistan

REF RE-230-10

Importato da / Imported by / Importé par/ Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ES - INSTRUCCIONES DE USO

Un goniómetro mide el rango de movimiento (ROM) de varias articulaciones. La cabeza de 360° está marcada en intervalos de 1°. La tensión entre los brazos se regula mediante una tuerca de regulación. El goniómetro muestra dos escalas opuestas, una de 180° y otra de 360°, todas marcadas en intervalos de 1°. Una robusta tuerca de ajuste regula la tensión de los brazos.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Estos dispositivos están diseñados para uso profesional por operadores cualificados con las habilidades necesarias. El uso del producto implica el contacto directo con la piel del paciente; siempre utilizar guantes de protección, no utilizar en la piel opaca y manejar con cuidado para evitar la abrasión accidental. Limpiar y esterilizar antes de cada uso; utilizar una solución desinfectante neutral no agresiva (PH7), no utilizar soluciones que contengan iones de cloruro o alto contenido de alcohol.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses

Simboli / Symbols / Symboles / Simbolos					
	<p>IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente</p>		<p>IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar</p>	LOT	<p>IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote</p>
	<p>IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso</p>		<p>IT Conservare in luogo fresco e asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco</p>	REF	<p>IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto</p>