



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Model: KD-702

TERMOMETRO DIGITALE RANA
FROG DIGITAL THERMOMETER
THERMOMÈTRE DIGITAL GRENOUILLE
TERMÓMETRO DIGITAL RANA

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso

 Advertencia:

- Lea las instrucciones detenidamente antes de usar el termómetro digital.
- Peligro de asfixia: El termómetro y la tapa de la batería pueden ser mortales si se ingieren. No permita que los niños usen este dispositivo sin la supervisión de los padres.
- No utilice el termómetro en el oído. Diseñado para lecturas y uso oral, rectal, y axilar.
- No coloque la batería del termómetro cerca de calor extremo, ya que puede explotar.
- Nota: El uso de la cubierta del sensor puede resultar en una diferencia de 0,1°C (0,2 °F) de temperatura real.
- Se recomienda controlar el rendimiento cada 2 años.
- Retire la batería del dispositivo cuando no haya estado en funcionamiento por un periodo prolongado.
- El rendimiento del termómetro puede degradarse si ocurre uno o más de los siguientes:
 - a) Funcionamiento fuera del rango de temperatura y humedad establecido;
 - b) Almacenamiento fuera del rango de temperatura y humedad indicado;
 - c) Descarga mecánica;
 - d) La temperatura del paciente es inferior a la temperatura ambiente.

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR


Este termómetro digital ofrece una lectura muy precisa y rápida de la temperatura corporal de una persona. Para comprender mejor sus funciones y para proporcionar años de resultados fiables, lea todas las instrucciones primero.

Este termómetro está fabricado según el sistema de EN12470-3: 2000 + A1: 2009, ASTM E1112-00. Este termómetro cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este termómetro no puede causar interferencia dañina, y (2) Este termómetro debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Y el fabricante tiene certificación ISO 13485: 2003 + AC: 2012.

CONTENIDOS

1Termómetro, 1 Manual del Usuario, 1 Caja de Almacenamiento.

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO

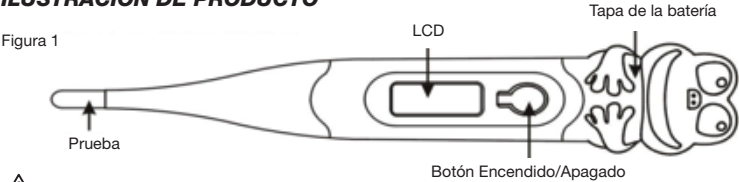

PRECAUCIÓN

- No doble ni deje caer el termómetro. No es a prueba de golpes.
- No hierva la sonda para desinfectar.
- No conserve en la luz del sol directa o en el área del calor extremo.
- No lo desmonte. Vea SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA para reemplazar la batería. No depositar en la basura. Gestione o recicle como residuo peligroso. La batería contiene mercurio.
- Evite la fuerte interferencia electromagnética, como hornos de microondas y teléfonos celulares

ESPECIFICACIONES

Rango:	32,0°C~42,9°C (90,0°F~109,9°F) (°C/°F elegido por el fabricante)
Precisión:	±0,1°C, 35,5°C~42,0°C (±0,2°F, 95,9°F~107,6°F) ±0,2°C debajo 35,5°C o por encima 42,0°C (±0,4°F debajo 95,9°F o por encima 107,6°F) a temperatura ambiente estándar de 18°C a 28°C (64,4°F a 82,4°F)
Pantalla:	Pantalla de cristal líquido, de 3 1/2 dígitos
Memoria:	Para almacenar el último valor medido
Duración de la batería:	Aprox. 200 horas.
Batería:	Una batería de botón 1.5 V DC. (tamaño LR41 o SR41, UCC 392)
Dimensión:	14,3cm x 2,8cm x 1,5cm (L x W x H)
Peso:	Aprox. 11 gramos incluyendo la batería
Entorno de uso:	Temperatura: 5°C~40°C (41°F~104°F) Humedad relativa ≤85%RH
Condiciones de almacenamiento y transporte:	Temperatura: -10°C~55°C (14°F~131°F) Humedad relativa: ≤95%RH
Nivel de resistencia al agua:	Resistente al agua
Tiempo de Medición:	a) 30±10 segundos (oral) - b) 45±20 segundos (debajo del brazo) c) 45±20 segundos (rectal)
Clasificación:	Tipo BF

INSTRUCCIONES

1. Wipe or dip thermometer probe with isopropyl rubbing alcohol to disinfect
2. Pulse el botón On/Off junto a la pantalla LCD. Limpie o sumerja la sonda del termómetro con alcohol isopropílico para desinfectar Después de mostrar la temperatura de autoprueba, el termómetro está ahora en el modo de prueba.
*Nota: Si la temperatura medida es inferior a 32°C o 90°F, la pantalla LCD mostrará Lo, si la temperatura medida es superior a 42,9°C o 109,9°F, la pantalla LCD mostrará Hi.
3. Colocar el termómetro en la ubicación deseada (en la boca, el recto o la axila).
 - a) **Uso Oral:** Coloque el termómetro bajo la lengua como se indica por la posición "u/" que se muestra en la figura 2. Cierre la boca y respire de manera uniforme a través de la nariz para evitar que la medición sea influida por inhalación/aire exhalado. Temperatura normal entre 35,7°C y 37,3°C (96,3°F y 99,1°F)
 - b) **Uso Rectal:** Lubricar la punta del sensor plateado con vaselina para facilitar la inserción. Inserte suavemente el sensor aproximadamente 1cm (menos de 1/2") en el recto. Temperatura normal entre 36,2°C y 37,7°C (97,2°F y 99,9°F)
 - c) **Uso en la axila:** Limpie y seque la axila. Coloque el sensor en la axila y mantenga el brazo presionado firmemente al lado. Desde un punto de vista médico, este método siempre proporcionará lecturas inexactas, y no debe usarse si las mediciones precisas son requeridas. Temperatura normal entre 35,2°C y 36,7°C (95,4°F y 98,1°F)
4. El signo de grado parpadea durante todo el proceso de pruebas. Cuando deja de parpadear sonará una alarma durante unos 10 segundos. La lectura medida aparecerá en la pantalla LCD de forma simultánea. La temperatura mostrada no cambiará cuando el termómetro sea extraído de su posición de prueba.



Figura 2

*Nota: Normalmente los zumbidos son "Bi-Bi-Bi- Bi-"; La alarma suena más rápido cuando la temperatura alcanza 37.8 ° C (100 ° F) o más, y los zumbidos son "Bi-Bi-Bi ----- Bi-Bi-Bi ----- Bi-Bi- Bi"

5. Para prolongar la vida útil de la batería, pulse el botón On/Off (Encendido/Apagado) para apagar la

máquina después de completar la prueba. Si no se realiza ninguna acción, la unidad se apagará automáticamente después de unos 10 minutos.

CAMBIO DE BATERÍAS

- 1. Reemplace la batería cuando  aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
- 2. Tire de la cubierta de la batería como se muestra en la figura 3.
- 3. Utilizar objetos puntiagudos, como un bolígrafo, para quitar la vieja batería. Deseche la batería legalmente. Sustituya por una batería nueva tipo botón de 1.5V DC tipo LR41 o SR41, UCC392 o equivalente.
- 4. Asegúrese de que la batería esté instalada con polaridad "+" hacia arriba. (Vea Figura 4, 5)
- 4. Deslice la batería nuevamente al lugar de la cámara y fije la cubierta.

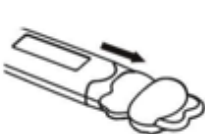


Figura 3



Figura 4



Figura 5

GARANTÍA LIMITADA

El termómetro está garantizada por un año a partir de la fecha de compra. Si el termómetro no funciona correctamente debido a componentes defectuosos o de mala fabricación, se reparará o reemplazará gratuitamente. Todos los componentes están cubiertos por esta garantía excluyendo la batería. La garantía no cubre los daños a su termómetro debido a una manipulación incorrecta. Para obtener servicio de garantía, se requiere un original o una copia del recibo de venta del vendedor original.



La eliminación de este producto y las baterías usadas debe llevarse a cabo de conformidad con las normativas nacionales para la eliminación de productos electrónicos.

Simboli - Symbols - Symboles - Símbolos			
	Corrente diretta Direct Current Courant continu Corriente Directa		Leggere attentamente le istruzioni per l'uso Please read instructions carefully Lire attentivement la notice Leer atentamente las instrucciones de uso
	Tipo BF parte applicata Type BF Applied Part Parties appliquées de type BF Pieza aplicada Tipo BF		Non smaltire con i rifiuti domestici Products should not be disposed of with household waste Ne pas jeter avec les ordures ménagères No eliminar con los residuos domésticos
	Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso Read instructions carefully Lire et suivre attentivement la notice Leer y seguir atentamente las instrucciones de uso		Codice prodotto Product code Code produit Código producto
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea Product complies with European Directive Ce produit est conforme à la directive européenne Producto conforme a la Directiva Europea		Fabbricante Manufacturer Fabricant Fabricante
	Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight À conserver à l'abri de la lumière du soleil Conservar al amparo de la luz solar		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea Authorized representative in the European community Représentant autorisé dans la Communauté européenne Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place À conserver dans un endroit frais et sec Conservar en un lugar fresco y seco		Data di fabbricazione Date of manufacture Date de fabrication Fecha de fabricación

**25544 / KD-702**

 Kelly Union Electronics Co. Ltd
NO.114 Five Star Village, Jiangkou Town Hanjiang District
351115 Putian, Fujian - Made in China (P.R.C.)

 Landlink GmbH
Dorfstrasse 2/4, Emmendingen, 79312, Germany

**0123**

