

**TERMOMETRO DIGITALE BL3 - AMPIO SCHERMO**  
**BL3 DIGITAL THERMOMETER - WIDE SCREEN**  
**DIGITAL THERMOMETRE BL3 - ÉCRAN LARGE**  
**TERMÒMETRO DIGITAL BL3 - PANTALLA ANCHA**  
**TERMÒMETRO DIGITAL BL3 - ECRÁ AMPLO**  
**ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ BL3 - ΕΥΡΕΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ**

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso  
Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης

**ESPECIFICACIONES**

<b>Rango:</b>	32,0–43,9 (89,6–111,1°F) Abajo 32,0°C (89,6°F) muestra L°C (°F) Arriba 43,9°C (111,1°F) muestra H°C (°F)
<b>Resolución:</b>	0,1°C (°F)
<b>Precisión:</b>	±0,1°C (34,0°C a 42°C); ±0,2°C (otro rango) ±0,2°F (93,2°F a 107,6°F); ±0,4°F (otro rango)
<b>Pantalla:</b>	Pantalla de cristal líquido 3½ dígitos
<b>Batería: (Incluida)</b>	CR2032 (3V)
<b>Consumo de Energía:</b>	0,40 miliwatts en estado de medición
<b>Duración de la Batería:</b>	Más de 160 horas de funcionamiento ininterumpido
<b>Dimensiones:</b>	Aprox. 117mmx30mmx16mm
<b>Peso:</b>	Aprox. 20 gramos, incluyendo batería
<b>Pitido:</b>	Aprox. 5 segundos señal acústica cuando se alcanza la temperatura máxima

**Memoria:** La memoria interna activa la pantalla en el valor medido previamente  
**Condiciones de trabajo:** Temperatura: 10-40°C (50-104°F)  
 Humedad Relativa: 15-95% sin condensación  
**Condiciones de almacenamiento:** Temperatura: -25-55°C (-13-131°F)  
 Humedad Relativa: 15-95% sin condensación  
**Garantía de Calidad:** Certificación ISO 13485  
 Cumple con ASTM-E1112, EN12470-3, EN60801-1  
**Clasificación del Producto:** Equipo tipo BF 

**MODO DE USO**

- Desinfecte la sonda con alcohol étílico (rotando) antes de su uso.
- Pulse la tecla ON/OFF. La pantalla leera  o  → Última memoria  o 
- Suelte el botón de encendido y la pantalla mostrará  o   
 L°C (L°F) con °C (°F) parpadeando.
- Coloque la sonda en la posición adecuada (oral, axilar o rectal).
- Cuando el signo de grados °C (°F) en la pantalla deje de parpadear, se indica la temperatura correcta. La lectura de la temperatura no cambiará hasta que °C (°F) deje de parpadear.
- La unidad se apagará automáticamente en 1 minuto de cualquier manera, para prolongar la vida de la batería.  
 Lo mejor es apagar el termómetro pulsando el botón ON/OFF una vez que la temperatura haya sido vista.

**Características especiales:**

**Alarma de Temperatura Normal:** Una alarma sonará cuando se registre la temperatura máxima y esté lista para su lectura. La alarma de "Temperatura Normal" (cuatro bips rápidos seguidos de una pausa) sonará repetidamente durante 10 segundos.

**Recuperación de la Última Temperatura Memorizada:** Encienda el termómetro, un corto bip sonará. Al mismo tiempo, el termómetro ejecuta una verificación durante la cual todos los segmentos digitales aparecen en la LCD. Después de eso, el valor de la última lectura aparecerá automáticamente, el 37,0°C (98,6°F) en la LCD durante 2 segundos. La lectura se sobrescribirá solo cuando se registrará el valor de una nueva temperatura.

**Para Modelos con Alarma de Fiebre:** Si la temperatura registra más de 38,0°C (100,4°F), la temperatura de fiebre (un rápido bip continuo durante 10 segundos) sonará cuando se registre la temperatura máxima. Además, el resultado se mantendrá en la pantalla LCD hasta que el termómetro se apague.

**Para Modelos con Grados Centígrados y Fahrenheit Intercambiables.** Mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que aparezcan °C o °F. Después de eso, se puede cambiar a °C o °F. Al soltar el botón, el termómetro estará en modo "listo para medición".

**NOTA:** Desinfecte siempre el termómetro antes de usarlo.

**NOTA:** Si la temperatura ambiente es menor de 32,0°C (89,6°F), eso se visualizará en vez de L°C (L°F).

**NOTA:** Puede poner un protector plástico en la punta del sensor para prevenir contagio de infecciones y contaminaciones. El uso del protector plástico puede hacer cambiar la temperatura real de 0,1°C (0,2°F). Tire los protectores plásticos a la basura y guarde la unidad en un lugar seguro.

**REEMPLAZO DE BATERÍAS**

- Cuando el símbolo  aparece, la batería necesita ser reemplazada.



**Eliminación:** El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

<b>REF</b>	IT Codice prodotto <b>GB</b> Product code FR Code produit <b>ES</b> Código producto PT Código produto <b>GR</b> Κωδικός προϊόντος	<b>!</b> IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) <b>ES</b> Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente <b>PT</b> Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente <b>GR</b> Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (επισημειώσεις)
<b>LOT</b>	IT Numero di lotto <b>GB</b> Lot number FR Numéro de lot <b>ES</b> Número de lote PT Número de lote <b>GR</b> Αριθμός παρτίδας	<b>!</b> IT Seguire le istruzioni per l'uso <b>GB</b> Follow instructions for use <b>FR</b> Suivez les instructions d'utilisation <b>ES</b> Siga las instrucciones de uso <b>PT</b> Siga as instruções de uso <b>GR</b> Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
	IT Fabricante <b>GB</b> Manufacturer FR Fabricant <b>ES</b> Fabricante PT Fabricante <b>GR</b> Παραγωγός	<b>!</b> IT Parte applicata di tipo BF <b>GB</b> Type BF applied part <b>FR</b> Appareil de type BF <b>ES</b> Aparato de tipo BF <b>PT</b> Aparelho de tipo BF <b>GR</b> Συσκευή τύπου BF
	IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea <b>GB</b> Authorized representative in the European community <b>FR</b> Représentant autorisé dans la Communauté européenne <b>ES</b> Representante autorizado en la Comunidad Europea <b>PT</b> Representante autorizado na União Europeia <b>GR</b> Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση	<b>!</b> IT Smaltimento RAEE <b>GB</b> WEEE disposal <b>FR</b> Disposition DEEE <b>ES</b> Disposición WEEE <b>PT</b> Disposição REEE <b>GR</b> Διάθεση WEEE
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> Keep in a cool, dry place <b>FR</b> A conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco <b>PT</b> Armazenar em local fresco e seco <b>GR</b> Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον	<b>!</b> IT Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE <b>FR</b> Dispositif médical conforme à la directive 93/42/CEE <b>ES</b> Dispositivo médico según la Directiva 93/42/CEE <b>PT</b> Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE <b>GR</b> Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42/CEE
	IT Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> A conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar <b>PT</b> Guardar ao abrigo da luz solar <b>GR</b> Κρατείται το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία	<b>CE</b>
	IT Data di fabbricazione <b>GB</b> Date of manufacture <b>FR</b> Date de fabrication <b>ES</b> Fecha de fabricación <b>PT</b> Data de fabrico <b>GR</b> Ημερομηνία παραγωγής	