



# GIMA

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) – [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## TERMÔMETRO VETERINÁRIO DIGITAL

### Instrucciones de funcionamiento:

#### Instrucciones:

1. Encender el termómetro pulsando el botón.
2. El termómetro emite un pitido, después de que el sonido se detiene, significa que la unidad está ahora lista para usar.
3. Inserte suavemente la punta del termómetro en el recto o en el alimento.
4. En 6 segundos el termómetro emitirá un pitido y la pantalla mostrará la lectura de la temperatura.
5. Se apagará automáticamente después de 15 segundos sin realizar ninguna operación.

### Especificaciones técnicas:

- Temperatura instantánea en 6 segundos
- Sonido de zumbido indicador
- Pantalla LCD y memoria
- Mostrar la temperatura en grados centígrados o Fahrenheit.
- Fácil operación:
- Confiable y seguro
- Se apagará automáticamente después de 15 segundos.
- Apto para medir en diferentes tipos de animales, como perros, gatos, ganado porcino y vacuno y otros.

### Rango de medición:

(32,00~44,00)°C, (89,6~111,2)°F

### Precisión

+/- 0,1°C entre 35°C a 39°C

+/- 0,2°F entre 95°F a 102,20°F

+/- 0,2°C por debajo de 35,00°C a más de 39,00°C

+/- 0,4°F por debajo de 95,00°F a más de 102,20°F

Tipo de batería: 2x1,5V (AAA) CC

Duración de la batería: Aprox. 5000 lecturas de medición Dimensiones: 190x110x35mm

REF

25588 / KDV-03



Kellyunion Electronics Co., Ltd  
No. 114, Five Star Village, Jiangkou Town  
Hanjiang District 351115 Putian, Fujian  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Made in China

EC

REP

Landlink GmbH

Dorfstrasse 2/4, Emmendingen,  
79312 Germany

