
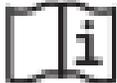
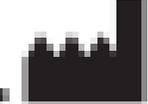
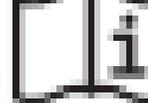
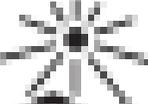


ES Instrucciones de uso ( **i**): Indicador de temperatura corporal con cristales líquidos microencapsulados ( **MD**). En el primer uso, retirar la película transparente de la parte frontal del indicador. Colocar el indicador en la frente seca durante 15 segundos, sosteniéndolo por los extremos. La letra N indica ausencia de fiebre. Si aparece un número, la temperatura corresponde al valor visible. Si se ven varios números, la temperatura es un valor intermedio. En caso de fiebre, consulte a un médico. Realizar la prueba a temperatura ambiente, con un brillo adecuado, bajo la supervisión de un adulto para los niños menores de 13 años. Limpiar el indicador frotándolo suavemente con agua jabonosa durante al menos 30 segundos o con desinfectantes de piel sin alcohol, sin remojarlo. Uso externo en piel sana. No exponer al sol (). Mantener lejos de fuentes de calor, alcohol y disolventes. (Edición del 17 de junio de 2020).

Explication des symboles :

 **CE** Marquage CE et identification de l'organisme notifié.  Identifie le nom du fabricant (peut être suivi de la date de fabrication).  Identifie la date de fabrication.  Identifiez le nom du distributeur. **LOT** Numéro de lot du produit. **REF** Modèle d'appareil.  Consultez la notice d'utilisation.  Ne pas exposer au soleil ou aux sources UV. **MD** Dispositif médical.  Ne pas jeter dans l'environnement. Éliminer consciemment.  Matériau poly laminé. Collection indifférenciée. **°C** Degrés centigrades. **S1** Symbole de support.

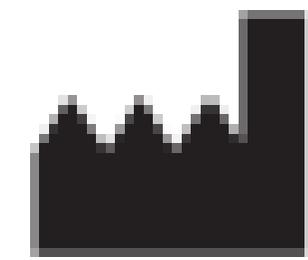

Made by: I.P.S. S.r.l. - Via Civesio, 6 - 20097 San Donato Mil.se (Mi) - Italy +39 025279641

www.ips-srl.it