



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCHERMO FACCIALE ANTI-NEBBIA MONOUSO - ANTI-FOG DISPOSABLE FACE SHIELD - ÉCRAN FACIAL ANTI-BUÉE JETABLE - PANTALLA FACIAL DESECHABLE ANTINEBLA - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL ANTI-FOG - ANTI-BESCHLAG-EINWEG-GESICHTSSCHILD - ΑΝΤΙΟΜΙΧΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - JEDNORAZOWA OSŁONA TWARZY ANTYFOGOWA - ECRAN FACIAL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ANTI-ABURIRE - JEDNORÁZOVÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT PROTI ZAMLŽOVÁNÍ - ANSIKTSVISIR MED ANTI-ÍMBILDNINGSFUNKTION FR ENGÅNGSBRUK - KERTÄKÄYTTÖINEN HUURTEENESTOKA-SVOSUOJA - JEDNORAZOVÝ TVÁROVÝ ŠTÍT ODOLNÝ VOČI ZAHMLIEVANIU - ANTICONDENS GELAATSSCHERM VOOR EENMALIG GEBRUIK - JEDNOKRATNI VIZIR PROTIV MAGLJENJA - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARC VÉDŐ - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARC VÉDŐ - DUGFRI ANSIGTSSKÆRM TIL ENGANGSBRUG - ЛИЦЕВ ЦИТ ПРОТИВ ЗАМЪГЛЯВАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - NERASOJANTIS VIENKARTINIS APSAUGINIS VEIDO SKYDELIS - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS PRETAIZSVĪŠANAS SEJAS AIZSARGS - UDUVASTANE ŪHEKORDNE NĀOKAITSE - TÅKEHEMMENDE ANSIKTSKJERM TIL ENGANGSBRUK - دح او ةرم لام عتس الل بابض لل داض م هج و عرد

ESPAÑOL Descripción: La pantalla facial anti-niebla está compuesta por un trozo de película de PET con un trozo de película de protección, un soporte de espuma y una banda elástica.

Indicaciones de uso: La pantalla facial anti-niebla se utiliza para ayudar a proteger toda la cara contra la posible contaminación de patógenos sanguíneos, fluidos corporales o salpicaduras de productos químicos nocivos durante la inspección o el tratamiento.

Contraindicaciones: Ninguna.

Efectos secundarios del producto: Este producto no tiene efectos secundarios.

Advertencia:

1. Si se expone en un entorno muy húmedo, puede perder la eficacia del efecto anti-niebla.
2. Suspensión del uso en caso de daños o de holgura durante el uso.
3. Durante el uso, por favor, trate de no tocar el centro de la lente.
4. Los materiales que pueden entrar en contacto con la piel del usuario podrían provocar reacciones alérgicas en personas sensibles.

Operación:

Paso 1: Retirar la película protectora interior.

Paso 2: Halar la banda elástica y colocarla en la cabeza.

Almacenamiento: Almacene el producto en un lugar seco a 0- 30°C.

Mantener alejado de la luz solar. Explicaciones de los símbolos:

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

