



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PORTAPILLOLE WIRELESS

WIRELESS PILL DISPENSER

DISTRIBUTEUR DE PILULES SANS FIL

DISPENSADOR DE PÍLDORAS INALÁMBRICO

DISTRIBUIDOR DE COMPRIMIDOS SEM FIOS

GIMA 25871

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante:
Xiamen Zoomcare Technology Co., Ltd
Room 707, Jinfeng Building, No. 1, Linhou West Rd, Huli Dist,
Xiamen, China, Made In China
rita@zoomcaretech.com

REF M111

Importato da/ Imported By / Importé par / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Guía de Inicio Rápido Dispensador Automático de Píldoras M111



■ Introducción


Gracias por adquirir nuestro Dispensador Automático de Píldoras M111. Esta Guía de Inicio Rápido le ofrece un breve recorrido por las características y protocolos de uso de su nuevo dispositivo. Para más información o soporte técnico, puede contactar con nuestro equipo de servicio.

■ Uso previsto

Tanto si lo utiliza para llevar un control de su propia medicación, como para asistir o informar a un familiar, este Dispensador de Píldoras promueve una mejor salud al alertar a los usuarios y dispensar sus medicamentos en los momentos adecuados del día y de la semana. Organizar la medicación correctamente y asignar los horarios de las dosis es su responsabilidad, la de su cuidador y/o la de su proveedor de atención médica.


■ Piezas & Controles

1. Cubierta Superior
2. Manija de la Cubierta
3. Puerta Dispensadora
4. Ventana de Dosificación
5. Indicador Luminoso
6. Anillo de Dosificación
7. Pantalla LCD
8. Botón A
9. Botón B
10. Botón C
11. Bandeja Extraíble
12. Bloqueo de la Cubierta
13. Puerta de la Batería
14. Pestillo de la Puerta de la Batería
15. Speaker

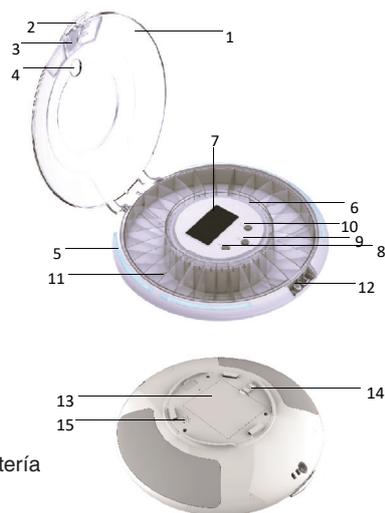

■ Colocación de las Baterías

1. Deslice el Pestillo de la Puerta de la Batería y retire la Puerta de la Batería.
2. Inserte 4 baterías AA con la polaridad correcta y vuelva a colocar la puerta. La pantalla LCD se encenderá

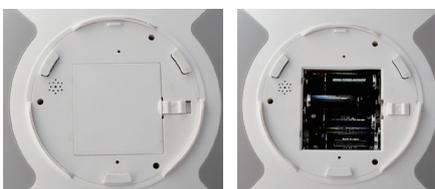

Abrir o Bloquear la Cubierta Superior

1. Si está bloqueada, localice el Bloqueo de la Cubierta en la parte inferior de la unidad e inserte la llave incluida, luego gire en el sentido de las agujas del reloj para desbloquearla.



2. Coloque el Dispensador de Píldoras sobre la mesa, presione la Manija de la Cubierta para liberar el pestillo, luego levántela para abrir la Cubierta Superior.




3. Para bloquear la Cubierta Superior, por favor cierre la Cubierta Superior primero, presione la Manija de la Cubierta para que se asegure, luego gire en sentido contrario a las manecillas del reloj para bloquear con la inserción de la llave desde el lado inferior.



■ Colocar el Anillo de Dosificación

1. Los anillos de dosificación se suministran con el Dispensador de Píldoras para 1-9 dosis al día
2. Coloque el Anillo de Dosificación(9) correcto en el centro de la bandeja, y doble la lengüeta hacia abajo para asegurarlo en su lugar.

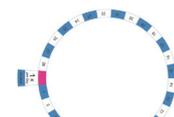


3. Coloque las píldoras en las dosis correctas en cada compartimento.



*No coloque las píldoras en los compartimentos correspondientes a las marcas rojas del Anillo de Dosificación(9).

■ Descarga de la APP


Escanee el código QR en la parte posterior del dispositivo con su teléfono inteligente (iOS o Android) para descargar la APP.

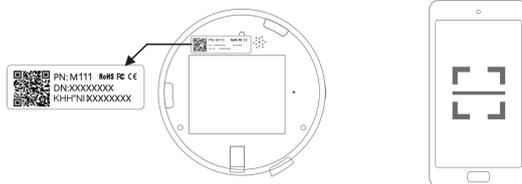

■ Registrar y Fijar


Encienda el Bluetooth y el GPS en el teléfono inteligente, aparecerá una interfaz de escaneo al hacer clic en "+", por favor, escanee el código QR en la parte posterior del dispositivo para configurar la vinculación con las Aplicaciones.

Una vez conectado, el dispositivo emitirá una notificación de audio. La hora de las aplicaciones se sincronizará con el dispositivo.

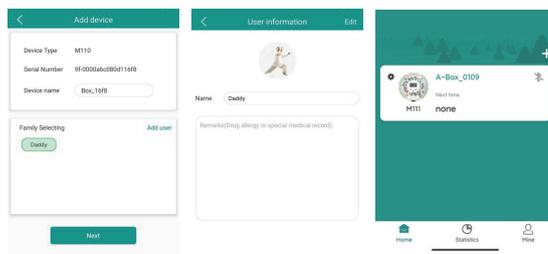


■ Configurar el Plan de Medicación

Haga clic en "Alarma" para configurar los "Ajustes de la Alarma" a fin de establecer las mismas, y luego haga clic en "Guardar" para cada alarma. De 1 a 9 alarmas de medicación por día, configurando la hora según sus propias necesidades. Observaciones: Es posible que algunos usuarios requieran tomar los medicamentos antes de la hora de la alarma, por favor, haga clic en "Dosis Temprana"

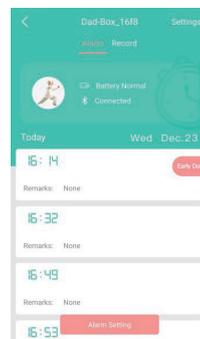

■ Configuración de la Alarma

Cada alarma puede tomar una foto y agregar notas para cada espacio de medicación

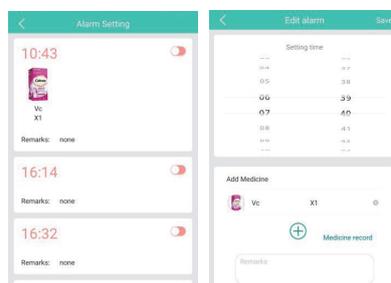

■ Registro de Comprobación

Haga clic en "Registro" para comprobar el Registro Diario y Mensual

■ Gestión del Dispositivo

Pulse "Configuración" para "Gestión del Dispositivo", que incluye la Configuración del Parámetro & Ayuda & Asistencia para la Conexión Bluetooth y la Autorización & Desvinculación.

■ Ajuste del Parámetro

1. Formato de Hora

Pulse "Ajustes" para "Gestión del Dispositivo" y luego toque en "Configuración del Parámetro" para ajustar la opción "Formato de la hora," 12HR o 24 HR.

2. Volumen

Pulse "Ajustes" para "Gestión del Dispositivo" y después pulse "Control de volumen," opción Silencio, volumen bajo y volumen alto.

3. Hora del Timbre

Pulse "Ajustes" en "Gestión del Dispositivo" y después pulse "Tiempo de timbre," el tiempo de timbre puede seleccionarse entre 1 y 60 minutos, según desee el usuario.

4. Configuración Predeterminada

Si el usuario necesita volver a la configuración predeterminada, pulse "Reajustar" para restaurar los valores de fábrica.

5. Configuración de Reinicio

Si el usuario necesita reiniciar la configuración del dispositivo, pulse "Reiniciar Dispositivo"

6. Desvincular el dispositivo

En la página de Gestión del Dispositivo, haga clic en "Desvincular" para desvincular.

■ Tomar la Medicación

Tanto el Dispensador de Píldoras como el teléfono inteligente emitirán una alarma cuando sea el momento de tomar la medicación.

Deslice para abrir la Puerta del Dispensador(3) e incline hacia arriba el Dispensador de Píldoras para verter los medicamentos en la palma de la mano o en un recipiente adecuado, la alarma y el Indicador Luminoso(5) se apagarán automáticamente.



■ Alerta de Batería Baja

Un símbolo de batería baja  en la pantalla indica que las baterías están bajas y deben ser reemplazadas para asegurar su correcto funcionamiento.

Para ahorrar energía, el Dispensador de Píldoras permanecerá en espera y la pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación en varios minutos. Para reactivarlo, basta con tocar o mover ligeramente el Dispensador de Píldoras.



■ Ajuste con los Botones Mecánicos

(Opcional, sería innecesario si se ha configurado con el teléfono inteligente)

Abra primero la Cubierta Superior como se indica en "Abrir o Bloquear la Cubierta Superior" en este documento

Ajuste del reloj mediante los botones mecánicos

- Mantenga pulsado el botón A durante aproximadamente 3 segundos hasta que el símbolo "—" deje de parpadear.
- Pulse el botón B para ajustar los dígitos de la hora. Pulse el botón C para ajustar los dígitos de los minutos.
* Si mantiene pulsados los botones B o C, los dígitos se acelerarán.

3. Confirme los ajustes del reloj pulsando el botón A.

Ajuste y Comprobación de las Horas de Alarma

- Pulse el botón A una vez, se mostrará un símbolo de "reloj de alarma" y el número "1"
- Pulse el Botón B para ajustar los dígitos de las horas. Pulse el Botón C para ajustar los dígitos de los minutos.
*Al mantener pulsados los botones B o C, los dígitos se acelerarán.

3) Para cancelar una alarma previamente ajustada, continúe pulsando el Botón B hasta que "-- : --" aparezca en la pantalla.

Esto ocurre después de las 23:XX o las 11:XXpm. O mantenga pulsado el Botón A hasta que "-- : --" aparezca en la pantalla.

4) Después de ajustar la hora de alarma deseada, confirme pulsando el Botón A. Entonces se mostrará el siguiente número de alarma "2"



5) Repita los pasos 2) al 4) anteriores para ajustar las alarmas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

6) Después de confirmar la alarma 9, la pantalla volverá al modo reloj

Ajuste del formato de la hora mediante los botones mecánicos

- En el modo reloj, pulse el Botón C una vez para entrar en el ajuste del formato de la hora, luego pulse el Botón C para cambiar entre el formato de la hora de 12 horas y el de 24 horas.
- Confirme el formato de hora seleccionado pulsando el botón A o simplemente espere unos 15 segundos

Ajuste del control de volumen mediante los botones mecánicos

- En el modo de reloj, pulse el botón C una vez para entrar
- en el ajuste del control de volumen, luego pulse el Botón B para cambiar entre 0, 1 y 2. "0" significa silencio, "1" significa volumen bajo, "2" significa volumen alto.
- Confirme el control de volumen seleccionado pulsando el Botón A o simplemente espere unos 15 segundos

■ Declaración de Conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- No es posible que este dispositivo ocasione interferencias perjudiciales
- El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que puede ocasionar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de la FCC:

15.21 Información para el usuario.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.

15.105 Información para el usuario.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente a la que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

*Advertencia de RF para el dispositivo portátil:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir el requisito general de exposición a RF.

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

■ Precaución

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

■ Eliminación Correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

■ Radiofrecuencia:

BBandas de frecuencia: 2402 MHz a 2480 MHz Máx.
Potencia de transmisión: 8dBm

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos





Certificado de conformidad

Número certificado: DL-20230712013C

Solicitante: Xiamen Zoomcare Technology Co., Ltd
Room 707, Jinfeng Building, No. 1, Linhou West Rd, Huli Dist, Xiamen

Fabricante: Xiamen Zoomcare Technology Co., Ltd
Room 707, Jinfeng Building, No. 1, Linhou West Rd, Huli Dist, Xiamen

Producto: Dispensador Automático de Píldoras

M/N: M112
M111, M115, M128, M128A, M126, M126A, M156, M156A, M105,
M100Q, M101Q

Requisitos esenciales	Estado de salud	Normas aplicadas	Número informe
Art.3.1(a)	Estado de salud	EN 62479:2010, EN 50663:2017	DL-20230712013-1E
Art.3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)	DL-20230712013-2E
Art.3.2	Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	DL-20230712013-3E
Art.3.1(a)	Seguridad	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	DL-20230712013-4S

El EUT descrito anteriormente ha sido probado por nosotros con las normas enumeradas y cumple con la Directiva de Equipos de Radio del Consejo (RED) 2014/53/UE. Es posible utilizar el marcado CE para demostrar el cumplimiento de esta Directiva RE. Solo es válido en relación con el número de informe de ensayo indicado.

CE



Director
12 de julio de 2023

Este certificado de conformidad se basa en una única evaluación de la(s) muestra(s) presentada(s) del producto arriba mencionado. No implica una evaluación de la totalidad del producto y aspectos pertinentes. Sin la aprobación por escrito. No está permitido utilizar el logotipo del laboratorio de pruebas.



Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd.
101-201, Building C, Shuanghuan, No.8, Baoqing Road, BaoLong Industrial Zone, BaoLong Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Web: www.dl-cerc.com E-mail: Service@dl-cert.com Tel: 400-688-3552