



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE PEGASO
PEGASO DIGITAL SCALE
BALANCE NUMÉRIQUE PEGASO
BÁSCULA DIGITAL PEGASO
BALANÇA DIGITAL PEGASO

REF

27288



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com


www.gimaitaly.com

Made in China



0476



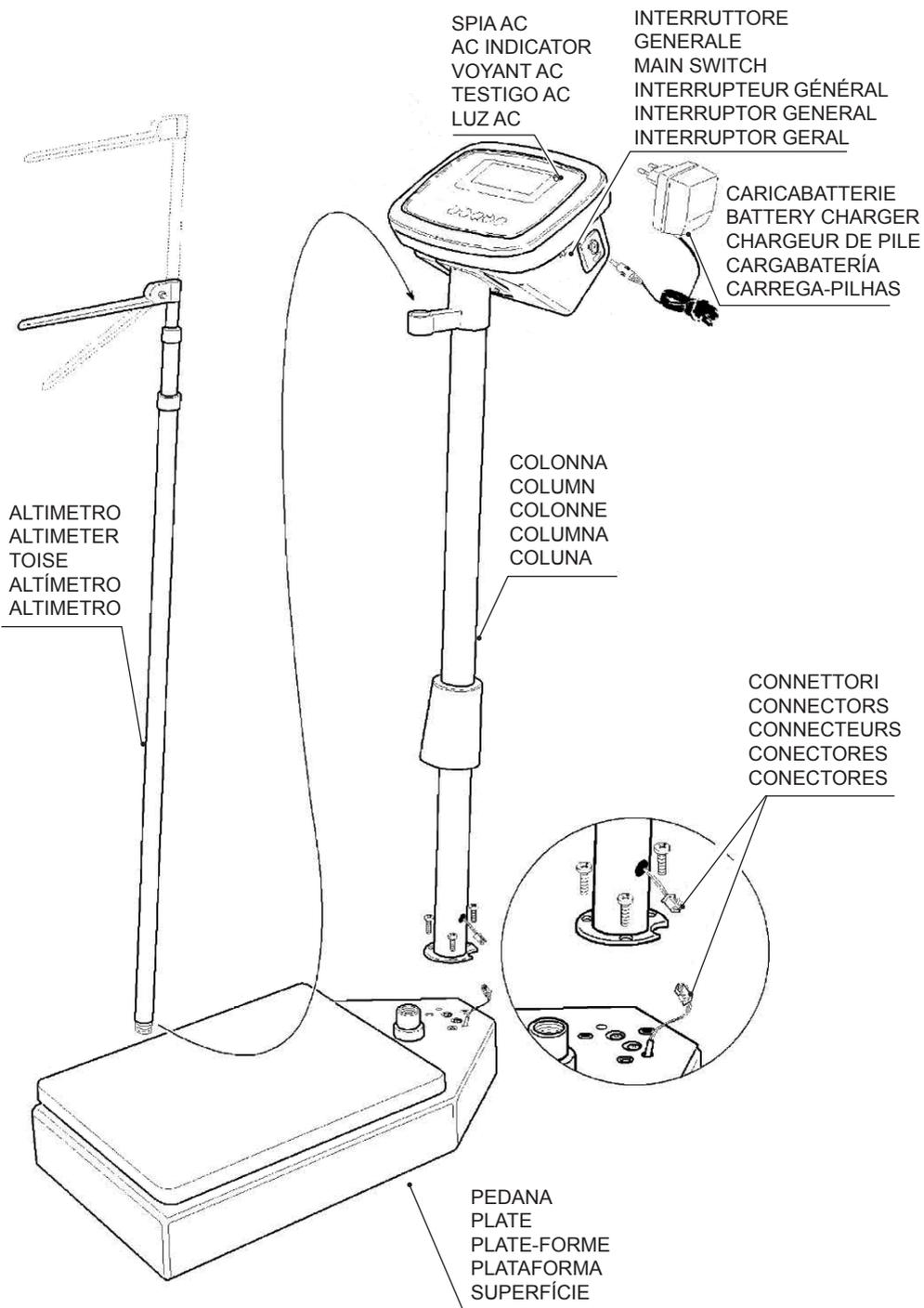

CARACTERÍSTICAS

La báscula digital Pegaso GIMA es un dispositivo útil para medir la altura y peso del cuerpo humano. Está dotada de amplio display digital y de batería recargable interna, por lo tanto se puede utilizar tanto conectada como desconectada de la red eléctrica.

Modelo	27288
Peso total	200kg
Escala	100g
Pantalla	LED
Altura del rango de medición	80~210cm
Altura de la escala de medición	0,5cm
Condiciones ambientales	Temperatura: 5°C~40°C Humedad: 85%RH
Potencia	Batería de 6 V
Dimensiones de la balanza	535×275×1030mm (Longitud x Ancho x Altura)
Peso neto de la balanza	12.0 kg

PRESCRIPCIONES



No utilice el producto si advierte algún defecto. Diríjase a su proveedor.

Evitar cualquier arreglo provisorio. Los arreglos han de efectuarse exclusivamente con partes de repuesto originales que han de ser instalados según el uso previsto.

Siendo el producto construido con materiales resistentes a la corrosión y a las condiciones ambientales previstas para su normal uso, no necesita particular atención; sin embargo se tiene que conservar en un ambiente cerrado y oscuro protegiéndola de la luz, del polvo y de la suciedad para poder garantizar las condiciones higiénicas. Se sugiere además conservar el producto en un lugar de fácil y seguro alcance por parte del personal encargado al primer auxilio.

DESEMBALAJE



Recordamos que los elementos del embalaje (papel, celofán, grapas metálicas, cinta adhesiva, etc..) pueden cortar y/o herir si no se manipulan con cuidado. Han de quitarse con oportunos medios y no dejados en manos de personas no responsables; lo mismo vale para las herramientas utilizadas para remover los embalajes (tijeras, cuchillas, etc...).

La primera operación que se tiene que efectuar, una vez abiertos los embalajes, es un control general de las piezas y de las partes que componen el producto; averiguar que estén presentes todos los componentes necesarios y también que sus condiciones sean perfectas.

INSTALACIÓN

La mayoría del producto ya viene preensamblado desde la fábrica, por lo tanto el montaje resulta muy sencillo (ver ilustración):

- Fijar la columna a la base con los tornillos suministrados
- Unir entre ellos los conectores a la base de la columna
- Introducir el altímetro en el soporte situado en la columna de la báscula
- Enroscar el altímetro en el agujero en la plataforma
- Introducir la espiga del cargabatería en la toma al lado del cuadrante
- Conectar el cargabatería a la red eléctrica para recargar la báscula
- Recargar la báscula cada vez que el testigo AC se encienda


FUNCIONAMIENTO

La báscula está dotada de un interruptor de encendido y apagado general, averiguar que el interruptor se halle en “1” antes de cualquier operación. Antes de que la persona suba en la plataforma es necesario alzar el cursor del altímetro más arriba de la altura aparente del sujeto.

Después de que el sujeto haya subido a la plataforma, bajar lentamente el cursor hasta apoyarlo en la cabeza.



Atención: No mantener el cursor en posición horizontal ya que podría generar situaciones de peligro en caso de choque con el mismo. sulla testa.

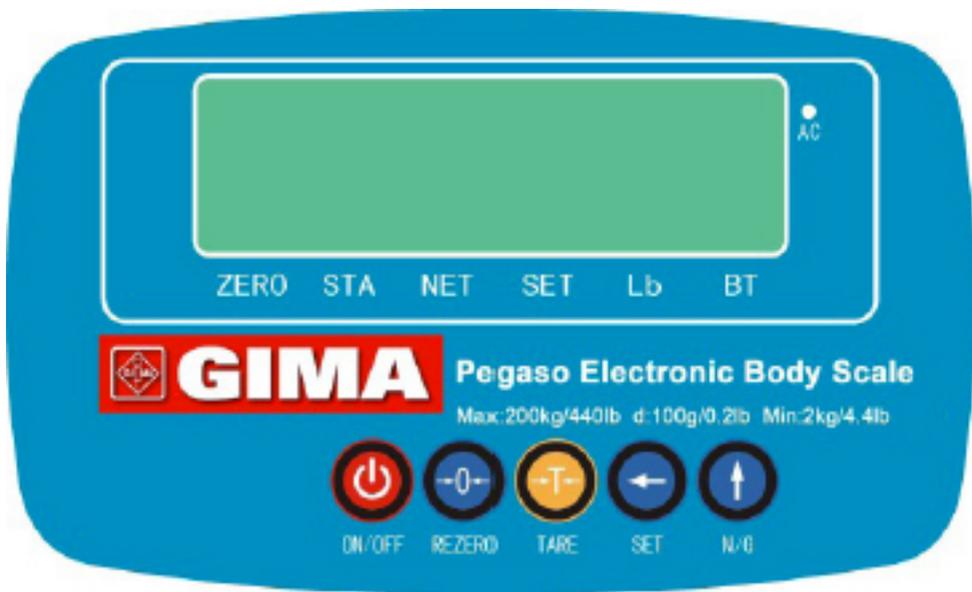

INDICADORES - Símbolos

- [1] [ZERO]: Se enciende cuando el peso en la balanza es “0”.
- [2] [STA]: Se enciende cuando el peso se estabiliza.
- [3] [NET]: El indicador se enciende cuando la balanza muestra el peso neto
- [4] [SET/HOLD]: Se enciende durante la fase de calibración del sistema y durante la programación de los datos
- [5] [Kg]: El indicador se enciende cuando el sistema funciona en la modalidad de lectura en “kg”.
- [6] [BT]: Indicador de batería baja
- [7] [AC]: El indicador se enciende durante la recarga de la batería

Función de los botones

- [1] ON/OFF: ON/STAND_BY la pantalla y la balanza están en funcionamiento.
- [2] PUESTA A CERO (REZERO): En la modalidad de pesaje, o en otra modalidad de funcionamiento seleccionada y durante la función de registro de datos, pone a “0” el peso.
- [3] TARA (TARE): Modalidad para ajustar la tara. En cualquier modalidad, este botón permite volver a la modalidad de ajuste.
- [4] ←(SET): En la modalidad de pesaje, el botón permite seleccionar las funciones, mientras que en modalidad de selección de las funciones, permite seleccionar la programación digital.
- [5] ↑(N/G): En la modalidad de pesaje, el botón permite memorizar el peso, mientras que en modalidad de selección de las funciones, permite modificar el valor seleccionando la función digital.

Puesta a cero [REZERO]

INDICADOR: ● ENCENDIDO ○ PARPADEANTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMIENTO	PANTALLA	INDICADOR						
	PESO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDAD DE ESTABILIZACIÓN DEL PESO	0,00	●	●					●
(1) Colocar el peso sobre el platillo (Ej. 0.50kg)	0,05		●					●
(2) Pulsar el botón de puesta a cero [REZERO]	0,00	●	●					●
(3) Quitar el peso del platillo	-0,05		●					●
(4) Pulsar el botón de puesta a cero [REZERO]	0,00	●	●					●

NOTA: Si el peso sobre el platillo es superior al valor preestablecido ($\pm 2\%$ del alcance máximo de medición), la balanza emite tres señales acústicas al pulsar el botón de puesta a cero [REZERO]. Esta operación no pone a cero los datos de funcionamiento.

Ajuste de la Tara [TARE]

Ajustar la tara pulsando un botón

INDICADOR: ● ENCENDIDO ○ PARPADEANTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMIENTO	PANTALLA	INDICADOR						
	PESO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDAD DE ESTABILIZACIÓN DEL PESO	0,00	●	●					●
(1) Colocar el peso sobre el platillo (Ej. 0.50kg)	0,05		●					●
(2) Pulsar el botón tara [TARE]	0,00		●	●				●
(3) Quitar el peso del platillo	-0,05	●	●	●				●
(4) Pulsar el botón tara [TARE]	0,00	●	●					●

NOTA: Si la tara es superior al valor preestablecido ($<50\%$ del alcance máximo de medición), la balanza emite tres señales acústicas al pulsar el botón.

Registro de peso [Weight Hold]

INDICADOR: ● ENCENDIDO ○ PARPADEANTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMIENTO	PANTALLA	INDICADOR						
	PESO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDAD DE ESTABILIZACIÓN DEL PESO	0,00	●	●					●
(1) Colocar el peso sobre el platillo	10,00		●					●
(2) PULSAR EL BOTÓN [↑]	10,00		●					●
(3) Quitar el peso del platillo	10,00	●	●		○			●
(4) PULSAR EL BOTÓN [↑]	0,00	●	●					●

Convertir la unidad de peso [Weight unit conversion]

INDICADOR: ● ENCENDIDO ○ PARPADEANTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7: AC

FUNCIONAMIENTO	PANTALLA	INDICADOR						
	PESO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDAD DE ESTABILIZACIÓN DEL PESO	0,00	●	●					●
(1) PULSAR EL BOTÓN [←]	UInt.tr	●	●		●			●
(2) Pulsar el botón de puesta a cero [REZERO]	0,00	●	●			●		●

Especificaciones de funcionamiento del sistema y modalidad de pesaje

Pulsar [REZERO] y luego pulsar [←] [←] [←]

ESPEC N.	BIT3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
00	NO UTILIZAR (NOT USE)		Apagado automático programación de la hora 00: ninguna función de apagado automático 01: apagado automático: 3 minutos 10: apagado automático: 6 minutos 11: apagado automático: 10 minutos	
03	Activar FUNCIÓN ALARMA 0: NO 1: SI	Permitir las operaciones de conversión de unidades de peso (LB => kg) 0: NO 1: SI	Permitir las operaciones de memorizar el peso 0: NO 1: SI	NO UTILIZAR (NOT USE)

LISTA DE MENSAJES INFORMATIVOS EN LA PANTALLA

ERROR - SOBRECARGA DE PESO	OF
VISUALIZACIÓN DEL PESO	-- LO
BOTÓN DE PUESTA A CERO ACTIVADO	8 8 8 8 8 8
ERROR – BLOQUEO DEL SISTEMA ANALÓGICO/DIGITAL	-- 0 – Er
EL SISTEMA DE PUESTA A CERO EXCEDE EL RANGO DE REFERENCIA	z r . E r r
BOTÓN DE CALIBRACIÓN ACTIVADO	S O n
BOTÓN DE CALIBRACIÓN DESACTIVADO	S O F F
PROGRAMACIÓN ESPEC. 12,13 INCORRECTA (EL PESO TOTAL EXCEDE EL RANGO DE VISUALIZACIÓN)	S – E r r
El sistema de bloqueo interior analógico/digital contiene información de error	- A d E r r

Calibración del peso estándar

Pulsar los botones [REZERO] y [←] [T] [T], seleccionar la modalidad de calibración y aparecerán los datos de calibración en la ventana de la pantalla (la función de calibración debe estar encendida).

INDICADOR: ● ENCENDIDO ○ PARPADEANTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7: AC

FUNCIONAMIENTO	PANTALLA	INDICADOR							OBSERVACIONES	
	PESO	1	2	3	4	5	6	7		
Inserir [←][T][T] pulsando [REZERO].	888888	●	●						●	
	CAL	●	●		●				●	Mostrar los datos de calibración y de ajuste.
	15,000	●	●		●				●	
PULSAR [←] y [↑]	5,000	●	●		●				●	Modificación del peso indicativo, pulsar [ENTER] para realizar la calibración a cero.
PULSAR [ENTER]	5,000	●	●		●				●	
PULSAR [ENTER]	CAL 0				●				●	Pulsar [ENTER] para realizar la calibración a cero.
	-----				●				●	Calibración a cero.
PULSAR [ENTER]	CAL SP		●		●				●	Pulsar [ENTER] para proceder al ajuste de calibración.
	-----				●				●	Ajuste de calibración.
	5,000		●						●	Una vez terminada la calibración, volver a la modalidad de pesaje.

MANTENIMIENTO

El producto no necesita mantenimiento especial. La vida útil depende de la utilización, para la limpieza no utilizar agua o líquidos sino un paño suave.



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto PT Código produto
	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar
	IT Fabricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante PT Fabricante
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabrico
	IT Seguire le istruzioni per l'uso GB Follow instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Siga las instrucciones de uso PT Siga as instruções de uso
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	IT Smaltimento RAEE GB WEEE disposal FR Disposition DEEE ES Disposición WEEE PT Disposição REEE
	IT Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE ES Dispositivo médico según a la Directiva 93/42 / CEE PT Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE