



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA PER NEONATI

BABY SCALE

PÈSE-BÉBÉ

BÁSCULA PARA BEBÉS

BALANÇA DE BEBÉ

BABYWAAGE

لفظلا نازيم

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones - Manual de Operação - Bedienungsanleitung -
مادختسالا لي ليد

Modello/Model: RGZ-20A (GIMA 27302)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / غناصلا

Wuxi Weigher Factory (Limited Company)

Majiaqiao, Guangfeng, Guangyi – 214011 Wuxi, Jiangsu

POPLE'S REPUBLIC OF CHINA - Made in China

Importato e distribuito da / Imported and distributed by / Importé et distribué par / Importado y distribuido por
Importado e distribuido por / Importiert und vertrieben von / مت ليق نم اهعيزوتو اهداريتسا /

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Lea atentamente este manual antes de utilizar la báscula

Especificaciones

Tipo	RGZ-20A-YE
Máx.	20kg/44lb
División	50g (0~10kg)/2oz(0~22lb) 100g (10~20kg)/4oz(22~44lb)
Dimensiones del plato	545X270 (L X AN)
Dimensiones generales	545X370X150 (L X AN X AL)
Peso Neto	3,1kg

RECETAS

No utilice el equipo si está dañado. Contacte con su distribuidor.

Evite las reparaciones precarias. Las reparaciones se realizarán únicamente con piezas de repuesto originales, que se instalarán de acuerdo con el uso previsto.

Dado que el producto está fabricado con materiales anticorrosivos adecuados a las condiciones ambientales previstas para su uso normal, no requiere cuidados especiales, sin embargo es necesario almacenarlo en un lugar cerrado asegurándose de que esté protegido del polvo y la suciedad para garantizar sus condiciones higiénicas. Además, se recomienda almacenar el producto en un lugar de fácil acceso para el personal en caso de necesidad.

DESEMBALAJE

Recuerde siempre que los elementos de embalaje (papel, celofán, puntos, cinta adhesiva, etc.) pueden cortar y/o herir si no se manipulan con cuidado. Se retirarán con los medios adecuados y no se dejarán a merced de personas irresponsables; lo mismo es válido para las herramientas utilizadas para retirar los paquetes (tijeras, cuchillos, etc.).

Después de abrir el envoltorio, en primer lugar es necesario controlar todas las piezas y partes que componen el producto. Compruebe que estén todos presentes y en perfectas condiciones.

INSTALACIÓN

Después de desembalar la báscula, monte la bandeja fijando los dos tornillos de sujeción con un destornillador. No es necesario tarar la báscula. Debe colocarse sobre una superficie plana (mesa o suelo) para que funcione correctamente.

FUNCIONAMIENTO

Antes de pesar al bebé compruebe la posición de la aguja, si la aguja no está en el cero póngala a cero girando el botón de ajuste. Después de ajustar la báscula, presione ligeramente la bandeja varias veces (1-2 Kg de presión). Si después de presionar la aguja vuelve a cero, la báscula está lista para ser utilizada.

Si el niño puede mantenerse de pie, puede utilizar la báscula sin la bandeja. En este caso, deje que el niño se ponga de pie directamente sobre la base de la báscula.

Cuando retire la bandeja, vuelva a ajustar la báscula. ¡La aguja debe estar a cero!

MANTENIMIENTO

El producto no requiere ningún mantenimiento especial. La vida técnica de la báscula depende de su uso. Es resistente frente a la mayoría de los productos químicos, excepto los cetenos M.E.K., las sustancias diluyentes y los quitaesmaltes.



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses