



**ALZAWATER**  
**RAISED TOILET SEAT**  
**REHAUSSEUR WC**  
**ALZAWATER**  
**TOILETTENSITZERHÖHUNG**  
**ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ**

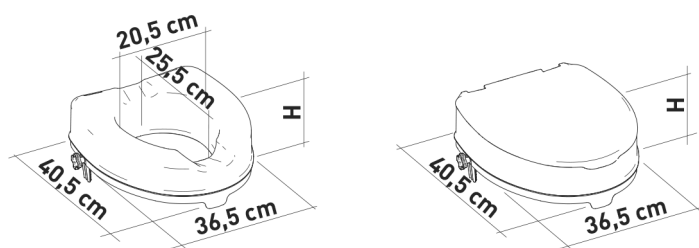

COD.	H	CON COPERCHIO - WITH LID AVEC COUVERCLE - CON TAPA MIT DECKEL - ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27735	10CM/4"	
27737	15CM/6"	
27740	15CM/6"	
27741	10CM/4"	

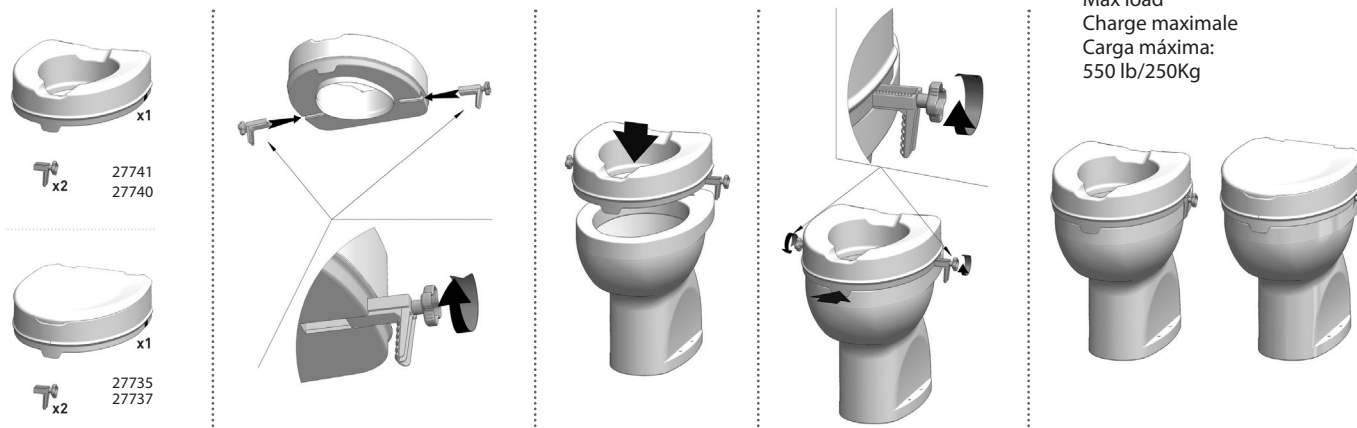

27735	ALZAWATER 10 CM CON COPERCHIO	RAISED TOILET SEAT 10 CM WITH LID	REHAUSSEUR WC 10 CM AVEC COUVERCLE	ALZAWATER 10 CM CON TAPA	TOILETTENSITZERHÖHUNG 10 CM MIT DECKEL	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 10 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27737	ALZAWATER 15 CM CON COPERCHIO	RAISED TOILET SEAT 15 CM WITH LID	REHAUSSEUR WC 15 CM AVEC COUVERCLE	ALZAWATER 15 CM CON TAPA	TOILETTENSITZERHÖHUNG 15 CM MIT DECKEL	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 15 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27740	ALZAWATER 15 CM	RAISED TOILET SEAT 15 CM	REHAUSSEUR WC 15 CM	ALZAWATER 15 CM	TOILETTENSITZERHÖHUNG 15 CM	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 15 CM
27741	ALZAWATER 10 CM	RAISED TOILET SEAT 10 CM	REHAUSSEUR WC 10 CM	ALZAWATER 10 CM	TOILETTENSITZERHÖHUNG 10 CM	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 10 CM

estas operaciones antes de cada uso. El usuario debe garantizar la integridad estructural del dispositivo y sus componentes. Siga las siguientes instrucciones para la limpieza e higienización:

1. Use guantes.
2. Elimine la suciedad más evidente antes de proceder a una desinfección más exhaustiva.
3. Utilice agua o un detergente no agresivo para la limpieza.
4. Seque con un paño limpio y seco.





Como alternativa, el alzáwater se puede higienizar en un lavavajillas doméstico a la máxima temperatura.

**CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN:**

El producto es apto para ser reutilizado por otros usuarios. Antes de ser reutilizado por otras personas, el producto debe limpiarse e higienizarse adecuadamente. Antes de entregar el producto a otras personas, debe ser revisado por distribuidores cualificados.

**PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN:**

No tire el producto a la basura doméstica normal. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer el procedimiento correcto de eliminación.

<b>REF</b>	Código producto	<b>LOT</b>	Número de lote
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Fabricante
<b>SN</b>	Número de serie		Fecha de fabricación
<b>MD</b>	Producto sanitario		Consultar las instrucciones de uso
<b>UDI</b>	Identificador de dispositivo único		

**CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

**ESPAÑOL**

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

**USO PREVISTO:**

Los productos están diseñados para aumentar la altura total del inodoro, facilitando el levantarse y sentarse y promoviendo el uso independiente. La versión con tapa garantiza mejores condiciones de higiene al tirar de la cadena. La tapa puede utilizarse como silla cuando está cerrada.

**INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:**

El asiento elevado para inodoro está concebido para personas mayores, usuarios de sillas de ruedas, personas con movilidad reducida de la región lumbar, caderas o rodillas y cualquier persona que pueda tener dificultades para sentarse o levantarse del inodoro. Se requiere una capacidad adecuada para sentarse de forma independiente durante el uso. No se recomienda el uso del alzáwater en casos de trastornos de la percepción o problemas de equilibrio.

**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:**

- El usuario no debe superar el peso máximo indicado en las instrucciones.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el alzáwater está colocado firmemente en el inodoro y fijado a él mediante el sistema de fijación suministrado.
- No apriete demasiado el sistema de fijación.
- Durante el montaje, siga atentamente las instrucciones del manual.
- No modifique el alzáwater y sus componentes de ninguna manera.
- No use el alzáwater si está dañado. Las grietas y las deformaciones pueden afectar seriamente al uso seguro del aparato.
- Asegúrese de que la altura del asiento sea lo suficientemente alta para que al usuario el resulte fácil y seguro de usar.
- Cuando utilice el dispositivo, evite posiciones que pongan el peso de su cuerpo demasiado adelante. Las posturas incorrectas pueden provocar condiciones inestables y el riesgo de que el alzáwater se vuelque.
- El alzáwater no debe colocarse en el exterior.

**INFORMACIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO:**

El mantenimiento del producto consiste en su limpieza e higienización. Para garantizar un nivel de higiene adecuado, el usuario debe repetir

---

**REF**

27735 - 27737 - 27740 - 27741



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in Italy

