



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE

FOLDING ALUMINIUM WALKING STICK

BÂTON PLIABLE EN ALUMINIUM

PALO DE ALUMINIO PLEGABLE

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'Utilisateur - Manual de usuario

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado

REF FS927L (GIMA27782)



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster.
Germany

Importato da / Imported by /
Importé par / Importado por:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



INTRODUCCIÓN

Este bastón se puede plegar en 4 secciones y es adecuado para guardarlo en una bolsa cuando ya no se utilice. Fabricado en aluminio que es ligero y resistente. La punta está cubierta con una goma antideslizante. Altura Regulable (de 80 cm a 90 cm): la longitud debe ajustarse de acuerdo con la altura del usuario.

NORMAS DE SEGURIDAD

Dirigirse siempre a su distribuidor especializado para ajustar el aparato y aprender a utilizarlo correctamente.

No almacenar a la intemperie, no exponerlo a los rayos solares durante periodos prolongados. Antes del uso, verificar que todas las conexiones estén bien apretadas.

Moverse siempre lentamente dando pequeños pasos para asegurarse de que la distribución del peso sea uniforme y la posición sea estable y segura.

No utilizar en superficies resbaladizas (suelo mojado, nieve, hielo) ni en escaleras.

No utilizar para fines distintos de aquellos para los que se ha diseñado este producto.

Carga máxima 100 Kg.

Usar solo piezas originales para las reparaciones. Solo el personal cualificado está autorizado a reparar este artículo. Prestar atención en caso de uso en terrenos imperfectos y en mal estado. Comprobar el desgaste de la goma antideslizante y sustituirla si es necesario.

INSTALACIÓN

La puesta en servicio de este producto solo debe ser realizada por personal cualificado; un ajuste incorrecto podría provocar un riesgo de accidente.










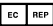

Ajuste de la altura: aflojar el anillo de sujeción. Pulsar el botón y deslizar el tubo hasta el orificio de ajuste deseado.

Regresar el botón a la posición inicial. Apretar el anillo de sujeción.

Para plegarlo, desenganchar los tubos entre sí.

MANTENIMIENTO

El producto debe limpiarse regularmente con un paño limpio y seco. El mango debe limpiarse con un detergente neutro (no utilizar productos corrosivos). Las extremidades deben controlarse y cambiarse regularmente en caso de desgaste

| Símbolos | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  | Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 |  | Fabricante |  | Código producto |
|  | Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente |  | Conservar al amparo de la luz solar |  | Número de lote |
|  | Consultar las instrucciones de uso |  | Conservar en un lugar fresco y seco |  | Producto sanitario |
|  | Representante autorizado en la Comunidad Europea |  | Fecha de fabricación | | |

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses