



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ASPIRATORE MANUALE
HAND SUCTION UNIT
UNITÉ D'ASPIRATION MANUELLE
UNIDAD DE ASPIRACIÓN MANUAL
UNIDADE DE ASPIRAÇÃO MANUAL
HANDABSAUGGERÄT
SSAK MEDYCZNY RĘCZNY
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
وحدة الشفط اليدوية

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.

REF 28180



Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd.
88 Fuda Rd., Ludu, Taicang, Suzhou,
Jiangsu 215412, China
Made in China



Inocare Medical GmbH
Industriestr. 42, 74927 Eschelbronn, Germany



1. Descripción del producto

El dispositivo de aspiración es una unidad de aspiración que se puede alimentar con una mano mientras que con la mano libre puede realizar otras funciones importantes. Esta unidad de aspiración fue diseñada para proporcionar un funcionamiento y un mantenimiento sencillos.

2. Uso previsto del producto

La función del dispositivo de aspiración es proporcionar una aspiración faríngea y traqueal rápida y efectiva en diferentes tipos de emergencias.

3. Especificaciones

Aspiración (máx.): - 400 mmHg

Flujo de aire libre máximo: >20 l/min

Volumen del recipiente desechable: 250 ml

Diámetro externo de la conexión del catéter: de 10 mm a 6 mm

Temperatura ambiental durante el funcionamiento:

de -20°C a + 50°C (de -4°F a 122°F)


Temperatura ambiental durante el almacenamiento:

de -40°C a + 60°C (de -40°F a 140°F)

Dimensiones: 230x60x190 mm

4. Instrucciones de funcionamiento

1. Seleccione el tamaño del tubo adecuado (de acuerdo con el tamaño del paciente) y conéctelo al adaptador (si aún no está conectado).

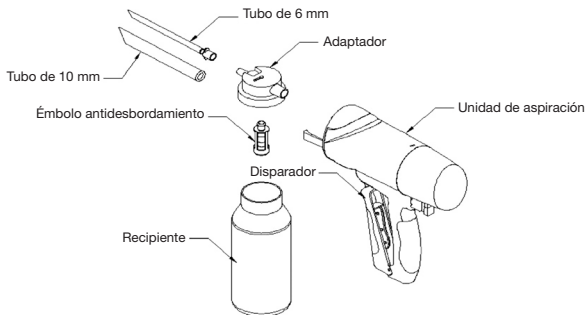

2. Conecte el adaptador con el tubo a la tapa del recipiente. El recipiente debería estar conectado a la bomba.
3. El dispositivo de aspiración se pone en funcionamiento con una simple presión del disparador. Tire o apriete del disparador hacia la palanca de la bomba. El mecanismo de presión generará la aspiración en la bomba y aspirará los fluidos hacia el recipiente.
4. En el dispositivo de aspiración hay un émbolo antidesbordamiento. Una vez que el dispositivo de protección esté en funcionamiento, el fluido no pasará al dispositivo de aspiración. A continuación, el dispositivo de aspiración se detendrá. En ese momento, tendrá que cambiar el recipiente y, a continuación, podrá volver a ponerlo en funcionamiento.
5. Una vez que finalice con la aspiración, retire el tubo suavemente del paciente. Retire el recipiente lleno sacándolo (y el tubo) de la bomba. Coloque el recipiente con el tubo en la bolsa de polietileno. Deshágase del tubo desechable y del recipiente adecuadamente.
6. Si es necesario, coloque una etiqueta en el recipiente para transportarlo al laboratorio.

5. Limpieza y almacenamiento

Desinfecte la bomba y la palanca (depurándolas con agua jabonosa caliente, detergente suave, solución de lejía, etc.) antes de guardarlas.

La bomba no requiere condiciones de mantenimiento o almacenamiento especiales.

6. Pruebas del correcto funcionamiento

Compruebe la situación de la palanca y el funcionamiento de la bomba antes de volver a ponerlo en funcionamiento. Coloque un recipiente, tape el puerto de aspiración con el pulgar y tire o presione de la palanca de la bomba para comprobar la aspiración.






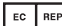







Este producto incluye un cuerpo principal de succión, un adaptador, un recipiente y un aspirador de 10 mm y 6 mm.

7. Aviso

1. Es importante que lea el manual con detenimiento antes de ponerlo en funcionamiento.
2. Si la palanca de la bomba se vuelve difícil de manipular, puede que se haya bloqueado. No continúe aspirando hasta que la fuente del bloqueo se haya

- identificado (elimine el bloqueo del catéter, del adaptador o de la tapa).
3. Si la bomba se vuelve cara abajo, el mecanismo antidesbordamiento se pondrá en funcionamiento haciendo imposible la aspiración.

Símbolos

Símbolo	Definición del símbolo	Símbolo	Definición del símbolo
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Fabricante
	Conservar al amparo de la luz solar		Fecha de fabricación
	Conservar en un lugar fresco y seco		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Código producto
	Dispositivo monouso, no reutilizable		Número de lote
	No estéril		Consultar las instrucciones de uso
	Producto sanitario		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.