

Almohadillas autoadhesivas para electrodos Instrucciones de uso: P5050

Aplicación

1. Limpiar bien la piel antes de aplicar los electrodos. Los electrodos no se adhieren bien si hay restos de lociones, aceite, maquillaje, suciedad, etc., en la piel.
2. Apagar el estimulador antes de aplicar los electrodos a su piel.
3. Insertar las clavijas del cable del dispositivo en los conectores del cable del electrodo.
4. Retirar los electrodos del revestimiento protector y aplicarlos firmemente sobre la piel.

Retirada

1. Apagar el estimulador antes de retirar los electrodos de la piel.
2. Levantando una esquina del electrodo, retirar el revestimiento protector del electrodo y despegarlo. No retirar el revestimiento protector tirando del cable.
3. Colocar los electrodos en el revestimiento y desconectar el cable conductor retorciendo y tirando de los conectores del cable del electrodo.

Cuidado y almacenamiento

1. Entre usos, guardar los electrodos en la bolsa con cierre en un lugar fresco y seco.
2. La vida útil de los electrodos varía en función de las condiciones de la piel, el almacenamiento, la cantidad de uso, el tipo de estimulación y el sitio de estimulación. La vida de los electrodos puede prolongarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de aplicación anteriores y posteriores.
3. Evitar que los electrodos estén expuestos a la luz solar directa o a una humedad extrema. Condiciones de almacenamiento recomendadas: 41 ° F-80,6 ° F, Humedad relativa: 40 %- 70 %
4. NO dejar los electrodos al descubierto en contacto con el aire, ya que esto disminuirá la viscosidad y el rendimiento del producto.

Precaución

1. Leer atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.
2. Los electrodos están destinados a un solo paciente.
3. NO aplicar sobre la piel dañada. Si se produce una erupción cutánea, interrumpir su uso y ponerse en contacto con su médico. NO utilizar mientras se conduce un vehículo motorizado o se maneja maquinaria.
4. NO desmontar ni alterar los electrodos.
5. Solo para uso con dispositivos de tipo de estimulación eléctrica.
6. NO utilizar en niños o bebés. Estos electrodos no han sido evaluados para uso pediátrico.



SIN látex

Uso previsto

Las almohadillas de electrodos autoadhesivas están destinadas a transmitir corriente eléctrica a la piel del paciente para su uso con dispositivos de estimulación eléctrica transcutánea. Las almohadillas de electrodos autoadhesivas se utilizan con algunos tipos comunes de los dispositivos de estimulación, incluyendo pero no limitado a TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), MIC, RUSS, IF y EMS (Electrical Muscle Stimulation). Las almohadillas de electrodos autoadhesivas son para uso OTC (Over-The-Counter) o prescripción.



Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.
202,2/F,Building 27,Dafa Industrial park,Longxi
Community,Longgang District,shenzhen, China

EC REP

Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
Address:Eiffestrasse 80,20537 Hamburg,Germany



LOT

Made In China