



# AnyCare AnyCare Premium

## | MANUAL DEL USUARIO

Por favor, infórmese bien de este manual para utilizar este dispositivo correctamente y evitar cualquier mal funcionamiento para su mejor efecto. Por favor, guarde este manual siempre con este sistema y léalo cuidadosamente antes de utilizar el sistema de forma correcta.



## CONTENIDOS

---

1 - 1 Introducción Anycare/Anycare Premium	... 03
<b>2 Precauciones para la seguridad</b>	
2 - 1 Precauciones para la seguridad eléctrica	... 04
2 - 2 Precauciones previas al uso	... 06
2 - 3 Precauciones durante el uso	... 07
2 - 4 Precauciones después del uso	... 08
2 - 5 Precaución sobre el uso y almacenamiento del manguito	... 09
2 - 6 Cómo limpiar	... 10
2 - 7 Condiciones de Funcionamiento / Almacenamiento	... 11
2 - 8 WEEE	... 12
<b>3 Descripción del dispositivo_Anycare</b>	
3 - 1 Paquete del Dispositivo	... 13
3 - 2 Especificaciones del Dispositivo	... 14
3 - 3 Apariencia y Nombres y Funciones	... 15
<b>4 Descripción del dispositivo_Anycare Premium</b>	
4 - 1 Paquete del Dispositivo	... 16
4 - 2 Especificaciones del Dispositivo	... 17
4 - 3 Apariencia y Nombres y Funciones	... 18
<b>5 Uso y procedimientos del dispositivo</b>	
5 - 1 Configuración y uso	... 20
5 - 2 Tamaño del manguito y de la cremallera	... 23
<b>6 Solución de Problemas</b>	
6 - 1 Solución de problemas generales	... 25
6 - 2 Otros fallos	... 25



---

# 1

## Informació

### 1 - 1 Introducción Anycare/Anycare Premium

Gracias por adquirir nuestro dispositivo.

El funcionamiento Principal de este dispositivo consiste en que la salida de aire del motor de aire se envía a un manguito compuesto por cuatro cámaras de aire, y cuatro cámaras de aire se inflan secuencialmente desde la primera cámara de aire hasta la cuarta cámara.

Este manual del usuario contiene la información sobre cómo utilizar, mantener y reparar este dispositivo. Por favor, infórmese bien de este manual para utilizar este dispositivo correctamente y evitar cualquier mal funcionamiento para su mejor efecto. Por favor, guarde este manual siempre con este sistema y léalo cuidadosamente antes de utilizar el sistema de forma correcta.

## 2

## Precauciones

※ Por favor, asegúrese de observar las siguientes precauciones en aras de la seguridad. De lo contrario, la vida del usuario o de otras personas puede correr peligro.

### 2 - 1 Precauciones para la seguridad eléctrica



- Cuando este producto no esté en uso, desconecte el cable de alimentación.
- Cuando un trueno o un rayo provoque un apagón repentino, apague este producto y desconecte el enchufe.  
(Existe el riesgo de que el producto falle o reciba una descarga eléctrica)
- Conecte con precisión el cable de alimentación de manera que quede rígidamente enchufado.  
(Si el cable de alimentación no está conectado de forma estable, existe riesgo de mal funcionamiento e incendio)
- Asegúrese de desatar el cable de alimentación antes de usarlo. (Existe riesgo de generación de calor e incendio)
- Cuando mueva este producto, utilice el asa en lugar de tirar del cable de alimentación.  
(Si el cable de alimentación está dañado, existe riesgo de incendio y de descarga eléctrica)
- Si el cable está dañado o este producto se cae y se daña, no lo utilice.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, utilice la fuente de alimentación con toma de tierra de protección.  
(Existe el riesgo de incendio o descarga eléctrica.)
- No utilice el dispositivo en lugares con alta humedad, como el sauna o el baño. (Esto puede provocar un defecto mecánico o daños físicos causados por una descarga eléctrica o una escaldadura)



- Para evitar provocar una descarga eléctrica, utilice este producto conectándolo a una fuente de alimentación principal con toma de tierra de protección.  
(Existe el riesgo de incendio o descarga eléctrica.)
- No utilice un cable/enchufe de alimentación dañado o una toma de corriente floja.  
(Si la conexión es inestable, existe riesgo de incendio y de descarga eléctrica que puede causar lesiones.)
- Cuando conecte o desconecte el cable de alimentación a la toma de corriente o de esta, asegúrese de agarrar el enchufe en lugar de la línea.



- No utilice las manos ni otras partes del cuerpo mojadas para tocar este producto, el cable de alimentación, el enchufe y la toma de corriente.  
(Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica que puede causar lesiones)

- No dañe, doble, gire o caliente el cable de alimentación.  
(Si el cable está dañado, existe riesgo de incendio y de descarga eléctrica)

- Si huele algo anormal mientras este producto está en uso, deje de utilizarlo inmediatamente. En este caso, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con el fabricante o el vendedor.



- No desmonte ni remodele este producto por su cuenta para repararlo. Este producto solo puede ser desmontado y reparado por el personal autorizado.  
(Si desmonta y repara este producto por su cuenta, existe el riesgo de que se produzcan fallos de funcionamiento y lesiones)

## 2 - 2 Precauciones previas al uso

---

- Compruebe si este dispositivo está dañado y si funciona correctamente o no, al menos una vez al año.  
(Si este dispositivo se utiliza sin realizar el mantenimiento, existe el riesgo de que funcione mal y de que se produzcan lesiones)
- No utilice este producto para otros fines que no sean los previstos.
- Cuando este producto no se utilice durante mucho tiempo, límpielo y compruebe si funciona correctamente o no antes de utilizarlo.
- No instale este producto en un entorno expuesto a dispositivos de calefacción y luz directa.  
(Existe el riesgo de deformación y fallo que pueden causar un mal funcionamiento.)
- Antes de utilizarlo, compruebe el estado de este producto, así como el de los accesorios.  
(Si este producto o el exterior de los accesorios está/están dañados, póngase en contacto con el vendedor o el centro de servicio. Si pretende utilizar el producto y los accesorios dañados, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o una fuga de corriente que podría provocar un incendio)  
(Cuando este producto o los accesorios está/n dañado/s, existe el riesgo de mal funcionamiento, fallos e incendios que pueden causar lesiones)
- No instale este producto sobre un escritorio o una mesa en la que se aplique frecuentemente mucha vibración o impacto.  
(Existe el riesgo de que se caiga debido a las vibraciones o a los impactos, lo que puede provocar fallos y lesiones)
- Asegúrese de instalar este producto en un lugar donde el enchufe pueda conectarse y desconectarse sin obstáculos y donde el enchufe pueda retirarse sin obstáculos.
- Utilice el producto después de la instalación del dispositivo en un lugar plano y seguro.  
(Si se coloca en un lugar con la base inclinada o con sacudidas, existe el peligro de que se produzcan ruidos, caídas, mal funcionamiento o problemas, etc.)
- Este aparato puede ser utilizado por niños y mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.





- No cubra el cable de alimentación con una alfombra u otros objetos.  
(Al caminar, sus pies pueden quedar atrapados en el cable de alimentación, haciendo que este producto se caiga)  
(Existe riesgo de caída que puede provocar fallos y lesiones)



- Tenga cuidado para evitar el flujo de agua o materias extrañas en el dispositivo. (Si entran cuerpos extraños en el aparato, pueden causar problemas o descargas eléctricas)
- Los accesorios y las piezas que se utilicen en el producto deben ser los proporcionados o aprobados por DAESUNG MAREF.  
(Si se utilizan accesorios y piezas no aprobados por DAESUNG MAREF, existe el riesgo de que se produzca un mal funcionamiento que no garantizaría la seguridad del usuario)

## 2 - 3 Precauciones durante el uso



- No aplique un impacto extremo dejando caer este producto.
- Cuando traslade este producto, asegúrese de apagarlo antes de hacerlo.  
(Mientras este producto esté en funcionamiento, no lo mueva)
- No utilice este producto mientras la tubería esté orientada hacia sus ojos, nariz y labios. (El aire que se desprende de la tubería puede causar lesiones)
- Para los principiantes es mejor utilizar el aparato con 20mmHg durante 10 minutos al principio, y luego aumentar la intensidad de la presión gradualmente según la condición física.
- Utilice este producto cuando la temperatura sea superior a 0°C e inferior a 40°C.



- Cuando esté ebrio, no lo use hasta que la embriaguez haya desaparecido por completo. (Si se utiliza después de haber bebido, pueden producirse lesiones en el cuerpo debido a un uso incorrecto del dispositivo)

## 2-4. Precauciones después del uso



- Cuando desconecte el cable de alimentación del dispositivo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de retirarlo de este producto.
- Antes de limpiar este producto, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y luego desconecte el cable de alimentación de este producto. (Si se queda atrapado en el cable de alimentación mientras mueve este producto existe el riesgo de que se produzcan lesiones por caídas, daños y descargas eléctricas)
- Asegúrese de que no se introduce ningún líquido en la toma de aire de este producto. (Si se inserta algún líquido, las piezas internas influenciadas podrían provocar un mal funcionamiento, una descarga eléctrica y un incendio)
- No aplique directamente el detergente líquido a este producto ni utilice benceno, diluyente o alcohol para limpiarlo. Asegúrese de aplicar el detergente líquido a un paño que vaya a utilizar para limpiar este producto. (Existe el riesgo de decoloración, daños, descargas eléctricas e incendios.)
- Cuando este producto esté dañado, presente inmediatamente una solicitud de reparación al proveedor o al centro de atención al cliente.
- Almacene este producto y los accesorios en un lugar seco libre de agua y humedad. (La humedad y los ingredientes líquidos pueden dañar las piezas y los circuitos de este producto)
- No almacene este producto en un lugar sucio y lleno de polvo. (El polvo y los materiales extraños pueden provocar fallos, incendios o descargas eléctricas que pueden causar lesiones)
- No almacene este producto en un lugar inclinado. (Si este producto se deja caer, existe el riesgo de que se produzcan daños que podrían causar fallos)
- El rango de temperatura adecuado para almacenar este producto es desde -20°C a 60°C. Asegúrese de que la temperatura esté dentro de ese rango mientras se almacena este producto.
- Almacene este producto en un lugar que no pueda ser alcanzado por los niños.



- No almacene este producto en un lugar expuesto a dispositivos de calefacción y a la luz directa. (Existe el riesgo de que se produzcan fallos, deformaciones e incendios)
- No juegue con ningún objeto sobre este producto. (Cuando este producto es operado o movido mientras cualquier recipiente de líquido (jarrón, botella de agua, taza, producto cosmético y químico), sustancia volátil, producto químico, u objeto afilado (tijeras y cuchillo) es colocado en este producto, hay un riesgo de caída que puede causar fuego y lesiones)
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



## 2-5. Precaución sobre el uso y almacenamiento del manguito



- Asegúrese de comprobar regularmente la condición del manguito
- No mantenga el manguito bajo la luz directa del sol o en un lugar de alta temperatura.
- Almacene el manguito en un lugar limpio y no almacene este producto en un entorno donde la temperatura sea baja durante las estaciones de invierno.
- Si el manguito se almacena en un entorno donde la humedad es alta, existe el riesgo de que aparezca moho.
- No coloque el manguito cerca de fuentes de calor (calefactor, cigarrillo) ni de objetos afilados. (agujas, tijeras).
- Cuando se adhiera alguna sustancia extraña al manguito, utilice un paño seco o un pañuelo de papel para retirar la sustancia extraña.
- Almacene el manguito y la tubería de forma que no estén excesivamente doblados o presionados por objetos pesados.
- Utilice los manguitos con paños finos para su uso.  
(Puede causar una alergia a una persona con piel sensible)
- En el momento de abrir y cerrar la cremallera del manguito, vigile que no se pegue el vello corporal o los calcetines, etc.
- Cuando no utilice este manguito durante mucho tiempo, limpie este producto y compruebe si funciona correctamente antes de utilizarlo.
- Almacene este manguito en un lugar que no pueda ser alcanzado por los niños.



- El manguito está destinado a ser conectado únicamente con el producto fabricado por DAESUNG MAREF. No conecte el manguito con otros productos fabricados por otras empresas.
- Antes de usar el manguito, quítese todos los accesorios de la parte del cuerpo donde vaya a usar el manguito.  
(Cuando los accesorios son usados, existe el riesgo de que el manguito se dañe o que la parte de su cuerpo donde se usa el manguito se lesione.)  
(Pierna: pertenencias dentro de los bolsillos del pantalón, pulsera de tobillo, etc.)  
(Cintura: cinturón, objetos en los bolsillos del pantalón, llavero, teléfono móvil, etc.)  
(Brazo: reloj, pulsera, anillo, etc.)
- No sople aire dentro del manguito cuando no lo lleve puesto.  
(Esto puede causar daños en el manguito)
- No utilice un imperdible en el manguito para fijar la tubería. (El manguito puede romperse por la parte afilada de un imperdible)

## 2 - 6 Cómo limpiar

### 2-6-1. Cómo limpiar el dispositivo

- Cuando cualquier sustancia extraña (por ejemplo: suciedad, polvo, sangre) se adhiera a este dispositivo, apáguelo, aplique un poco de agua o detergente neutro a un paño y utilice el paño para eliminar suavemente la sustancia extraña.  
(Existe el riesgo de decoloración, daños y mal funcionamiento)  
(Cuando limpie este dispositivo, asegúrese de secarlo completamente antes de utilizarlo)
- Si desinfecta el dispositivo, primero apáguelo y límpielo con un algodón suave utilizando un detergente neutro.  
(Puede causar decoloración, daños o mal funcionamiento)
- Por favor, tenga cuidado de evitar que cualquier líquido entre en la toma de aire o en la entrada de CA de la parte trasera del aparato. Si el líquido entra, pueden producirse errores de funcionamiento, descargas eléctricas e incendios debido a la afectación de las piezas internas.
- No limpie el aparato con bencina, disolvente, alcohol, etc. ni rocíe agua directamente sobre el aparato.  
(Puede causar decoloración, daños, descargas eléctricas o incendios)
- Utilice un detergente neutro o la alcalinidad para la limpieza. Dilúyalo en agua si está en estado alcalino sin diluir.  
Uso de medicamentos: tenga cuidado que no entre en la piel o en los ojos.

### 2-6-2. Cómo limpiar la tubería




- Si algún material extraño entra en la tubería, utilice un paño suave para limpiar la tubería con un poco de agua o un detergente neutro.
- Tenga cuidado de que el líquido no entre en la tubería.  
(Puede causar la durabilidad de la tubería si el agua está dentro de la tubería, también podría romper y causar un incendio siempre y cuando el agua entre en el dispositivo desde la tubería)
- No rocíe agua directamente sobre la tubería ni la introduzca en el agua.
- No limpie el dispositivo con bencina, diluyente, alcohol, etc.

### 2-6-3. Cómo limpiar el manguito



- Si hay algún material extraño en el manguito, utilice un paño seco o un pañuelo de papel para limpiarlo.
- Utilice un poco de detergente neutro o agua en un paño suave y seque completamente el manguito. (Puede disminuir la durabilidad o modificarse cuando el manguito está mojado)

## 2 - 7 Condiciones de Funcionamiento / Almacenamiento

### 2-7-1. Condiciones de funcionamiento

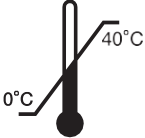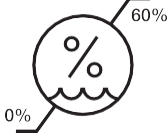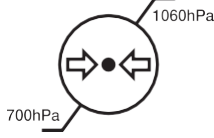Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Presión Atmosférica (hPa)
		

### 2-7-2. Condiciones de almacenamiento

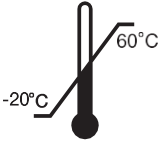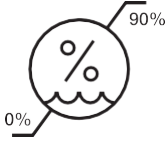Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)
	

## 2-8. WEEE



Este símbolo indica que la recolección separada para EEE se basa en la DIRECTIVA 2012/19/UE.

El objetivo de esta Directiva es contribuir a la producción y el consumo sostenibles mediante, en primer lugar, la prevención de los WEEE y, además, mediante la reutilización, el reciclado y otras formas de recuperación de dichos residuos, con el fin de reducir su eliminación y contribuir al uso eficiente de los recursos y a la recuperación de valiosas materias primas secundarias.

La presente Directiva abarca todos los EEE utilizados por los consumidores y los destinados a uso profesional.

Los consumidores tienen que contribuir activamente al éxito de esta recolección y deben ser alentados a devolver los WEEE.

El productor debe proporcionar información sobre el porcentaje de reutilización, reciclaje y recuperación. El 75% se recuperará y el 55% se preparará para su reutilización y reciclado dentro de la categoría 5 (Pequeños equipos) de la DIRECTIVA 2012/19/UE ANEXO III .

Anycare es un índice de recuperabilidad del 84,81% y un índice de reciclabilidad del 81,49%.

Anycare premium es un índice de recuperabilidad del 84,81% y un índice de reciclabilidad del 81,19%.

La información sobre las instalaciones de tratamiento se pondrá a disposición de los centros que preparan la reutilización y las instalaciones de tratamiento y reciclaje de los productores de EEE.


DAESUNG MAREF, siempre que sea posible, está dispuesta a proporcionarla.

### 3


## Descripción del dispositivo\_Anycare

### 3 - 1 Paquete del Dispositivo

#### 3-1-1. Conjunto básico

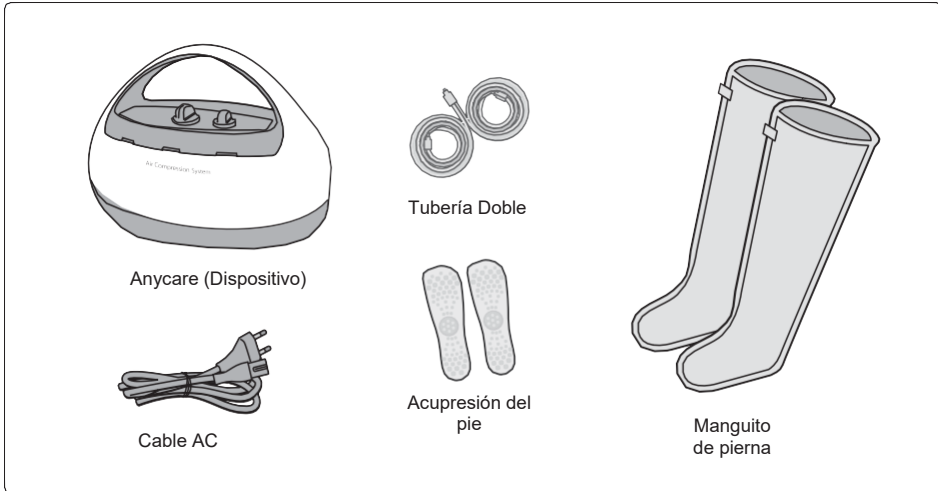

#### 3-1-2. Accesorios

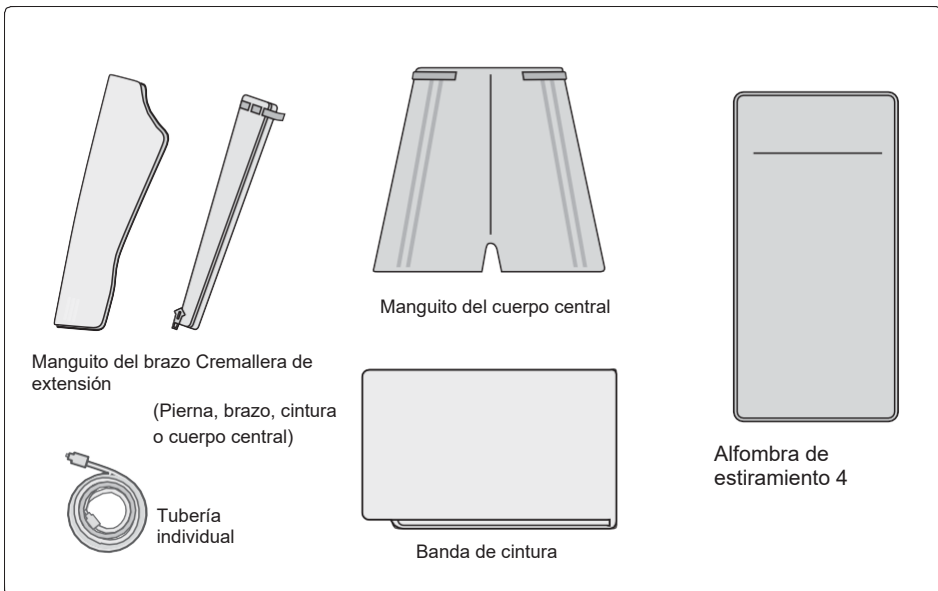


### 3 - 2 Especificaciones del Dispositivo

Artículos	Especificaciones
Modelo	Anycare
Tipo de Protección	Clase II
Tensión Nominal	AC220 - 240V, 50/60Hz
Consumo de Energía	32W
Presión de Ajuste	0 - 240mmHg $\pm$ 15%
Rango de Tiempo	0 - 30 min
Dimensiones	330(W) x 180(D) x 230(H)mm
Peso	2.5kg (el cuerpo solamente)

- Los accesorios opcionales se pueden adquirir en el vendedor local del producto.  
Por favor, asegúrese de que es un accesorio producido por DAESUNG MAREF regularmente.  
Si los accesorios no son producidos por DAESUNG MAREF, pueden causar un rendimiento anormal, duración o mal funcionamiento, y no se proporcionará el servicio de reparación de la garantía.

### 3 - 3 Apariencia y Nombres y Funciones

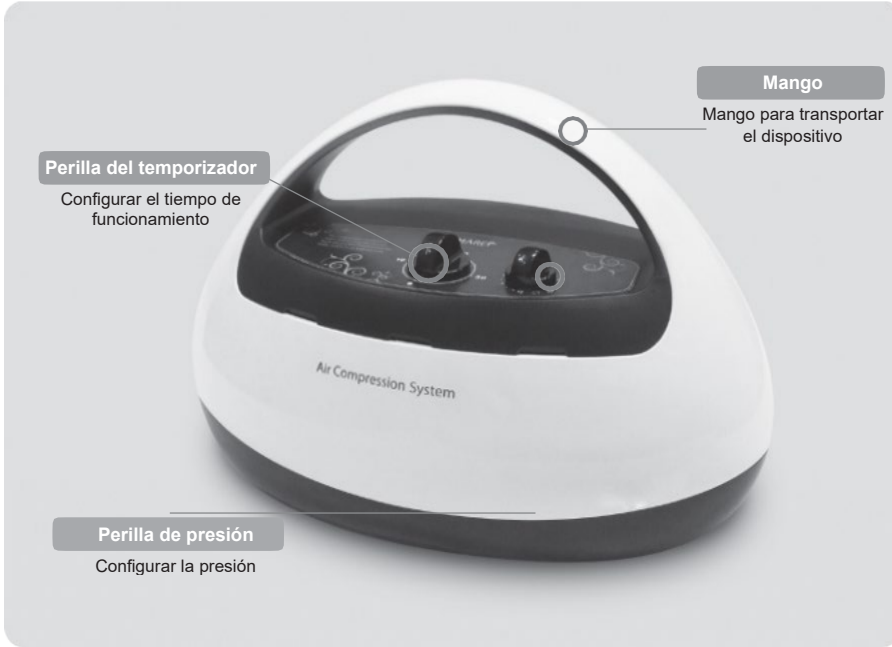

**Toma de aire**

Enchufe para la conexión de la tubería de aire



**Interruptor de encendido/apagado**

Interruptor de encendido/apagado


**Conector de código AC**

# 4


## Descripción del

### 4 - 1 Paquete del Dispositivo

#### 4-1-1. Conjunto básico

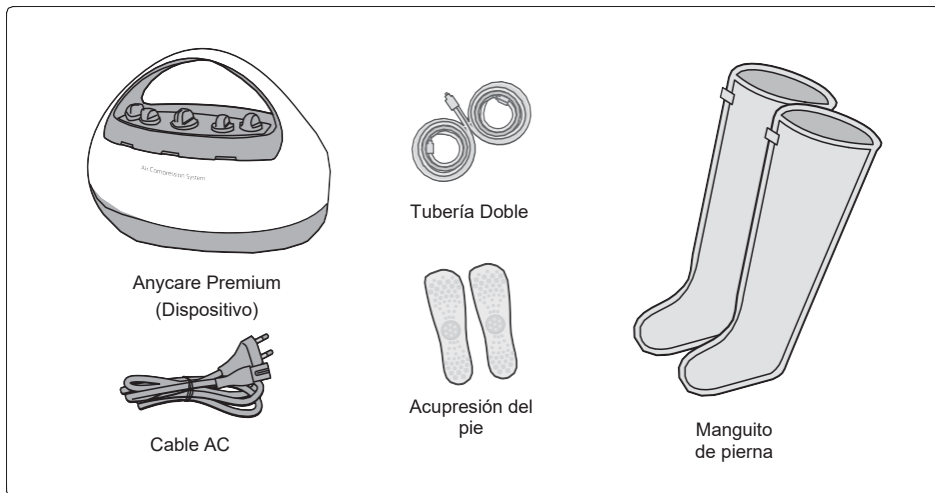

#### 4-1-2. Accesorios

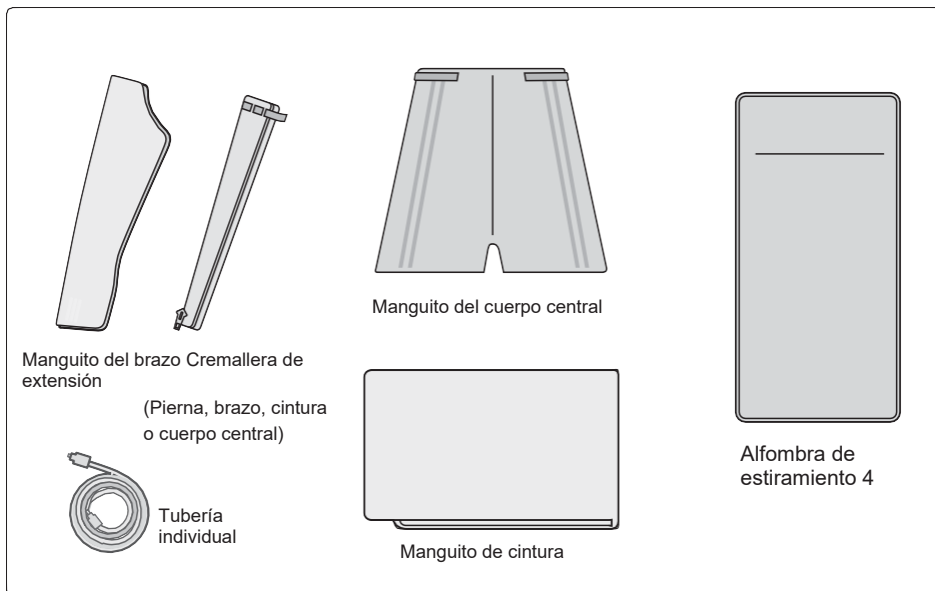



## 4 - 2 Especificaciones del Dispositivo

Artículos	Especificaciones
Modelo	Anycare Premium
Tipo de Protección	Clase II
Tensión Nominal	AC220 - 240V, 50/60Hz
Consumo de Energía	32W
Presión de Ajuste	0 - 240mmHg $\pm$ 15%
Rango de Tiempo	0 - 30 min
Dimensiones	330(W) x 180(D) x 230(H)mm
Peso	2.5kg (el cuerpo solamente)

- Los accesorios opcionales se pueden adquirir en el vendedor local del producto.  
Por favor, asegúrese de que es un accesorio producido por DAESUNG MAREF regularmente.  
Si los accesorios no son producidos por DAESUNG MAREF, pueden causar un rendimiento anormal, duración o mal funcionamiento, y no se proporcionará el servicio de reparación de la garantía.

## 4 - 3 Apariencia y Nombres y Funciones



**Toma de aire**

Enchufe para la conexión de la tubería de aire



**Interruptor de encendido/apagado**

Interruptor de encendido/apagado

**Conector de código AC**

### \* Información de los accesorios

	Nombres	Tamaño	Ref.No.
MANGUITO GENERAL	MANGUITO DE PIERNA	L	4LAGL5A
		XL	4LAGX40
		XXL	4LAGY00
	MANGUITO DE BRAZO	F	4AAGF3A
	MANGUITO DE CINTURA	F	4WAGF1A
	MANGUITO DEL CUERPO CENTRAL	F	4SAGF5A
	ALFOMBRA DE ESTIRAMIENTO 4	F	4MDRF00
CREMALLERA DE EXTENSIÓN	EXT. DE PIERNA. CREMALLERA	L	4ELGL02
		XL	4ELGX01
		XXL	4ELGY00
	EXT. DE BRAZO. CREMALLERA	F	4EAGF02
	EXT. DEL CUERPO CENTRAL. CREMALLERA	F	4ECGF01
OTROS	TUBERÍA INDIVIDUAL	-	1000370
	TUBERÍA DOBLE	-	1000380
	TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN	-	100050A

※ Cremallera de extensión (accesorio a la venta por separado)

- Cuando un manguito es pequeño para usar, se recomienda utilizar una cremallera de extensión adecuada a cada manguito.
- Abra la cremallera del manguito hasta el final y conecte la cremallera de extensión.  
La anchura del manguito se amplía hasta unos 10 cm conectando la cremallera de extensión.

## 5



### Uso y procedimientos del dispositivo

#### 5 - 1 Configuración y uso

- 1) Enchufe el cable de CA al dispositivo.
- 2) Enchufe la tubería de aire al dispositivo. (Enchúfelo completamente para evitar fugas de aire)



- 3) Conectar la tubería de aire a los manguitos.

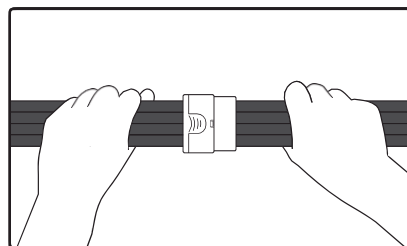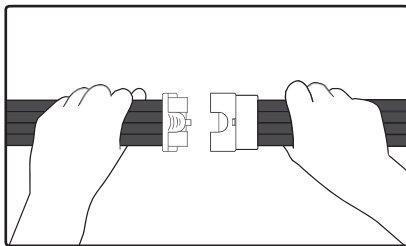

- Repite el inflado y desinflado de cada cámara secuencialmente por orden de pie > pantorrilla > rodilla > muslo. Debe confirmar que este orden se repita correctamente desde el pie hasta el muslo.

- ▷ En caso del manguito del Brazo:  
mano > codo > antebrazo > hombro
- ▷ En caso de manguito para la cintura: abdomen > cintura > pelvis > caderas

(Utilice una tubería individual cuando lleve un manguito)

(Utilice una tubería doble cuando lleve un cuerpo central o dos manguitos)

4) Utilice los manguitos que el usuario quiera usar.

- El usuario puede sentirse más cómodo llevando la ropa fina en lugar de la piel desnuda
  - Suba la cremallera completamente para evitar que se rompa la cámara de los manguitos.
  - Tenga cuidado de que no quede atrapada la tela o el vello corporal en la cremallera.
- ※ Por favor, consulte la página 21.

5) Accione el interruptor de encendido detrás del dispositivo.



6) Ajustar el tiempo y la presión.

- Podría causar un daño físico al utilizar el compresor con la presión alta en el primer uso. Pruebe el compresor con una presión más baja durante 10 minutos en el primer uso y luego aumente la presión y el tiempo de funcionamiento gradualmente.

- ※ Anycare se controla con 1 perilla de control de presión para controlar toda la presión. Anycare Premium puede controlar la presión de cada cámara con 4 perillas de control de presión diferentes.


7) Si el usuario quiere detener la operación, por favor ponga la perilla de control de tiempo en cero.

※ mmHg → hPa

mmHg	hPa	mmHg	hPa	mmHg	hPa
25		19050	1373	1705	2373
		5	0	0	0
35	47	110	147	185	247
	53	5	3	0	3
45	60	120	160	195	260
	67	5	7	0	7
55	73	130	173	205	273
		5	0	0	0
65	87	140	187	215	287
	93	5	193	0	293
75	100	150	200	225	300
	7	5	7	0	7
85	113	160	213	235	313
90	120	165	220	240	320


## 5 - 2 Tamaño del manguito y de la cremallera

### Dimensiones del manguito de pierna

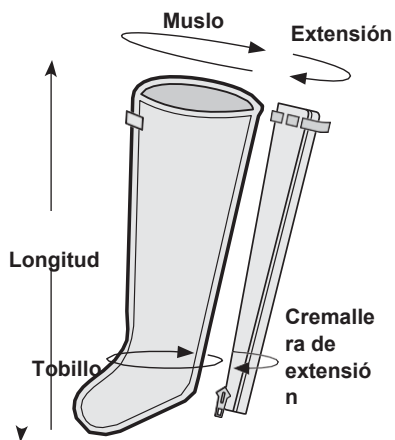


Tamaño	Muslo (+extensión)	Tobillo (+extensión)	Longitud
L	62 cm (72 cm)	41 cm (48 cm)	74cm
XL	75 cm (85 cm)	43 cm (50 cm)	79cm
XXL	76 cm (86 cm)	46 cm (53 cm)	94cm

### Dimensiones del manguito del brazo

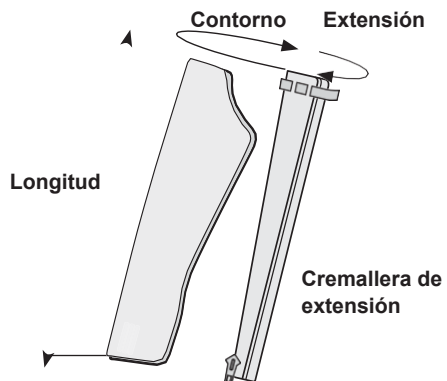


Tamaño	Contorno (+extensión)	Longitud
Libre	50 cm (60 cm)	88cm

### Dimensiones del manguito de cintura

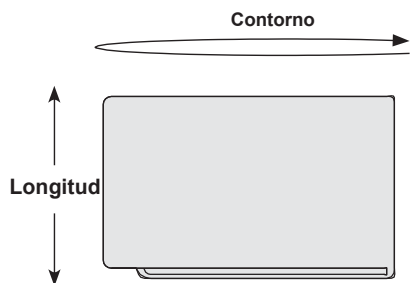


Tamaño	Contorno	Longitud
Libre	122cm	38cm

### Dimensión del manguito del cuerpo central

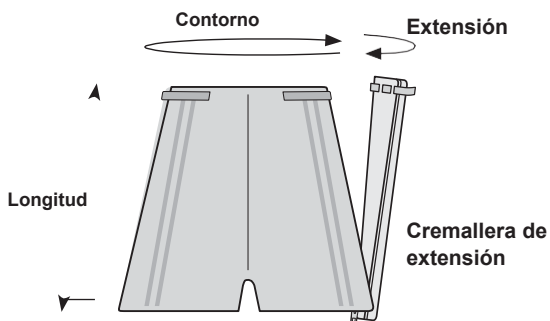

Tamaño	Contorno (+extensión)	Longitud
Libre	108cm (118cm)	74cm

### Dimensión del manguito de la estera de estiramiento 4

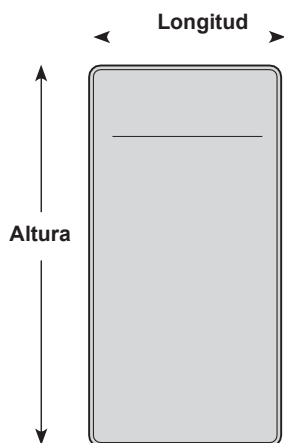

Tamaño	Longitud	Altura
Libre	60cm	100cm



## 6


## Resolución de problemas

## 6 - 1 Solución de problemas Generales

No	Problema	Causa	Solución
1	No hay energía eléctrica	Error de conexión a la red eléctrica	Comprobar que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente
2	Encendido pero no funciona	Error de alimentación	Apague y encienda el dispositivo
3	Ruidoso durante el funcionamiento	Condición de ajuste	Comprobar que el dispositivo está instalado en forma horizontal
			Comprobar que no haya nada encima o debajo del dispositivo
4	No hay aire en la tubería	Error de conexión de la tubería o tubería doblada	Comprobar que la tubería está correctamente insertada en el dispositivo
			Comprobar que la tubería no está doblada
5	El aire pasa por la tubería en un orden incorrecto	Fallo de conexión	Comprobar que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente




## 6 - 2 Otros fallos

No	Problema	Causa	Solución
1	Sale poco aire	Tubería dañada	Contacte con la tienda donde compró el dispositivo.
		Enchufe de la tubería de aire dañado	
		Componentes internos rotos	
2	No funciona cuando está encendido	Componentes internos rotos	Contacte con la tienda donde compró el dispositivo.

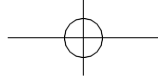

MEMO

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for writing a memo.

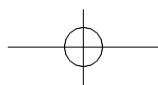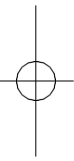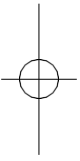

## Garantía

Se agradece mucho el uso de nuestro dispositivo. Nosotros, Daesung Maref estamos haciendo lo mejor para aumentar la calidad de nuestros dispositivos.

※ No podemos ser responsables de cualquier defecto ocurrido por el uso descuidado del usuario o en el caso de los siguientes, aún cuando en el período de garantía:

1. El trastorno se produzca por un fuerte impacto.
2. En caso de que el usuario repare o reproduzca la parte interna arbitrariamente.
3. En caso de utilizar el dispositivo en un lugar prohibido.
4. En caso de ir en contra de nuestro <Cómo usar>
5. El manguito sea artículo de consumo.

Sistema de Compresión de Aire

Dispositivo Anycare / Anycare

Garantía


Premium: 1 año

**DS MAREF**  
DAESUNG MAREF CO.,LTD.



RND-R-MUM-103-05-01-01 (Rev.4)

# HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

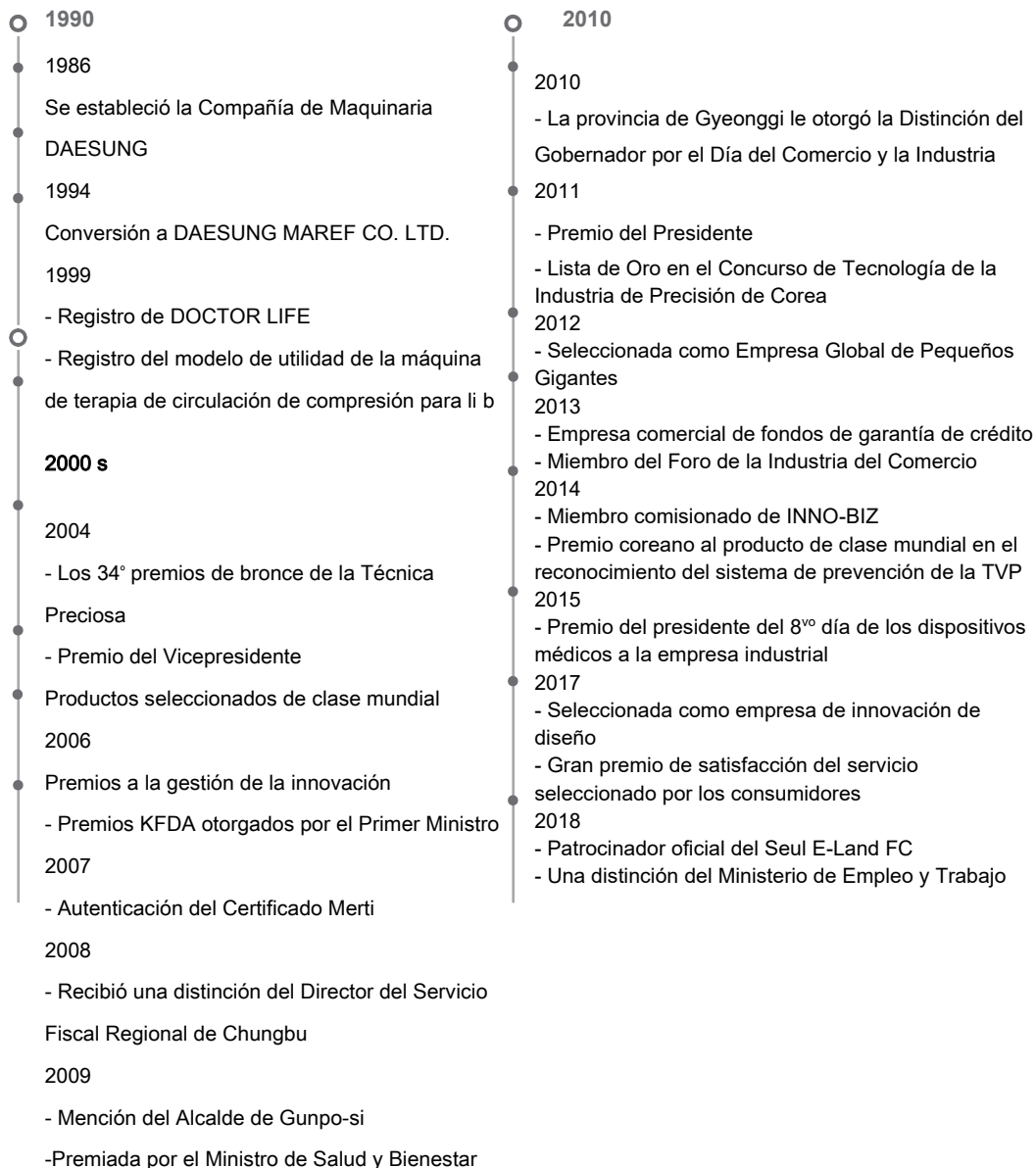



**DS MAREF**  
DAESUNG MAREF CO.,LTD.

DAESUNG MAREF CO.,LTD.  
298-24, Gongdan-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea  
Tel : +82-31-459-7211 | Fax : +82-31-459-7215  
E-mail : [info@dsmaref.com](mailto:info@dsmaref.com) | <http://www.dsmaref.com>

