

MODALIDAD DE USO Y CONSERVACIÓN

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

- Antes del uso comprobar la integridad y la fecha de caducidad del producto (Gima no se hace responsable de una conservación o del mal uso del producto).
- La bolsa debe colgarse siempre en un soporte, colocada por debajo del nivel de la vejiga urinaria para evitar el reflujo, en posición vertical y con el tubo de aducción hacia arriba.
- El modelo de saco para pierna debe fijarse a la pierna mediante bandas elásticas, colocándola por debajo del nivel de la vejiga, para evitar el reflujo
- Durante el uso, evite aplastar, pellizcar o colapsar el tubo para no interrumpir el flujo de orina hacia la bolsa.
- Evitar el contacto con disolventes químicos y la exposición a fuentes de calor durante la conservación.
- No manipular con utensilios cortantes o puntiagudos.
- Expulsar el aire que pueda haber en el interior de la bolsa antes del uso.
- Para garantizar el uso de todo el volumen de la bolsa evitar la presencia de aire durante el uso.
- Para los modelos dotados de grifo de descarga, verificar que el dispositivo está cerrado antes del uso.
- La reutilización de la bolsa puede generar un riesgo de infección.
- La bolsa debe ser sustituida antes de alcanzar el nivel máximo.
- Fije el conector firmemente a la sonda o al adaptador del pene.

INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

- Usar guantes de protección.
- Eliminar después del primer uso de acuerdo con las disposiciones vigentes de la ley.

	Fabricante	REF	Código producto
	Fecha de fabricación	LOT	Número de lote
	Dispositivo monouso, no reutilizable		Fecha de caducidad
	Distribuido por		Consultar las instrucciones de uso
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
	No estéril	MD	Producto sanitario
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.


ESPAÑOL

BOLSAS DE ORINA

USO PREVISTO

- Utilizar exclusivamente para la recogida y eliminación de la orina.
- No utilizar como instrumento de medición ni para pruebas de laboratorio.
- Las indicaciones del volumen son aproximativas.

REF	
800160	(GIMA 28688)
800161	(GIMA 28690)
800162	(GIMA 28689)
800163	(GIMA 28692)
802220	(GIMA 28694)
802221	(GIMA 28691)
802222	(GIMA 28695)
802223	(GIMA 28693)
804257	(GIMA 28707)
804258	(GIMA 28708)

 **TECNOCLINIC, S.A.**
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km. 2.300 P.I.
La Llanera 08208 Sabadell (Barcelona) - Spain
Made in Spain

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

