

ES - GIMA BRUSH: Cepillo para extracción citológica endocervical

El cepillo está realizado con cerdas de nylon sujetas mediante un elemento metálico. El mismo está montado en una varilla de material plástico. Indicado para la extracción de células del canal endocervical uterino. El dispositivo debe ser utilizado exclusivamente por personal cualificado, especializado y autorizado para efectuar la extracción de muestras para Papanicolaou.

No exponer a fuentes de calor, Extraer el dispositivo de su envase inmediatamente antes del uso, Antes del uso, observar el dispositivo para controlar su integridad.

USO ESPECIFICO: GIMA BRUSH sirve para la extracción de las células que se exfolian en el canal endocervical uterino

INDICACIONES: Es indicado aún en presencia de canal cervical estenótico

CONTRAINDICACIONES: Es contraindicada durante el embarazo

MODO DE EMPLEO: Introducir el espéculo en la vagina para acceder al cuello del útero, Extraer Endobrush de su envase, teniéndolo por la varilla, Introducirla lentamente en el canal cervical, Efectuar una rotación completa, Extraer lentamente, refregar y girar las cerdas repetidas veces sobre el vidrio cubreobjetos.



Biogyn S.r.l. Via volta, 14 – 41037 Mirandola Italy

Distributor: Gima S.p.a. Via Marconi, 1 – 20060 Gessate Italy



REF

EBR2 S01

CE 0476

STERILE EO



MP 2005 002 rev08 del 07/21