



REF 20h  
00900.FU01

REF 5h  
00900.FST

www.led.it

ES 00900.FST - Filtro ULPA estandar (5h) - AZUL  
00900.FU01 - Filtro ULPA para SURTRON EVAC (20h) - ROJO



Verificar el estado del producto antes del utilizzo.  
Producto monouso. No reutilizable.  
No aspirar líquidos.  
El producto tiene que ser eliminado de acuerdo con los procedimientos para el control de los residuos hospitalarios.  
La conexiones tienen que ser efectuadas por personal entrenado.


El producto es compatible con el utilizzo de los evacuadores de humo SURTRON® EVAC (10200.10 - 10200.10/115V).

Para la conexión visualizar instrucciones de los evacuadores de humos SURTRON® EVAC.

**Datos Técnicos**

Tipo de filtro: ULPA con carbonos activos  
Eficiencia filtro: 99,999X%  
Diámetro partículas: 0,12 micron  
Diámetro del filtro: 22 mm  
Duración del filtro 00900.FST: 5 horas  
Duración del filtro 00900.FU01: 20 horas


LED SpA  
Via Selciatella 40  
04011 Aprilia (LT) - ITALY

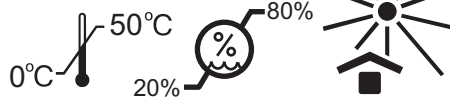

IT EN ES FR DE PT TR

IA00900-XXXAr2  
ed. 07/2013 2013 (C) LED SpA

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

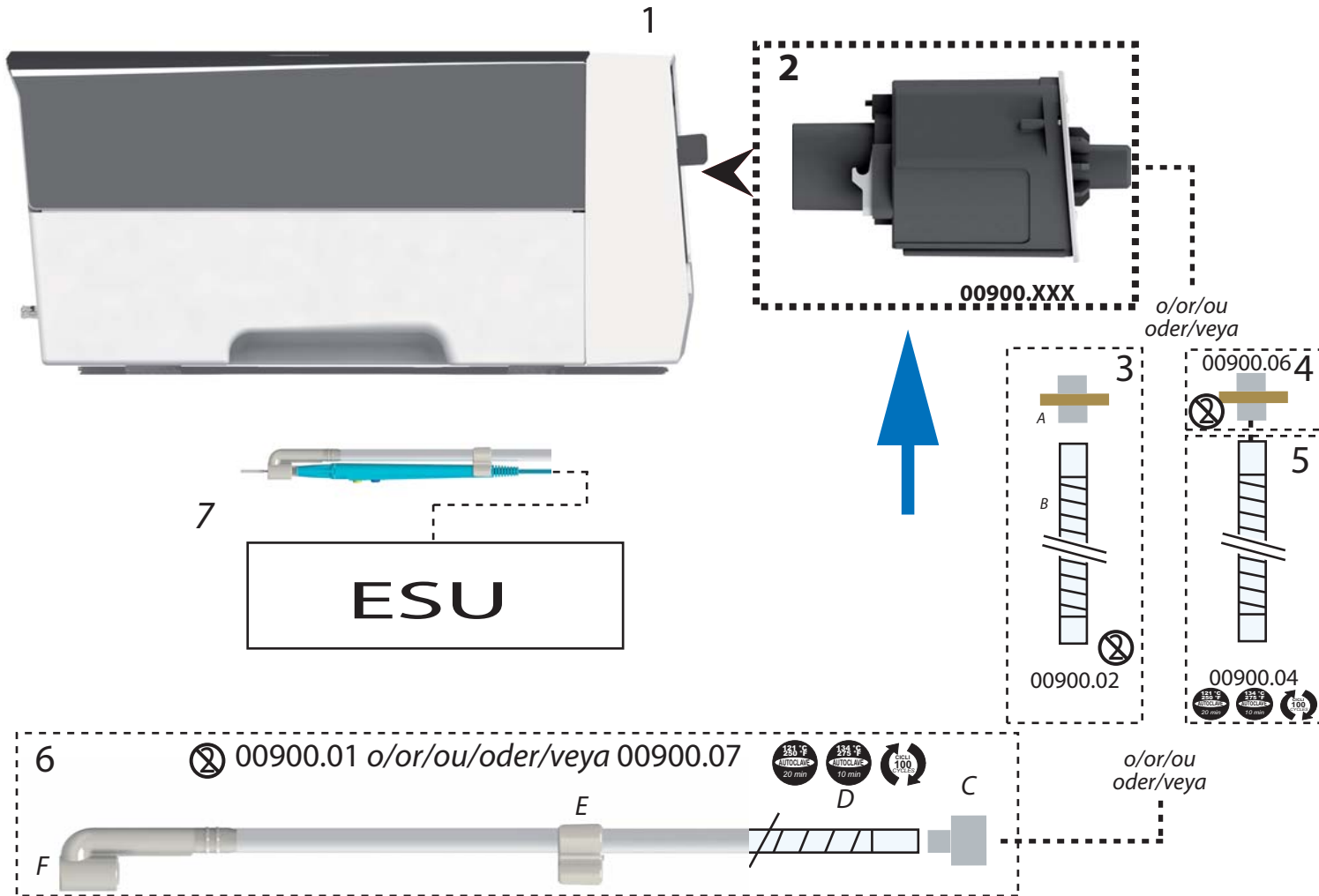

1 EVACUADOR DE HUMOS\* serie 10200.10 - 10200.10/115V  
2 FILTRO serie 00900.XXX  
3 KIT ASPIRACION (00900.02)\* - A Filtro - B Tubo dia. 22mm largura 2,4 mt  
4 Filtro dia. 22 (00900.06)\*  
5 Tubo autoclave dia. 22mm (00900.04)\*  
6 KIT ASPIRACION MANGO (00900.01 o 00900.07)\* - C Adaptador 10mm/22mm - D Tubo Largura 1,5 mt- E Clip ara fisaje tubo sobre el mango - F Adaptador para mango  
7 Particular del mango\* con 00900.01 o 00900.07, el mango tiene que ser conectado a vuestra unidad electrocirurgica (ESU)\*. \*no inclusio



REF 20h  
00900.FU01

REF 5h  
00900.FST



LED SpA  
Via Selciatella 40  
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-XXXAr2  
ed. 07/2013  
2013 (C) LED SpA