

# **FOOTSWITCH** UDI  8 0 3 3 6 3 8 3 2 0 8 2 2

REF 00305.03

**IP 67  
WATER PROOF**

1-2 R1K5  
3-4 cut  
3-5 coag

**EXPLOSION  
PROOF**



**MADE IN ITALY**



*cable 5 mt*

**LED SpA**  
Via M.T.Cicerone 138  
03100 Frosinone (LT) - ITALY



50°C  
-10°C  
10%  
85%

**IT EN ES FR DE PT PL**

IA00305-03b\_ML1  
ed. &&S %' 2022 (C) LED SpA

**(ES) DOBLE PEDAL ESTANCO**

El producto es concebido para el mando a pedal de unidades electronicas compatibles.

Verificar el estado del producto antes del utilizzo. Deshacerse de los productos defectuosos.

El presente producto es compatible con las versiones de equipos que lo preveen, consultar las instrucciones de la unidad.

La conexiones tienen que ser efectuadas por personal entrenado.

Instalación:

- insertar el conector de productos en el conector de la unidad electrónica específica , prestando atención a la dirección de inserción (fig. A -parte 1-2).
- para fijar el producto en la unidad girar la contera (fig. A -parte 3).

Encender la unidad para efectuar las pruebas de funcionamiento activando el pedal. (fig. A -parte 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



**(ES) PISAR = ACTIVACIÓN / SIN PISAR = NO ACTIVACIÓN  
AMARILLO = CORTE / AZUL = COAGULACIÓN**