

FOOTSWITCH UDI 8 03 36 38 32 07 30

REF 00305.04 L-E cut N-E coag IP 67 WATER PROOF 1



cable 5 mt
LED SpA
Via M.T.Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY

EXPLOSION PROOF AP MD
CE MADE IN ITALY
-10°C 50°C 85% 10%

IT EN ES FR DE PT PL IA00305-04W_ML1 ed. &68 %' 20'' (C) LED SpA

(ES) DOBLE PEDAL ESTANCO (300-400)

El producto es concebido para el mando a pedal de unidades electronicas compatibles.

Verificar el estado del producto antes del utilizo. Deshacerce de los productos defectuosos.

El presente producto es compatible con las versiones de equipos que lo preveen, consultar las instrucciones de la unidad.

La conexiones tienen que ser efectuadas por personal entrenado.

Instalación:
- insertar el conector de productos en el conector de la unidad electrónica especifica , prestando atención a la dirección de inserción (fig. A -parte 1-2).
- para fijar el producto en la unidad girar la contera (fig. A -parte 3).

Encender la unidad para efectuar las pruebas de funcionamiento activando el pedal. (fig. A -parte 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(ES) PISAR = ACTIVACIÓN / SIN PISAR = NO ACTIVACIÓN
AMARILLO = CORTE / AZUL = COAGULACIÓN