



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



# GIMA

**BARELLA COMPLETAMENTE AUTOMATICA  
CON POSIZIONI VARIABILI  
FULL AUTOMATIC STRETCHER WITH VARIED POSITIONS  
CIVIÈRE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE À POSITIONS VARIÉES  
VOLLAUTOMATISCHE VERSTELLBARE KRANKENTRAGE  
CAMILLA TOTALMENTE AUTOMÁTICA  
CON POSICIONES VARIADAS  
MACA TOTALMENTE AUTOMÁTICA COM VÁRIAS POSIÇÕES  
ΠΛ'ΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΟΡΕΪΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Θ'ΕΞΕΩΝ ΠΛ'ΗΡΩΣ  
Θ'ΕΞΕΩΝ**

نقالة أوتوماتيكية بالكامل مع أوضاع متغيرة

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπισώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρισκείτε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.

## GIMA 34057



**Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd**

No.999 Hongqi Road, Changyinsha  
Modern Agricultural Demonstration Area,  
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China  
Made In China



**TD010131F**



**SUNGO Europe B.V.**

Fascinatio Boulevard 522, Unit 2909 ,1.7VA  
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 20060 - 1 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



### I. Parámetros técnicos

- Tamaño (L\*W\*H):  
Tamaño máximo: 89\*56\*198 (cm)  
Tamaño mínimo: 33\*56\*198 (cm)
- El alcance de la altura de aterrizaje (4 grados):  
93 cm/82 cm/70 cm/35 cm
- Carga soportada: 159 kg
- Peso neto: 40 kgs  
Peso bruto: 46kgs
- Ángulo máximo de inclinación hacia delante:  
11 grados
- Ángulo máximo de inclinación hacia delante:  
25degrees

### II. Método de funcionamiento

- Ponga la alfombra de esponja en la camilla y fije las correas. De esta forma, el paciente se sienta seguro y cómodo.
- Fijación o separación de la camilla de la camilla de carga: al fijar la camilla a la camilla de carga, ponga la camilla encima de la camilla de carga, empuje la camilla hacia adelante, las ruedas delanteras se fijarán, al igual que las traseras. Una vez fijada, la camilla se bloqueará automáticamente. Cuando la camilla se desprenda de la camilla de carga, presione el botón de la bola roja, tire de la camilla para sacarla de la fijación y dejarla suelta. La camilla puede convertirse en silla de ruedas.
- Fijación o separación de la camilla desde la ambulancia: ① cuando la camilla de carga entre en el tablero del carro, tire del asa y suéltela después de que las patas delanteras y las traseras se plieguen. Empuje la camilla de carga a la fijación para hacerla fija. (esta camilla de carga está dotada de fijación). ② Para sacar la camilla de carga de la ambulancia, desbloquee la fijación, tire de la camilla, cuando las piernas de la camilla de carga estén fuera de la ambulancia, simplemente tire del asa, de manera que las patas traseras se conviertan en el reemplazo; cuando la camilla de carga está fuera de la ambulancia, las patas delanteras se convierten automáticamente en el reemplazo.
- Barandilla: fijación automática de inserción, si se deja abajo, agarre el mango y tire de él fuera de la fijación.
- Soporte IV: ① Levante el poste, y empújelo hacia adelante para hacerlo fijo. Efectúe la operación contraria para hacerlo bajar. ② La altura de los soportes IV se puede ajustar: gírelos en sentido contrario al de las agujas del reloj, suelte la tuerca y saque el polo de los soportes IV. Para fijar los soportes

IV, basta ajustarlos a una altura más alta o más baja, y gire la tuerca en sentido horario.

- El ajuste de la camilla: la camilla de carga está dotada de asas en los dos lados, tire de las asas, la camilla de carga se puede ajustar a 4 niveles y doblar hacia adelante y hacia atrás en función de las necesidades prácticas. Mientras tanto, la altura de la camilla también se puede regular ajustando al mismo tiempo las asas en cada lado.

### III. Alcance de la instalación

Puede separarse y es adecuada para el sistema de emergencia. Se puede utilizar para el coche de la ambulancia; se usa sobre todo en algunos. En las áreas que presentan dificultad, como los ascensores y los pasillos estrechos, la camilla puede convertirse en una silla de ruedas.

### IV. Mantenimiento

- Manténgala limpia, evitando también la formación de óxido.
- Asegúrese de que todas las partes se ajustan firmemente.

### V. Preste especial atención

Cuando el paciente deba ser trasladado, asegúrese de cerrar el seguro, modifique y bloquee las correas.

### VI. Almacenamiento y transporte

- Este producto debe mantenerse en condiciones de sequedad y antioxidación.
- Puede ser transportado por vehículos tradicionales.
- Cuando deba almacenarla o transportarla, apílela como se muestra en el embalaje; está prohibido ponerla al revés.

### VII. Embalaje y accesorios

- Esta camilla va embalada dentro de una caja de cartón como un todo.
- Accesorio : certificado de elegibilidad así como papel de iluminación.

### CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF	Código producto	LOT	Número de lote		Consultar las instrucciones de uso
	Fabricante		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 745/2017		Conservar al amparo de la luz solar
	Fecha de fabricación		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Conservar en un lugar fresco y seco
	Producto sanitario		Representante autorizado en la Comunidad Europea		Identificador de dispositivo único
	Importado por:				