



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

Italia: tel. 199 400 401 – fax. 199 400 403

Export: tel. +39 02 953854209/221/225 – fax. +39 02 95380056

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Tiras de tablillas acolchas para dedos

MANUAL DE USO



ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.



REF 04SD000A (Gima code 34120) – 04SD000B (Gima code 34121) - 04SD000C (Gima code 34122)



Megapharma Ospedaliera s.r.l.
Via Asolana, 26/b · I-31017 Crespano del Grappa (TV)
Tel. +39 0423 538746 · Fax. +39 0423 538748

MODALIDAD DE EMPLEO:

- 1 – Determinar la longitud necesaria, y obtenerla cortando la tablilla. (la medida se puede obtener doblando la longitud entre el metacarpo y la punta del dedo a inmovilizar);
- 2 – Colocar una extremidad de la tablilla en el dorso de la mano, recorrer toda la longitud del dedo luego plegarla de modo que la otra extremidad llegue a la palma;
- 3 – Si es necesario plegar el dedo a fin de obtener la posición de las articulaciones deseada; 4 – Asegurar la tablilla con un vendaje.

ADVERTENCIAS: Usar bajo control médico.

MATERIAL:

Aluminio, estireno-butadieno 100% adhesivo.

MEDIDAS:

A 50 x 1,5 cm, B 50 x 1,9 cm, C 50 x 2,4 cm. Espesor 1,2 mm.

INDICACIONES:

Inmovilización y protección de las falanges y de las articulaciones interfalangeas, en caso de fractura.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar seco, no expuesto a la intemperie y a la luz del sol.