

E-La tabla para fracturas BOSTON es resistente y ligera al mismo tiempo. Con sus dimensiones es utilizable para las fracturas o lesiones a los brazos y las piernas. Sobre la tabla de fractura estan ilustradas los distintos modos d'empleo. La tabla es transparente a los rayos X, lavable y desinfectable, revestida en material atoxico. La tabla **BOSTON** puede ser reutilizada varias veces con tal que sean cumplidas las reglas de limpieza manutencion y conservacion indicadas. Sin embargo para mas seguridad, es aconsejable de no reutilizar la tabla en el caso de contacto con liquidos corporeos y en particular con la sangre. Conservar en un lugar seco, no polvoriento, lejos de fuentes de calor y de los rayos del sol. Proteger sucesivamente con un envoltura en caso de posible reutilizacion. Lavar con agua o liquido bactericida y secar.