



## INSTRUCCIONES DE USO

### **NOMBRE DEL PRODUCTO: INDICADOR DE VAPOR MULTI-VARIABLE TIPO 4 (IS2401)**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Las Tiras Indicadoras de Vapor Multi-Variable Tipo 4 de PMS Steritest están diseñadas para su uso en esterilizadores de vapor de pre-vacío que funcionan a 134 °C o 121 °C.

Después de la exposición a la esterilización por vapor, el indicador químico proporcionará una confirmación visual precisa mediante el cambio de color, indicando que se cumplieron las condiciones de esterilización.

Los indicadores de Emulación de Vapor Multi-Variable Tipo 4 de PMS Steritest están clasificados como Tipo 4 según la Norma EN ISO 11140-1.


Durante la exposición a la esterilización por vapor a 134 °C o 121 °C, el color del indicador cambiará de **Azul** a **Gris/Negro**.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

- Coloque la Tira Indicadora Química PMS Steritest en cada paquete, bolsa despegable o bandeja a ser esterilizada por vapor. La tira debe colocarse en el lugar del paquete que se considere más difícil de alcanzar por el vapor.
- Procese el paquete como de costumbre en un esterilizador de vapor.
- Al final del ciclo de esterilización, compruebe que el indicador ha cambiado de color y se haya tornado a gris/negro.
- Si el cambio de color no es visible o no es uniforme, las condiciones de esterilización pueden ser inadecuadas y los artículos deben volver a procesarse con tiras indicadoras nuevas/sin procesar.
- Los productos almacenados en las condiciones recomendadas tienen una vida útil de tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
- La fecha de fabricación, la fecha de caducidad y el número de lote están impresos en la caja del producto.
- No reutilice las Tiras Indicadoras Químicas usadas.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

- Almacenar a una temperatura máxima de 35 °C y una humedad máxima del 70 %RH.
- Las Tiras Indicadoras Químicas deben mantenerse alejadas del calor directo, la luz solar y el exceso de humedad.

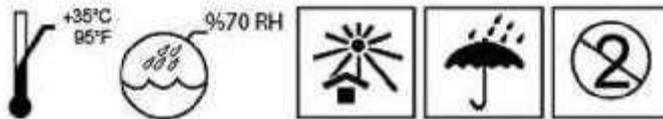

**PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş**  
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad.  
No:2 Huzurkent/Mersin/TURKEY  
Teléfono: +90 324 238 7042 | Fax: +90 324 238 6549  
pms@pmsmedikal.com | [www.pmsmedikal.com](http://www.pmsmedikal.com)