



INSTRUCCIONES DE USO

NOMBRE DEL PRODUCTO: INDICADOR DE EMULACIÓN DE VAPOR TIPO 6 (IS2601)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Las Tiras Indicadoras de Emulación de Vapor Tipo 6 PMS Steritest estn diseadas para su uso en esterilizadores de vapor de pre-vaco como indicador de verificacin de ciclo funcionando a una condicin de funcionamiento de 134 C – 3.5 min. o 121 C – 15 min.

Despus de la exposicin a la esterilizacin por vapor, el indicador qumico proporcionar una confirmacin visual precisa mediante el cambio de color, indicando que la presencia o ausencia de parmetros especficos de tiempo y temperatura durante un ciclo de esterilizacin por vapor.

Los indicadores de Emulacin de Vapor Tipo 6 de PMS Steritest estn clasificados como Tipo 6 segn la Norma EN ISO 11140-1.

Durante la exposicin a la esterilizacin por vapor a 134 C o 121 C, el color del indicador cambiar de **Azul** a **Lila**.

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque la Tira Indicadora Qumica PMS Steritest en cada paquete, bolsa despegable o bandeja a ser esterilizada por vapor. La tira debe colocarse en el lugar del paquete que se considere ms difcil de alcanzar por el vapor.
- Procese el paquete como de costumbre en un esterilizador de vapor.
- Al final del ciclo de esterilizacin, compruebe que el indicador ha cambiado de color y se haya tornado a Lila.
- Si el cambio de color no es visible o no es uniforme, las condiciones de esterilizacin pueden ser inadecuadas y los artculos deben volver a procesarse con tiras indicadoras nuevas/sin procesar.
- Los productos almacenados en las condiciones recomendadas tienen una vida til de tres (3) aos a partir de la fecha de fabricacin.
- La fecha de fabricacin, la fecha de caducidad y el nmero de lote estn impresos en la caja del producto.
- No reutilice las Tiras Indicadoras Qumicas usadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar a una temperatura mxima de 35 C y una humedad mxima del 70 %RH.
- Las Tiras Indicadoras Qumicas deben mantenerse alejadas del calor directo, la luz solar y el exceso de humedad.



PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş

Mersin Tarsus Organize Sanayi Blgesi 12. Cad.

No:2 Huzurkent/Mersin/TURKEY

Telfono: +90 324 238 7042 | Fax: +90 324 238 6549

pms@pmsmedikal.com | www.pmsmedikal.com