



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

GIMA 39792

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante:
Medistar Instruments Co.
New Miana Pura East, Roras Road, Sialkot - Pakistan
Shams@medistarinst.com
Made in Pakistan

REF MI-78951

EC **REP** Lorcan & Fyon B.V.
Europalaan, 40, 3526KS Utrecht, Netherlands

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



LIMA DE PEDICURA DE PLÁSTICO


Descripción detallada del utensilio

Nombre: lima de pedicura de plástico y de doble cara, 23.5cm
Acabado: Plástico blanco.

Instrucciones de uso

La lima de pedicura está fabricada con plástico de poliestireno de alta resistencia al impacto. Se utiliza para eliminar el exceso de piel áspera y dura (para friccionar).

Composición química

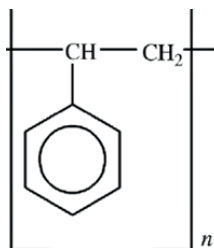

Indicaciones de uso



- Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- El dispositivo está destinado al uso por profesionales cualificados.

Limpieza/desinfección y conservación

Los instrumentos recubiertos de polvo Medistar / papel no son autoclavables, pero pueden ser limpiados / desinfectados con desinfectantes como Endo Star (desinfectante para instrumentos de alto nivel) o con cualquiera otra solución desinfectante/esterilizante de la mejor calidad. 20ml de Endo Star en 1 litro de agua corriente (dilución 2%) necesitan 30 minutos de inmersión, 30ml de Endo Star en 1 litro de agua corriente (dilución 3%) necesitan 15 minutos de inmersión.

Generalmente, los desinfectantes registrados en la agencia estadounidense para la protección del medio ambiente (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) necesitan 10 minutos de inmersión; el alcohol isopropílico y el alcohol etílico necesitan 5 minutos.

El tratamiento repetido tiene efectos mínimos sobre la duración del instrumento. El final de la vida útil de los instrumentos quirúrgicos de metal está normalmente determinado por el desgaste y por los daños debidos al uso quirúrgico corriente.

Los instrumentos deben almacenarse en un lugar protegido de la luz y la humedad, lejos de la luz directa del sol; deben mantenerse en un lugar seco, a una temperatura entre -10°C y 40°C.

REF	Código producto	LOT	Número de lote
	Conservar en un lugar fresco y seco		Conservar al amparo de la luz solar
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Consultar las instrucciones de uso
	Límite de temperatur		No estéril
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Fecha de fabricación

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.