




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI - PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS - SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO – 7 UNIDADES - KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO EM AÇO - 7 PEÇAS

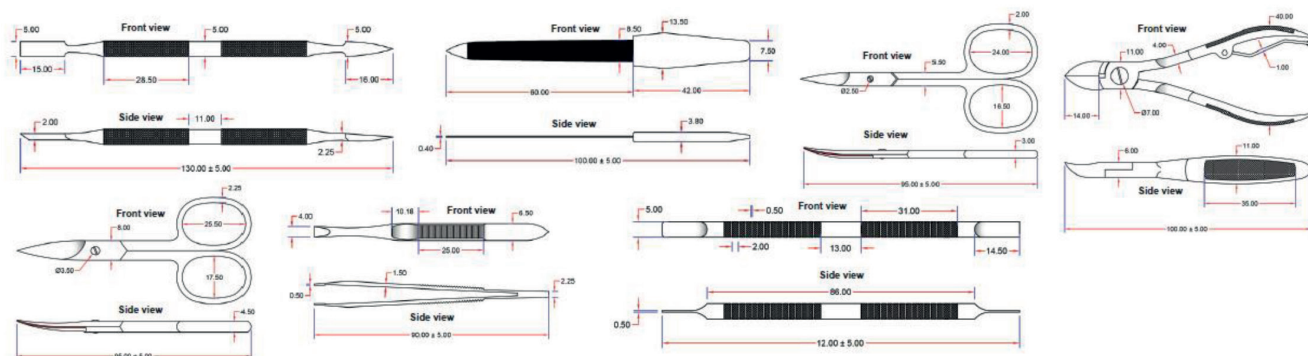

Descripción del utensilio

Nombre: empujador y limpiador de cutículas, 13 cm

Nombre: lima de uñas con mango de plástico blanco, 10 cm

Nombre: tijeras de cutículas, 9,5 cm

Nombre: alicate cortauñas, 10 cm

Nombre: tijeras de uñas 9,5 cm

Nombre: pinzas, 9 cm

Nombre: empujador de cutículas de dos extremos, 12 cm

Indicaciones de uso

- Manténgalas fuera del alcance de personas que no estén bajo su control.
- Los utensilios deberán ser usados por una persona formada para ello.
- Exclusivamente para uso profesional. Desinfectar antes de usar.

Precauciones, restricciones, advertencias y cuidados especiales**Pautas para una limpieza adecuada**

La limpieza adecuada requiere jabón o detergente líquido, agua y un cepillo para fregar limpio y desinfectado para eliminar todos los desechos y residuos visibles.

Todos los elementos deberán frotarse con un cepillo limpio y desinfectado con agua corriente. Limpiar no es lo mismo que desinfectar; esto último comprende un paso completamente independiente de la limpieza.

Cada artículo se limpia de forma diferente. A menudo, esto depende del material con el que está fabricado el artículo y cómo se ha utilizado.

NOTA: se debe realizar una limpieza correcta del artículo antes de proceder con su desinfección. Todo artículo se debe enjuagar y secar cuidadosamente con un paño limpio o con una toallita de papel antes de introducirlo en un desinfectante.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12

IT - Indice dei simboli GB - Symbol index FR - Index des symboles
ES - Índice de símbolos PT - índice de símbolo DE - Symbolindex

	IT Codice prodotto GB Product code PT Código produto FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use PT Consulte as instruções de uso FR Consultez les instructions d'utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten ES Consultar las instrucciones de uso
	IT Non sterile GB Non-sterile PT Não estéril FR Pas stérile DE Nicht steril ES No estéril
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place PT Armazenar em local fresco e seco FR À conserver dans un endroit frais et sec DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES Conservar en un lugar fresco y seco
	IT Numero di lotto GB Lot number PT Número de lote FR Numéro de lot DE Chargennummer ES Número de lote

	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight PT Guardar ao abrigo da luz solar FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture PT Data de fabrico FR Date de fabrication DE Herstellungsdatum ES Fecha de fabricación
	IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community PT Representante autorizado na União Europeia FR Représentant autorisé dans la Communauté DE - Autorisierter Vertreter in der EG europäischen ES Representante autorizado en la Comunidad Europea

GIMA 39805

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante /
Fabricante / Hersteller:
Medistar Instruments Co., New Miana Pura East,
Ror as Road, Sialkot - Pakistan
Shams@medistarinst.com
Made in Pakistan

REF MI-78982

Lorcan & Fyon B.V.
Europalaan, 40, 3526KS Utrecht,
Netherlands

Importato da / Imported by / Importé par /
Importiert von / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

