



**GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

# BASTÓN LED


## Manual de uso

### ADVERTENCIA:

¡Asegúrese de leer toda la información y las instrucciones antes de usar!

- NO intente realizar el desmontaje de este equipo usted mismo.
- NO insertar agujas o ningún artículo afilado en la empuñadura.
- NO golpear el bastón en el suelo o cualquier superficie dura.
- SIEMPRE apague el interruptor antes de extraer las pilas.
- ASEGÚRESE de mantener el bastón alejado del fuego.
- **110kg** de capacidad máxima de peso.

## ESPECIFICACIÓN DE LA EMPUÑADURA

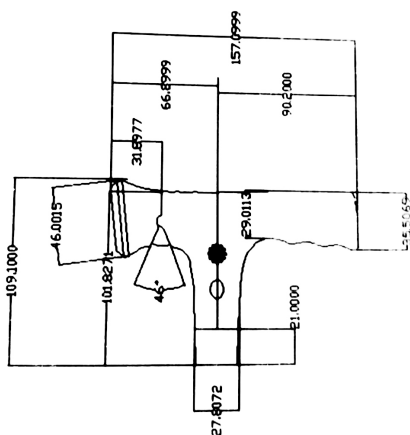

- 4 luces LED blancas ultrabrillantes de 5 φ.
- 2 luces LED intermitentes de advertencia ultrabrillantes de 5 φ.
- Función de sirena de 100 dB.
- Adjunto con una correa de mano.
- Disponible con bastón plegable o ajustable.


### REF GB-806 (GIMA 43050) GB-806 (GIMA 43052)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por  
**GIMA S.p.A.** - Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com


Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqu  par/Fabricado por:  
**Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd.** No.1, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County  
Ningbo 315614, China  
Made in China



## ENSAMBLADO

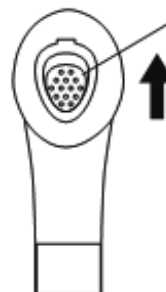

Levantar hacia arriba para abrir la tapa de la parte posterior.

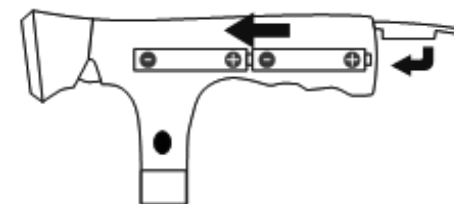


Colocar 2 pilas AAA en el interior de la empuñadura, luego bajar la tapa para cerrarla.

## FUNCIONES DE ENCENDIDO/APAGADO



### Bot n superior


- Pulsar una vez para encender las luces LED.
- Pulsar dos veces para activar las luces LED blancas y las luces LED rojas intermitentes de advertencia simult neamente.
- Vuelva a pulsar el bot n para apagar.

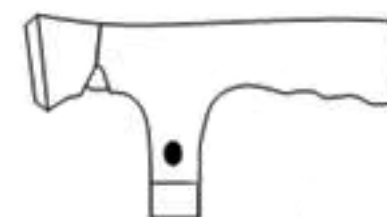

### Bot n Lateral

- Pulsar para iniciar el zumbador de advertencia.

## NOTA DE USO

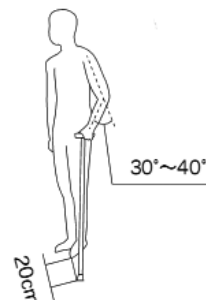

Mejor posici n de uso recomendada.



Bast n ajustable.  
10 posiciones de 78 a 100,5 cm.



**Eliminaci n:** El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos dom sticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminaci n de los aparatos por desguazar llev ndolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos el ctricos y electr nicos.

## CONDICIONES DE GARANT A GIMA

Se aplica la garant a B2B est ndar de Gima de 12 meses.