




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

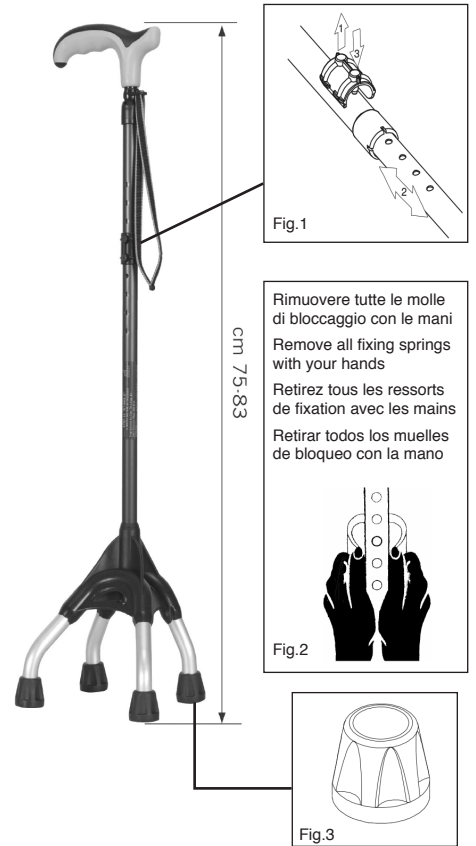

Rimuovere tutte le molle di bloccaggio con le mani
 Remove all fixing springs with your hands
 Retirez tous les ressorts de fixation avec les mains
 Retirar todos los muelles de bloqueo con la mano

ESPAÑOL

BASTÓN DE PASEO EN ALEACIÓN LIGERA

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

¡Este bastón no es un tetrápodo! Debe utilizarse como cualquier otro bastón y no debe confundirse con una ayuda adecuada para aumentar la estabilidad del paciente. La función de las 4 patas es una comodidad que sirve exclusivamente para permitir que el bastón se mantenga de pie por sí mismo cuando no se utiliza.

No usar nunca un dispositivo dañado.

INSTRUCCIONES DE USO

Procedimiento de regulación de la altura. (Fig.1)

1. Desbloquear el muelle de bloqueo. (Véase Fig. 2)
2. Regular la altura sacando de los tubos telescópicos.
3. Reposicionar el muelle de bloqueo.

ATENCIÓN

No usar herramientas para remover el muelle de bloqueo, podría dañarse. El muelles es difícil de retirar por razones de seguridad. (Fig. 2)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza: limpiar regularmente el mango con un jabón suave; no usar alcohol ni solventes.

Puntal: El puntal de apoyo a tierra (Fig. 3) está sujeto a desgaste; se recomienda sustituirlo periódicamente usando recambios originales OPO.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.



Peso Max. utente
 Max. user weight
 Poids maximal de l'utilisateur
 Peso Máx. usuario
100 kg

	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote		IT Fabricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario

REF 0767/B (43075)

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
 Via Bellini 33, Rastignano (Bologna - Italy)
 Made in Italy

