






GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

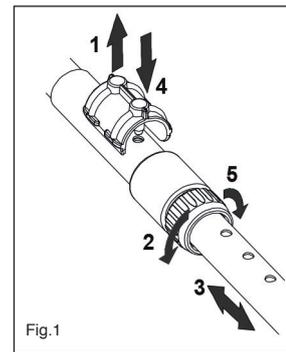

Rimuovere la molla di bloccaggio spingendo con entrambi i pollici sui lati.
Remove the spring clip by pushing with both thumbs on the sides.

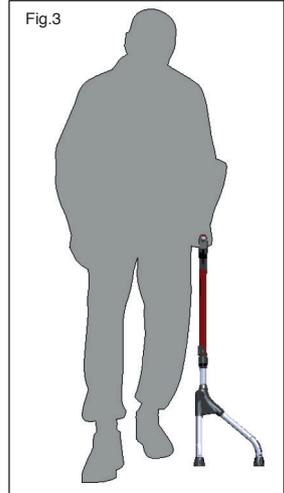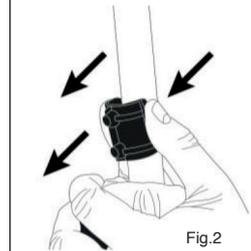

Peso Max. utente
Max. user weight
100 kg

	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Codice prodotto GB Product code		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture		IT Numero di lotto GB Lot number		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully
	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Dispositivo medico GB Medical Device		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place

ESPAÑOL

BASTONES DE 4 PATAS (TETRÁPODOS)

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

USO PREVISTO

Los bastones con 4 pies son **Dispositivos Médicos de Clase I** que sirven como apoyo para pacientes con problemas de deambulación que necesitan un bastón de apoyo que garantice una mayor estabilidad respecto a un bastón convencional. La modalidad de uso del bastón varía de persona a persona; es necesario, de todos modos, un adiestramiento mínimo del paciente por parte de personal médico o sanitario.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES

La modalidad de uso y regulación del bastón cambia según las condiciones específicas del usuario; para el primer uso es necesario que personal médico realice la regulación de la altura y se ocupe del adiestramiento para el uso.

Es necesaria la evaluación de idoneidad por parte de personal médico en el caso de personas con problemas psicomotrices o portadores de prótesis u órtesis en las extremidades inferiores. En ciertas personas un uso prolongado puede causar problemas en las articulaciones del brazo que utiliza el apoyo; si se advierten dolores en la mano, muñeca, codo u hombro se recomienda abandonar la ayuda y consultar con un médico.

No usar a contacto directo con los tejidos lesionados.

No usar NUNCA un dispositivo dañado.

REGULACIÓN DE LA ALTURA

Proceder siguiendo las fases en la fig.1:

1. Desconectar el muelle de bloqueo (ver nota en Fig.2)
2. Desbloquear el anillo de fijación
3. Regular la altura deslizando los tubos y llevándolos en correspondencia con los orificios
4. Reposicionar el muelle de bloqueo
5. Ajustar el anillo, atornillándola nuevamente.

Nota: No usar herramientas de ningún tipo para remover el muelle de bloqueo ya que podría dañarse.

USO CORRECTO

La dirección de uso del bastón es la que se indica en la figura 3. Para garantizar la función de estabilidad el usuario del bastón deberá caminar con pasos breves de modo que se **mantenga el bastón en apoyo en todos sus pies.**

ADVERTENCIAS

- Prestar atención a las superficies mojadas, deslizantes o inclinadas.
- Prestar atención al uso en peldaños de escaleras controlando que sea posible apoyar todo el pie en el peldaño.
- El apoyo no es adecuado para el uso en terrenos blandos o en superficies irregulares; usar en superficies planas.

REUTILIZACIÓN

El apoyo es reutilizable con un control previo de la integridad estructural, ausencia de defectos en la empuñadura, saneamiento y sustitución de los puntales.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Sustitución de los puntales: Los puntales de apoyo en el suelo están sometidos a desgaste; para un uso seguro sustituirlos periódicamente usando repuestos originales.

Desinfección: Para la desinfección de la empuñadura usar desinfectantes a base de Hipoclorito de sodio en bajas concentraciones.

Limpieza: Limpiar regularmente la empuñadura usando jabones neutros.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

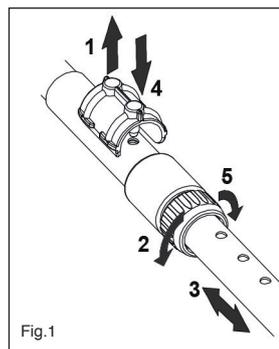


Fig.1

Retirez le ressort de fixation en poussant les côtés avec les deux pouces..
Remover el muelle de bloqueo empujando con ambos pulgares en los lados.


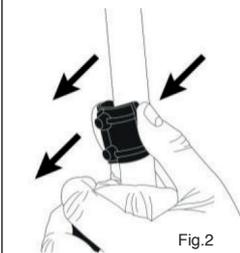


Fig.2



Fig.3

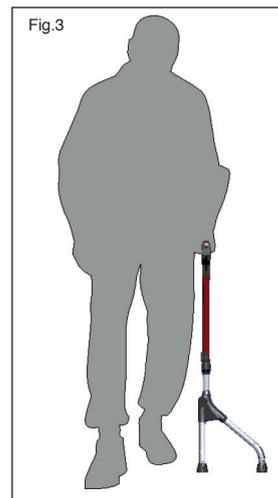

Poids maximal de l'utilisateur
Peso Máx. usuario
100 kg

	FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		FR Code produit ES Código producto		FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso
	FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		FR Numéro de lot ES Número de lote		FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	FR Fabricant ES Fabricante		FR Dispositif médical ES Producto sanitario		FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco

REF 0739/K (43077)

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
Via Bellini 33, Rastignano (Bologna - Italy)
Made in Italy

