

ESPAÑOL

## MULETAS CON DOBLE REGULACIÓN

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

### DESTINO DE USO

Las muletas son auxiliares para la deambulación y son **Dispositivos Médicos en Clase I**.

### CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS



La modalidad de uso y regulación del bastón cambia según las condiciones específicas del usuario; para quien utiliza las muletas por primera vez, es necesaria la asistencia por parte de personal sanitario para la regulación y el adiestramiento para el uso. Es necesaria la evaluación por parte de personal médico en el caso de personas con problemas psicomotrices y portadores de prótesis u órtesis en las extremidades inferiores. En ciertas personas el uso prolongado puede causar afecciones en las articulaciones del brazo; si se advierten dolores en la mano, muñeca, codo u hombro se recomienda abandonar la ayuda y consultar con un médico.

- No usar en contacto directo con la piel lesionada
- Para evitar caídas prestar atención a las superficies mojadas y resbalosas
- **NUNCA** utilizar un dispositivo dañado
- Evitar la inmersión en agua, ya que penetra esta penetra en los orificios y se estanca

Contactar con el fabricante en caso de accidentes o mal funcionamiento.

### REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA

La regulación de la altura desde el suelo depende de la estatura del paciente, del tipo de uso y de la maniobrabilidad subjetiva del paciente mismo. Seguir las fases numeradas en la Fig.1

- Desconectar el muelle de bloqueo de su sede (1) en el tubo (**NO usar herramientas**, ver en Fig.1b).
- Desatornillar el anillo de fijación (2)
- Regular la altura quitando los tubos telescópicos y llevando en correspondencia los orificios (3)
- Introducir nuevamente el muelle de bloqueo (4)
- Bloquear el anillo atornillándolo (5)

### REGULACIÓN DEL SOPORTE DEL ANTEBRAZO

Presionar el botón y desplazar el soporte hasta la longitud deseada (fig.2). La medida se realiza empujando el bastón y flexionando el brazo a 90° (fig.3); la distancia de 3-5 cm entre el brazalete y el músculo del brazo es indicativa, de todos modos, la muleta debería poder girarse libremente alrededor del antebrazo sin que el brazalete toque el brazo.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**Limpieza:** limpiar regularmente la empuñadura y el soporte del antebrazo con jabón neutro; no usar alcohol o solventes. En caso de penetración de agua en el interior de los tubos, desmontar los tubos y el puntal y dejar secar.

**Puntal:** El puntal de apoyo en el suelo está sometido a desgaste; se recomienda sustituirlo periódicamente usando **repuestos originales**.

**Empuñadura:** La empuñadura puede sustituirse

**Reutilización:** Los productos son reutilizables, después del saneamiento, sustitución del puntal y de la empuñadura y verificación de que el bastón esté en buenas condiciones estructurales. **En caso de dudas no utilizar.**

**Saneamiento/Desinfección:** limpiar como en las instrucciones y desinfectar con productos a base de hipoclorito de sodio en baja concentración. Sustituir la empuñadura en caso de reutilización.

**Conservación:** Empacar y conservar en un ambiente limpio.

### CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

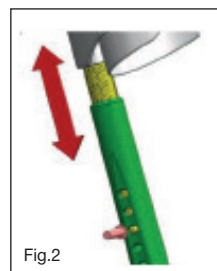


Fig.2

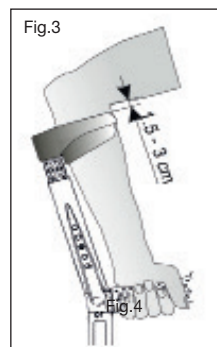


Fig.3

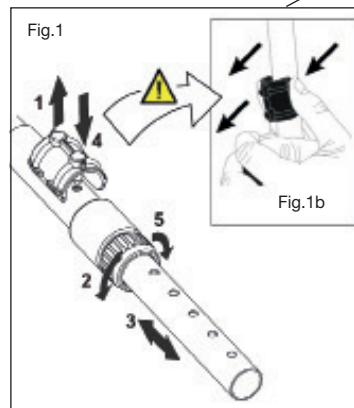


Fig.1

Fig.1b



Poids maximal de l'utilisateur  
Peso Máx. usuario  
**150 kg**

	FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		FR Code produit ES Código producto		FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso
	FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		FR Numéro de lot ES Número de lote		FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	FR Fabricant ES Fabricante		FR Dispositif médical ES Producto sanitario		FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco
	FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco				

REF 0645 (43123) - 0646 (43124)

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.  
Via Bellini 33, Rastignano (Bologna - Italy)  
Made in Italy

