



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEAMBULATORE STILISH STLISH ROLLATOR DÉAMBULATEUR ÉLÉGANT ANDADOR STLISH

ATTENZIONE: È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

ATTENTION: All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

AVIS: Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

ATENCIÓN: Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

REF 43164



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

CE



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD GENERAL

Asegúrese de leer e implementar todas estas instrucciones. No hacerlo podría provocar lesiones al usuario. Guárdelo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Uso previsto

El andador Rollator ligero de 4 ruedas está diseñado para proporcionar apoyo y asistencia a aquellas personas que no pueden o no tienen la confianza necesaria para caminar sin ningún tipo de apoyo. El andador está diseñado para usarse en interiores y exteriores, y se pliega para poder almacenarlo o transportarlo fácilmente.

Medidas de seguridad: consejos básicos

- No supere el límite de peso máximo del usuario de 136 kg.
- No utilice el andador en escaleras o en una escalera mecánica.
- No intente empujar el andador si hay alguien sentado en el asiento.
- No utilice el asiento para llevar personas u objetos.
- No utilice el asiento si el respaldo no está en su lugar.
- No se siente en el asiento cuando el andador esté en una pendiente.
- Solo utilice el andador como un soporte para caminar.
- Solo utilice los accesorios y piezas de repuesto específicos para este andador.
- Las cargas solo se deben transportar usando el bolso. No cuelgue objetos pesados de las empuñaduras, ya que esto podría afectar la estabilidad del andador.

Medidas de seguridad: antes del uso

- Asegúrese de que el andador esté abierto antes de utilizarlo.
- Revise los frenos antes de utilizarlo.
- Asegúrese de que todas las piezas estén firmes y de que las piezas móviles funcionen correctamente.

Medidas de seguridad: durante el uso

- No conduzca el andador estando sentado. El uso inadecuado podría provocar lesiones graves al usuario o daños al armazón o a las ruedas del andador.
- No utilice el andador para caminar hacia atrás.
- Se debe tener cuidado al sortear curvas y otros obstáculos, o al utilizar el andador en superficies inclinadas, irregulares o resbaladizas. En caso de no hacerlo, esto podría ocasionar una caída o una lesión.
- No realice ningún ajuste en el andador cuando lo esté utilizando.
- Tenga cuidado cuando haya una carga pesada en el bolso (carga máxima de 5 kg).
- Todas las ruedas deben estar en contacto con el suelo en todo momento.
- Los frenos deben estar en posición de bloqueo antes de utilizar el asiento.
- Cuando utilice el andador en una posición fija, los frenos deben estar bloqueados.

Lista de contenidos

- A) 1 Armazón del andador
- B) 2 Ruedas frontales extraíbles
- C) 1 Bolso

Desembalaje

- Revise cuidadosamente todas las piezas antes de montar el producto.
- No monte el andador si alguna de las piezas está dañada.
- No monte el andador si falta alguna de las piezas de la lista de contenidos.

Montaje

A Abra el armazón bajando las patas traseras hasta su posición y asegúrelas. Corrobore que esté firme en su lugar.


B Abra el andador, presione en ambos lados del asiento. **IMPORTANTE:** Ambos lados deben "encajar" en su posición

C Inserte las ruedas en el lugar donde se colocan las ruedas delanteras. Asegúrese de oír un clic que indica que la rueda está firmemente en su sitio

D Proceda al ajuste de la altura de las empuñaduras. Presione el perno de bloqueo y ajuste la posición de los manillares a la altura deseada. Coloque el bolso

Plegar el andador (E)

Asegúrese de estar parado detrás del andador. Tire de la correa hacia arriba para plegar el andador

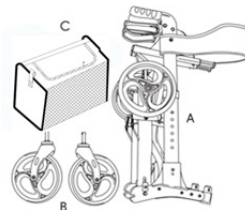

Transportar el andador (F)

Cuando el andador está plegado, puede transportarlo usando los mangos de elevación

Plegar las ruedas traseras (G)

Deslice la lengüeta roja hacia abajo para desbloquear la rueda trasera. Pliéguelas hacia arriba hasta que se fijen en su lugar

Sacar las ruedas delanteras (H)

Para sacar las ruedas delanteras, simplemente presione el botón rojo y tire las ruedas hacia abajo

Sentarse

Cuando utilice el andador como asiento, asegúrese de cumplir con las medidas de seguridad que se detallan en la página uno, en particular.

- Asegúrese de que los frenos de estacionamiento estén en la posición de bloqueo.
- No lo utilice como asiento si el respaldo no está en su lugar.
- No lo utilice como asiento en superficies inclinadas o irregulares.
- No supere el peso máximo del usuario.
- No utilice el andador como una silla de ruedas.

Revisión y funcionamiento de los frenos (I)

Antes de utilizar el andador, compruebe que los frenos funcionen correctamente.

Para reducir la velocidad o frenar, apriete la palanca de freno. Suelte la palanca para seguir avanzando.

Para aplicar el freno de estacionamiento, empuje la palanca de freno hacia abajo en la posición de bloqueo.

Mantenimiento y limpieza

Siempre elimine la suciedad que se acumule después de cada uso con soluciones no agresivas y tenga cuidado al secarlo. No utilice esponjas abrasivas. Periódicamente, revise el funcionamiento de los frenos y el estado de sellado de los elementos de sujeción y las soldaduras



A



B



C




D



E




F

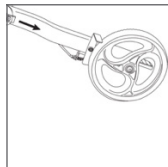

G



H

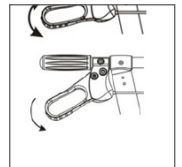

I

 REF	Código producto		Fabricante
 LOT	Número de lote		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745
	Conservar en un lugar fresco y seco		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Conservar al amparo de la luz solar		Producto sanitario
	Consultar las instrucciones de uso		Fecha de fabricación

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.
