

---

**ESPAÑOL**

***CINTURÓN DE SUJECIÓN PARA CAMA***

***ADVERTENCIAS***

Antes de realizar cualquier operación, controlar visualmente la integridad del dispositivo. Siempre que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el punto de venta en el cual se ha realizado la compra. Erregi sas no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del dispositivo. En caso de que se produzca un accidente grave relacionado con el uso del producto, comuníquelo al fabricante y a la autoridad com-

petente del país miembro donde esté establecido el usuario y/o el paciente.

#### DESCRIPCIÓN

**Art 24/07:** Cinturón de sujeción para cama doble de 100 % algodón, consta de dos bandas, la más interna debe colocarse en la cintura del paciente y sujetarse con un botón de fijación, la más externa debe sujetarse a los largueros de la cama con las cintas y los botones de fijación.

El sistema de cierre está compuesto por botones de fijación, la llave magnética se utiliza para la apertura de los botones de fijación. 1 botón de fijación se utiliza para bloquear la banda superior a la cintura del paciente, los otros dos botones de fijación se utilizan para sujetar las cintas a los largueros de la cama. El dispositivo se utiliza para sujetar al paciente que no coopera y necesita terapias. **El cinturón permite al paciente la posición supina y lateral.**

**Art 24/07/01:** Cinturón de sujeción para cama simple de 100 % algodón, consta de una banda que debe colocarse en la cintura del paciente y sujetarse con el botón de fijación, más las dos cintas que deben sujetarse a los largueros de la cama con cierre de gancho. El sistema de cierre está compuesto por un botón de fijación, la llave magnética se utiliza para la apertura del botón de fijación. El botón de fijación se utiliza para bloquear la banda superior a la cintura del paciente, las dos cintas con gancho se utilizan para sujetar el cinturón a los largueros de la cama. El dispositivo se utiliza para sujetar al paciente que no coopera y necesita terapias. **El cinturón permite al paciente sólo la posición supina.**

#### INDICACIONES

Dispositivos utilizados para la sujeción de pacientes encamados.

#### CONTRAINDICACIONES

No se han detectado contraindicaciones salvo en los casos de sensibilidad comprobada a los materiales componentes.

#### PRECAUCIONES DE USO


El dispositivo puede ser aplicado exclusivamente por personal médico y paramédico. El cinturón no debe utilizarse en la pelvis ni en la caja torácica.

**Dispositivos con sistema de cierre magnético, no utilizar en pacientes a los que se haya colocado un estimulador cardíaco, podrían experimentar taquicardia.** Ajustar bien el cinturón al paciente, debe pasar una mano plana entre el paciente y el cinturón. Comprobar siempre que los cierres estén bien cerrados; en caso contrario, la seguridad del paciente puede verse comprometida. Si los cierres no se abren, los cierres pueden cortarse con cúteres o cizallas. Utilizar el dispositivo siempre utilizando una prenda para la protección de la persona. Dispositivo no ignífugo.

#### COMPOSICIÓN

100% ALGODÓN.

#### MODALIDAD DE LAVADO

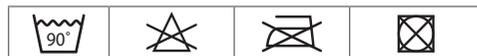

Antes del lavado, retire las llaves y los botones de fijación ya que en caso de contacto con líquidos su funcionalidad podría verse comprometida. El fabricante no se hace responsable de las posibles variaciones en las características técnicas del dispositivo en caso de incumplimiento de las indicaciones de lavado.

#### DESINFECCIÓN

Utilizar productos con presidio médico quirúrgico.

#### CONSERVACIÓN

Conservar protegido de fuentes de luz, calor, humedad.

#### ELIMINACIÓN

Eliminar el dispositivo respetando las normativas vigentes en materia de protección ambiental y recogida selectiva.

<b>REF</b>	Código producto	<b>MD</b>	Producto sanitario
<b>LOT</b>	Número de lote		Fabricante
<b>CE</b>	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Consultar las instrucciones de uso.
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fecha de fabricación		No contiene látex de caucho natural

<b>UDI</b>	Identificador unico		
------------	---------------------	--	--

NO retire la etiqueta del producto sanitario, ya que permite la trazabilidad del producto suministrado (fabricante, UDI, número de lote, código de producto).

#### CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

**REF** 24/07/01 L-XL (Gima 43185)  
24/07 S-M (Gima 43186)  
24/07 L-XL (Gima 43187)

**Erregi S.a.s.**  
Via Adua 40  
21040 Vedano Olona (Va)  
commerciale@erregiausilimedi.it  
www.erregiausilimedi.it  
MADE IN ITALY

