



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **CULLA NEONATALE NEONATAL CRIB BERCEAU POUR NOUVEAU-NÉ CUNA PARA RECIÉN NACIDOS**

MANUALE D'USO - USER'S MANUAL  
MODE D'EMPLOI - MANUAL DEL USUARIO

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado..

**REF**

**43500**

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in Italy



**MD**



## INTRODUCCIÓN

A efectos de el reglamento (UE) 2017/745, el producto entra dentro de los DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE I. Se aconseja leer atentamente el siguiente manual antes de utilizar la instalación sanitaria.

## DESCRIPCIÓN

La cuna para recién nacidos está destinada al uso en hospitales, dentro de las secciones de neonatología, guardería y obstetricia. Se usa para acoger a los recién nacidos durante toda la estancia en el hospital y para facilitar los desplazamientos por las secciones.

Se aconseja leer atentamente el siguiente manual antes de utilizar la instalación sanitaria.

La cuna para recién nacidos está compuesta por el alojamiento en policarbonato transparente provisto de insertos en la base para variar la inclinación de la misma. El carro inferior ha sido realizado con un tubular de acero y está provisto de 4 ruedas giratorias de los cuales 2 de freno independiente.

## INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Y EL USO

### Componentes

El carro de la cuna se entrega completamente desmontado, con accesorios para el montaje. El carro está formado por los siguientes componentes:


#### 1. Patas con Ruedas traseras provistas de freno



#### 2. Patas con Ruedas inferiores



#### 3. Soporte para Cuna

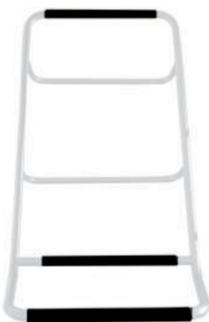

#### 4. Cuna en policarbonato



#### 5. Colchón con forro



### Tornillos para fijación:

- N. 6 TORNILLOS TBE 6x35
- N. 2 TORNILLOS TBE 6x15
- N. 8 arandelas

### PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

Introducir el par de patas traseras provistas de freno (1) una cada vez, enganchándolas en la estructura inferior provista de ruedas (2). Fijar las piezas mediante los 2 tornillos TBE 6x15 con las arandelas relativas (A).



Posteriormente fijar mediante 2 TORNILLOS TBE 6x35 con las arandelas relativas (B).



Coger el soporte para cuna (3) y bloquearlo mediante los 4 tornillos TBE 6x35 con las otras arandelas restantes. Asegurarse de apretar correctamente todos los puntos de montaje.



En este punto, el carro de soporte de la cuna está completamente montado. Introducir la cuna en policarbonato (4) y completarla con el colchón y el forro relativo (5).

## **ADVERTENCIAS PARA UNA CORRECTA MANIPULACIÓN**

### **Posición normal**

Mango para manipulación



### **Posición inclinada**

Mango para manipulación



**base interna, sino que utilice la estructura metálica, no levante la base interna, lo que podría provocar un vuelco.**

- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- Tumbiar al paciente sólo cuando la cuna esté colocada de manera horizontal.
- Tumbiar al paciente sobre la cama sólo después de haber provisto a la cuna con un colchón idóneo.
- No utilizar colchones rígidos (se recomienda el uso de colchones adecuados para cunas de recién nacidos).
- Se prohíbe el uso en ambientes abiertos.
- Para una mejor conservación se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos y el depósito en ambientes muy húmedos.
- Siempre revise antes de usar que todos los componentes estén intactos y no tengan defectos o daños.
- Comprobar que las tuercas de bloqueo del carro inferior estén bien apretadas. Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Limpiar la cuna sin utilizar productos abrasivos ni disolventes. Secar con cuidado. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.
- Utilizar sólo recambios originales..

### **FICHA TÉCNICA**

<b>Medidas</b>	Colchón 63x37x5.5cm Carro con cuna 87x52.5x90h cm Cuna 84.5x52x32.5h cm Caja 91x53x47.5cm
<b>Peso</b>	15 kg – 16,5 kg con caja
<b>Capacidad máxima</b>	10 kg

	Conservar al amparo de la luz solar		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745
	Código producto		Consultar las instrucciones de uso
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Número de lote
	Conservar en un lugar fresco y seco		Fabricante
	Producto sanitario		Fecha de fabricación
	Identificador de dispositivo único		

### **ADVERTENCIA DE USO Y MANTENIMIENTO**

- Utilizar el dispositivo médico exclusivamente para el alojamiento de recién nacidos en los primeros días de vida.
- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Prestar la máxima atención durante los desplazamientos del recién nacido dentro de la sección. Antes de desplazar la cuna, asegurarse de que no haya ruedas frenadas.
- Compruebe que la base esté estable una vez que se haya colocado en su alojamiento. **No empuje contra la**

### **CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.