



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 3 SEZIONI
3 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE
TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 3 SECTIONS
3-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH
CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE TRES SECCIONES
MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 3 SEÇÕES

GIMA 44011, 44013

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Hersteller:

Anji Sukar Furniture Co., Ltd.

Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji, Zhejiang Province, China. P.C.: 313300
peter@zjruixiang.com


REF WT321A

Importato da/imported by/importé par/eingeführt von/importado por:
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 - Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com
Made in China



INSTRUCCIONES PREVENTIVAS

1. Realice un mantenimiento periódico de la camilla. Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados y que el cable no esté deteriorado o desgastado. Asegúrese de que no haya grietas en la estructura de madera.
2. No sobrecargue la camilla más allá del límite de peso recomendado. El hacerlo, podría provocar lesiones graves al usuario. Carga de trabajo máxima de 227 kg.
3. No utilice limpiadores a base de alcohol para limpiar el vinilo. Pueden causar daños al material de vinilo. Use agua tibia y jabonosa para limpiarlo, luego séquelo.
4. Cuando utilice la camilla, asegúrese de que las cuatro patas estén al mismo nivel. El uso de las patas a diferentes niveles puede hacer que la camilla sea inestable y podría causar lesiones.
5. No permita que los niños monten o desmonten la camilla de masaje, a menos que estén bajo su supervisión.
6. Tenga cuidado al usar objetos afilados, ya que pueden perforar la cubierta. Mantenga la cubierta de la camilla lejos de objetos afilados.

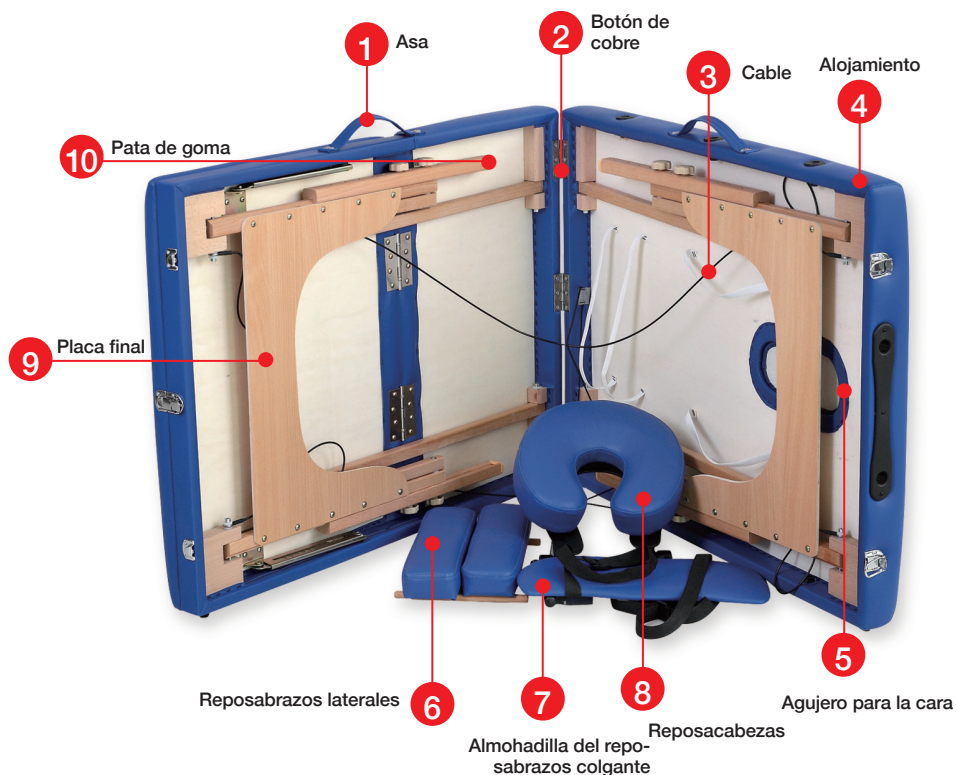

MONTAJE DE LA CAMILLA

Los pasos son los siguientes:



1



2



3



4



5



6

1. Abra el cerrojo.
2. Coloque la camilla sobre un lado con dos patas de goma en el suelo, abra la camilla con las cuatro patas extendidas los más completamente posible. Saque todos los accesorios.
3. Levante la camilla hasta su posición con las patas en el suelo.
4. Coloque los accesorios en el alojamiento correspondiente, sujete el reposabrazos colgante o el cabestrillo en el soporte del reposacabezas.
5. Levante el respaldo uniformemente y lentamente hasta la posición deseada.
6. Ahora la camilla está lista para su uso.

La altura de la camilla es ajustable. Para colocarla en la altura deseada, gire las perillas en la pata y saque la pata móvil para ajustar la altura con la ayuda de los orificios que hay en esta. A continuación, vuelva a insertar la pata y fije firmemente las perillas. Las cuatro patas deben ajustarse de la misma manera, una por una, asegurándose de ajustar todas las patas a la misma altura.

CIERRE Y TRANSPORTE DE LA CAMILLA

1. Levante el respaldo hasta la posición máxima y luego empújelo hacia abajo, bloquee el pestillo.
2. Saque todos los accesorios.
3. Coloque la camilla sobre un lado con dos patas de goma en el suelo.
4. Coloque todos los accesorios debajo de la correa elástica bajo el revestimiento.
5. Doble las patas de cada extremo internamente presionando los brazos de soporte correspondientes.
6. Doble la camilla hacia arriba y bloquee el pestillo.
7. La camilla se puede llevar como una maleta tomándola del asa.



Advertencia: Si el bastidor/piernas/estructura de la camilla están dañados de alguna manera, no se debe usar la camilla. El uso de esta camilla cuando está dañada puede causar heridas o lesiones graves a usted o a su paciente. Debe repararse inmediatamente.



CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.