



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**SEDIA PER MASSAGGI PIEGHEVOLE**  
**FOLDABLE MASSAGE CHAIR**  
**CHAISE DE MASSAGE PLIANTE**  
**FALTBARER MASSAGESTUHL**  
**SILLA DE MASAJE PLEGABLE**  
**CADEIRA DE MASSAGEM DOBRÁVEL**

---

## GIMA 44050

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante:

**Anji Sukar Furniture Co., Ltd.**

Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji, Zhejiang

Province, China. P.C.: 313300

peter@zjruixiang.com

**REF** MC006

Importato da/imported by/importé par/importado por

**GIMA S.p.A**

Via Marconi, 1 – 20060

Gessate (MI) – Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in China



## INSTRUCCIONES PREVENTIVAS

1. Realice un mantenimiento periódico de la silla. Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados y que el cable no esté deteriorado o desgastado. Asegúrese de que no haya grietas en la estructura de metal.
2. No sobrecargue la silla más allá del límite de peso recomendado. El hacerlo, podría provocar lesiones graves al usuario. Este producto está probado para mantener una carga de trabajo máxima de 120 kg.
3. No utilice limpiadores a base de alcohol para limpiar el vinilo. Pueden causar daños al material de vinilo. Use agua tibia y jabonosa para limpiarlo, luego séquelo.
4. Cuando utilice la silla, asegúrese de que las cuatro patas estén al mismo nivel. El uso de las patas a diferentes niveles puede hacer que la silla sea inestable y podría causar lesiones.
5. No permita que los niños monten o desmonten la silla de masaje, a menos que estén bajo su supervisión.
6. Tenga cuidado al usar objetos afilados ya que pueden perforar la cubierta. Mantenga la cubierta de la silla lejos de objetos afilados.



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Los pasos son los siguientes:



a



b



c




d




e




f

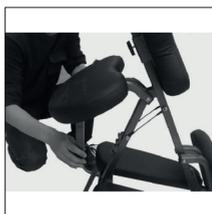


g

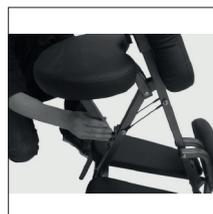

h

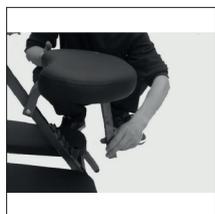

i

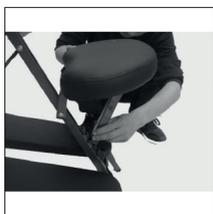

j



k

1. Saque la silla de masaje de la caja de cartón como se muestra en la imagen a.
2. Abra las cuatro patas de la silla y asegúrese de que las piernas estén en el suelo al mismo nivel, como se muestra en las imágenes b y c.
3. Ajuste el soporte del reposacabezas en la dirección más cómoda para el usuario, como se muestra en la imagen d.
4. Ajuste la posición del reposapecho y luego asegure la posición usando la perilla negra detrás del reposapecho, los pasos a seguir se muestra en las imágenes e y f.
5. Ajuste la almohadilla del asiento en una posición cómoda usando el soporte del asiento como se muestra en las imágenes g y h.
6. Ajuste el reposamanos en una posición cómoda usando el soporte del reposamanos como se muestra en las imágenes i y j.
7. Ahora la silla de masaje portátil está lista para usar.

### CONDICIONES DE GARANTIA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.