




# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## CAMILLAS DE VISITA ECONÓMICAS

### Manual de uso

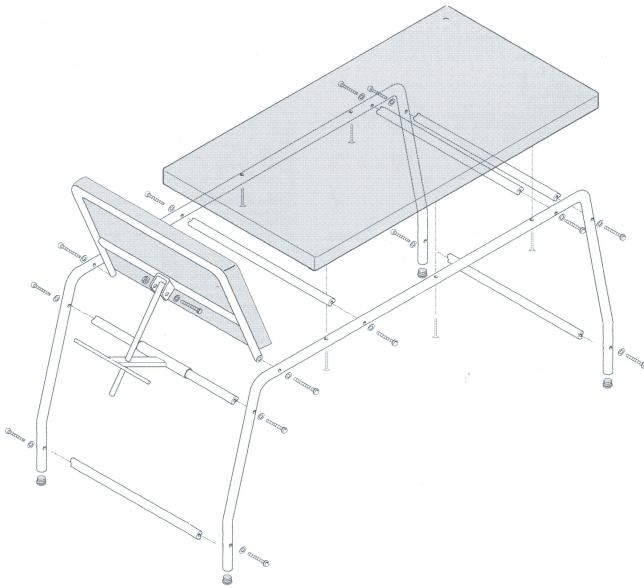

**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

**REF** 44450 - 44451 - 44455 - 44456



Gima S.p.A.  
Gessate (MI) - Italy  
Made in Italy



- 44450** - Camilla económica pintada negro
- 44451** - Camilla económica pintada blanco
- 44455** - Camilla económica cromada azul
- 44456** - Camilla económica cromada beige

## ***INTRODUCCIÓN***

La camilla de visita Económica está destinada para el uso en hospitales, espacios comunitarios, sanatorios; idónea especialmente para estudios médicos/ambulatorios.

A efectos de la Directiva 2007/47/EC la cama entra dentro de los DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE I.

## ***DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO***

La camilla es de dimensiones contenidas; la colchoneta, lavable e ignífuga, está compuesta por dos partes, una parte fija, y otra reclinable en distintas posiciones.

### **Componentes**

- N.2 Patas
- N.1 travesaño con elevación de respaldo
- N.5 travesaños
- Acolchado respaldo
- Acolchado asiento

## **INSTRUCCIONES**

La camilla se entrega completamente desmontada

1. Coger las 2 patas y fijar con unos pernos los travesaños, incluido el travesaño con elevación de respaldo.
2. Por último, fijar con tornillos los acolchados al bastidor.



## Ficha técnica

2016	44450 – CAMILLA DE VISITA ECONÓMICA NEGRO 44451 – CAMILLA DE VISITA ECONÓMICA BLANCO 44455 – CAMILLA DE VISITA ECONÓMICA AZUL 44456 – CAMILLA DE VISITA ECONÓMICA BEIGE	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	La camilla de visita es de dimensiones contenidas, concebida para estudios médicos/ambulatorios. La colchoneta está compuesta por dos partes, una parte fija y otra reclinable en distintas posiciones.	
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	Estructura y piezas en metal	- Estructura en tubular de acero obtenido de laminado en frío, dimensiones mm. 30x1,5 - Estructura cromada o pintada con polvo epoxi color blanco ral 9010
	Tejido y Acolchado	- Dimensiones 61x50 - 61x130 - Acolchado compuesto por aglomerado mm. h.14 y goma mm. h.40 - Material lavable LEDERFLEX GAZEBO/AE (Composición: 87%PVC – 13% CO) en CLASE 1 - Colores disponibles: Negro 991, Blanco 9010, Azul 4915, Beige 151
	Medidas	cm.180 x 61 x h75
	Peso	29 Kg
	Capacidad máxima	90/100 Kg
	Normas de limpieza (Tejidos)	Limpie con un paño humedecido y enjabonado y aclare bien con agua limpia. No utilice solventes, lejía ni detergentes químicos o espray para lustrar.
	Notas	Los colores y las características podrían ser cambiados por mejoras y/o modificaciones.

## ADVERTENCIA DE USO

- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- **Cuando se regula la altura del respaldo asegúrese de que nadie introduzca las manos o las piernas u otras cosas dentro del área de desplazamiento: riesgo de aplastamiento**
- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- Tumbarse al paciente solo cuando el somier se encuentra totalmente en posición horizontal.
- Desplazar la camilla sin levantarla del suelo.
- Si la camilla está provista de ruedas, antes de moverla deberá asegurarse de que las ruedas no están frenadas.
- Se prohíbe el uso en ambientes abiertos.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para una mejor conservación se aconseja evitar la exposición prolongada

a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos y el depósito en ambientes muy húmedos.

- Comprobar que las tuercas de bloqueo de las patas estén bien apretadas.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Limpie la colchoneta con un paño humedecido y enjabonado y aclare bien con agua limpia.
- No utilice solventes, lejía ni detergentes químicos o espray para lustrar.
- Limpiar la camilla sin utilizar productos abrasivos. Secar con cuidado.
- Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.
- Utilizar sólo recambios originales.

## **GARANTÍA**

- La camilla cuenta con una garantía de dos años por defectos de material y de elaboración, excluyendo las piezas de consumo.
- Las manipulaciones o los daños causados por un uso erróneo de la camilla comportan la anulación inmediata de la garantía.
- Este dispositivo médico ha sido creado exclusivamente para las modalidades indicadas anteriormente. Cualquier otro uso debe considerarse impropio.
- No se responde ante daños a personas y cosas debidos a un uso impropio de la instalación.