




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**EXAMINATION TABLE
LETTINO DA VISITA
DIVAN D'EXAMEN
CAMILLA DE EXPLORACIÓN**

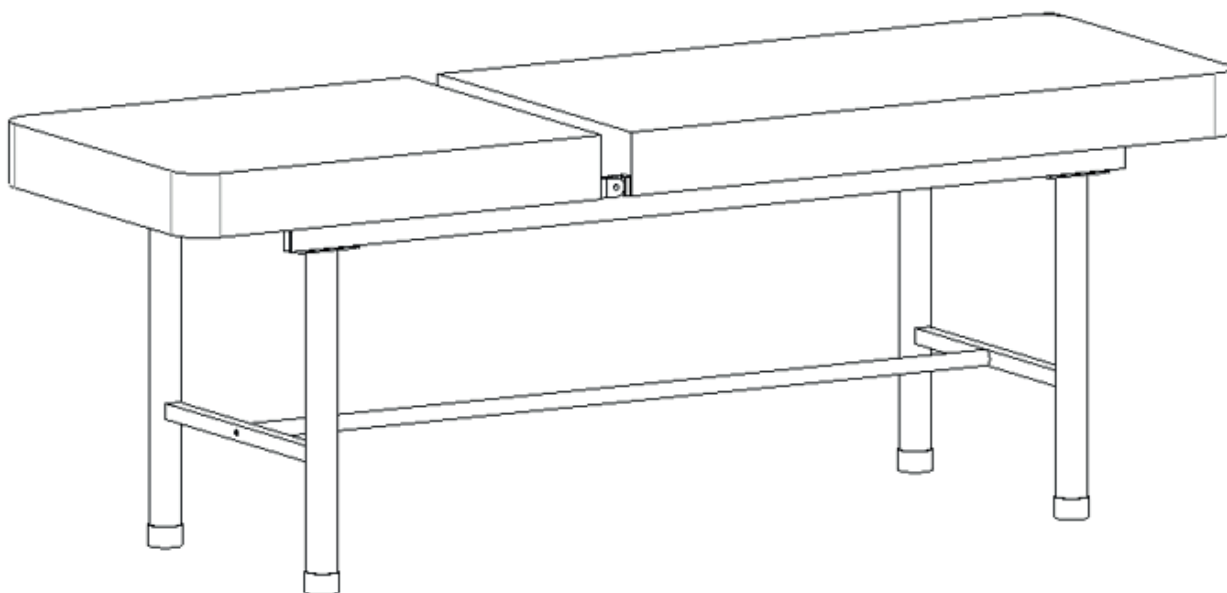

Manuale d'uso - User manual -
Manuel d'utilisation - Introducción del manual

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

ATTENTION : Les opérateurs doivent lire attentivement et comprendre complètement le présent manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores deben leer atentamente y comprender completamente el presente manual antes de utilizar el producto.

Gima 44460



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration
Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
Made in China

REF X09



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelleaan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Nota:

Se ruega leer atentamente este manual y seguir estrictamente los pasos antes de la instalación y el uso. Todos los usuarios deben conocer el manual de instrucciones y todas las precauciones.

- Este manual corresponde a la camilla de exploración de acero inoxidable X09. Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de comprobación del mantenimiento.
- Los gráficos de este manual son solo para referencia del usuario. En caso de uso real, consulte el objeto real.
- Este manual de usuario incluye la descripción, instrucciones, mantenimiento y parámetros técnicos del producto.
- Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el centro de servicio posventa o el distribuidor.
- Cualquier persona que utilice o ponga en funcionamiento este producto debe leer y respetar las instrucciones de este manual.
- Salvo en algunas situaciones imprevistas, los usuarios deben estar familiarizados con el uso y las precauciones.

USO PREVISTO

Una camilla de exploración médica es esencial para la comodidad del paciente cuando sufre una lesión, un traumatismo o un shock

1. Guía de instalación
1.1 Lista de accesorios estándar

Después de abrir la caja de embalaje, compruebe que los siguientes componentes estén completos en el interior.

Mesa a:



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

N.º	Nombre	Dibujo	Especificaciones	CANT.	Unidad
1	Colchoneta		/	1	pzas
2	Estructura de las patas		539*543mm	2	pzas
3	Tubo de conexión		Φ25*1.2*1323-M8mm	1	pzas
4	Tornillo	/	Se référer au Tableau a.1	1	kit

Tabla a.1


N.º	Nombre	Dibujo	Especificaciones	CANT.	Unidad
1	Tornillo hexagonal exterior		M10*25mm	8	pzas
2	Arandela plana		Φ10*Φ21*H1.8mm	8	pzas
3	Arandela elástica		Φ10*Φ17*H3mm	8	pzas
4	Contratuerca		M10mm	8	pzas
5	Tornillo hexagonal exterior		M8*40mm	2	pzas
6	Arandela plana		Φ8*Φ16*H1.2mm	2	pzas
7	Arandela elástica		Φ8*Φ14*H2.5mm	2	pzas

1.2 Instalación de la estructura de las patas

Coloque una almohadilla de protección y ponga la estructura principal boca abajo;

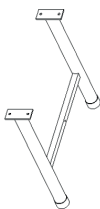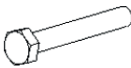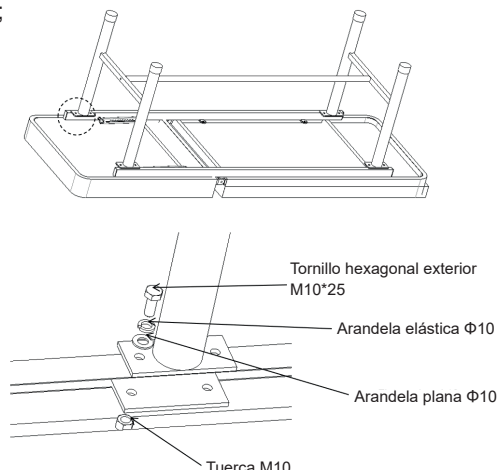


2. Método de uso

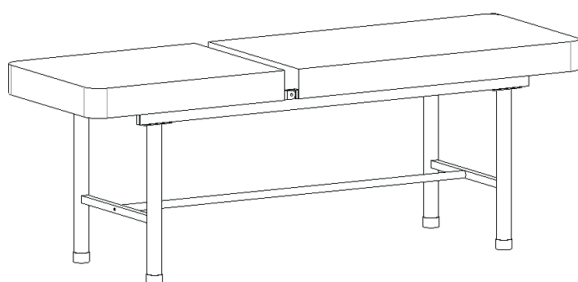


Dimensiones	Longitud	mm	1900±10
	Ancho		600±10
	Altura		680±10
Peso	Carga de trabajo segura	kg	170


1.3 Instalación de tuberías de conexión

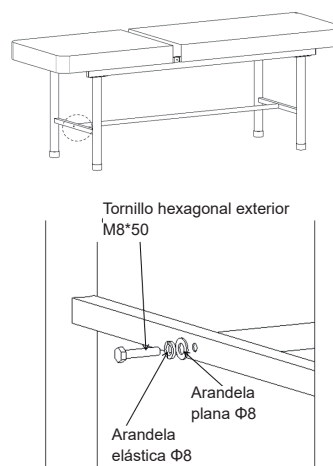

Función de elevación del respaldo

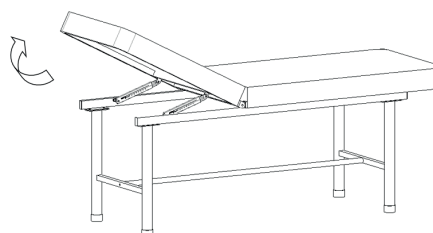

Levante el respaldo para elevar la parte posterior. Una vez que haya alcanzado la posición más alta, podrá bajarlo nuevamente

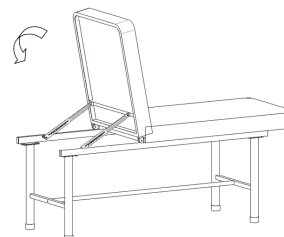

3. Mantenimiento de la camilla de exploración de acero inoxidable

1. Para utilizar la camilla de exploración de forma segura, es necesario realizar inspecciones periódicas de seguridad de la misma. Se recomienda realizar una revisión cada seis meses para asegurarse de que las conexiones no estén sueltas y que el funcionamiento sea normal.
2. Cuando la estructura de la camilla de exploración se desgaste y alcance el final de su vida útil, las piezas metálicas y plásticas podrán reciclarse.
3. Evite arañar el panel con aparatos o cuchillos afilados durante su uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
4. Si el panel se mancha accidentalmente, se recomienda limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar la camilla de exploración, ya que provocarían la oxidación de la superficie de acero inoxidable.

4. Embalaje, transporte, almacenamiento

1. El embalaje de la camilla de exploración se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite movimientos bruscos, vibraciones fuertes o exponer la camilla de exploración a la luz solar o la lluvia durante el transporte.
3. La camilla de exploración debe guardarse:
 - a) Temperatura ambiente: -40°C ~ +70°C.
 - Humedad relativa: ≤ 95 %.
 - c) Presión atmosférica: 500hPa ~ 1060hPa.

5. Servicio postventa

1. Guarde adecuadamente los documentos que acompañan a la máquina, así como las facturas del producto. Será necesario presentarlos cuando la empresa realice servicios de garantía o mantenimiento.
2. Si surge algún problema durante el uso, póngase en contacto con nuestra empresa lo antes posible, para que podamos ofrecerle un servicio de soporte técnico y mantenimiento preciso y oportuno.
3. Desde la fecha de venta, si el producto presenta algún defecto o daño causado por una instalación y uso correctos según las especificaciones, el producto tendrá una garantía gratuita de un año y un servicio de mantenimiento de por vida, siempre que se presente el «certificado» o la factura.
4. Desde la fecha de compra, si el producto presenta daños o no funciona correctamente debido a problemas de calidad dentro del primer año, la empresa ofrecerá a los usuarios la reparación gratuita del producto.
5. Servicio de por vida por parte del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

Aviso: Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Symboles	
Symboles	Signification
	Fabricant
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Disposition DEEE
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	Suivez les instructions d'utilisation
	Dispositif médical
	Code produit
	Identifiant unique de l'appareil
	Importé par
	Limite de température
	Limite d'humidité
	Limite de pression atmosphérique
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	À conserver dans un endroit frais et sec
	Attention : lisez attentivement les instructions (avertissements)

