



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BARELLA PROFESSIONALE DA CORZIA**  
**PROFESSIONAL STRETCHER TROLLEY**  
**CHARIOT BRANCARD PROFESSIONNEL D'URGENCE**  
**CARRO CAMILLA PROFESIONAL DE URGENCIAS**




- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

**REF**

**44760**

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in Italy

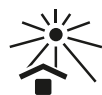



Entonces fijar los travesaños laterales (3) en la estructura siempre mediante 4 TORNILLOS TTDE 8x50 + arandelas.



Fijar el somier de la camilla (4) a la estructura inferior mediante 8 TORNILLOS TTQST 8x40 + pernos y arandelas.



Si proporcionadas, fijar las barandillas a la estructura del somier (4) mediante 4 TORNILLOS TTQST 8x40 + pernos y arandelas por cada barandilla (ver las ampliaciones en los detalles).



### FICHA TÉCNICA:

<b>Medidas</b>	Camilla con parachoques: 202 x 71 x h 90 cm (78 cm neta somier) Camilla con barandillas: 202 x 75 x h 90 cm (78 cm neta somier) Caja: cm 205 x 24 x 76h
<b>Peso</b>	40 kg 48 kg con caja
<b>Capacidad máxima</b>	135 kg

### ADVERTENCIAS DE USO

- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Comprobar que las tuercas de bloqueo estén bien apretadas.
- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- No apto para el uso en espacios abiertos.
- Al ajustar la altura de la camilla y del respaldo, asegúrese de que nadie introduzca las manos o las piernas u otras cosas en el área de desplazamiento: RIESGO DE APLASTAMIENTO.
- Desplazar la camilla sin levantarla del suelo.
- Si la camilla está provista de ruedas, antes de moverla deberá asegurarse de que las ruedas no están frenadas.

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Utilizar sólo recambios originales.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Para una mejor conservación se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos y el depósito en ambientes muy húmedos.
- Limpiar las superficies de acero inoxidable con agua jabonosa y utilizar desinfectantes específicos.
- Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
- No derramar detergentes a base de cloro o amonio, materias grasas y sustancias oleosas sobre las superficies.
- No utilizar aparatos que contengan hierro. Se es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.